



Arthroskopie



ACL • Rekonstruktion

Arthroscopy




ACL • Reconstruction

Patellarsehne
Patellar Tendon

Semitendinosus - Gracilissehne
Semitendinosus - Gracilis Tendon

Quadricepssehne
Quadriceps Tendon

Arthroskopie
Arthroscopy

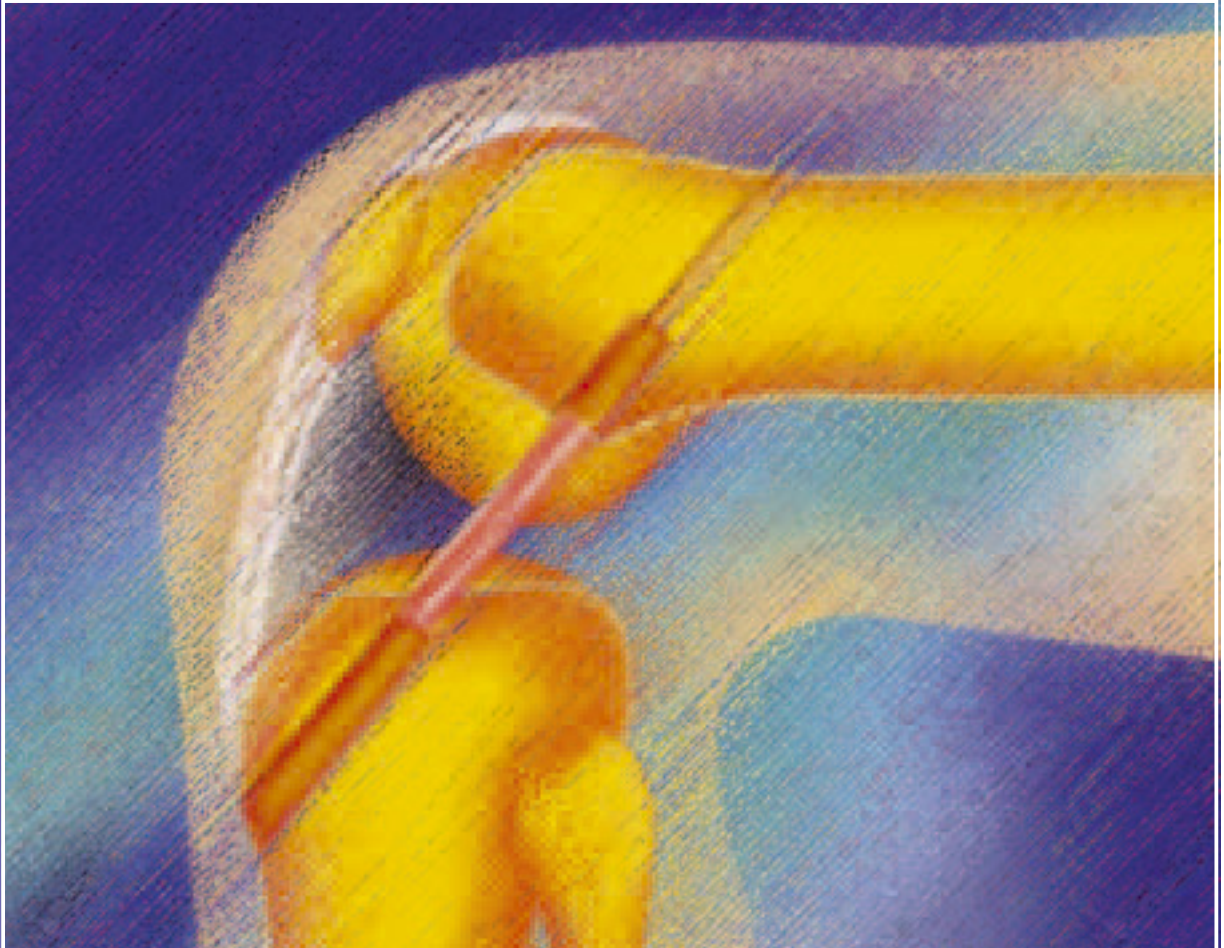

Rekonstruktion mit
Patellarsehne (BTB)

*Reconstruction with
Patellar Tendon (BTB)*

Basic Set for ACL Reconstruction

with Patellar Tendon (BTB)
by Boszotta

Basis-Set zur ACL-Rekonstruktion

mit Patellarsehne (BTB)
nach Boszotta

Arthroskopie
Arthroscopy

Artikel	Article	Typen / Types	Seite / Page	Stk. / pcs.	Order
VKB-Zielgerät	ACL alignment device				
»Modell Heidelberg« mit Zielhaken	»Heidelberg« with alignment hook	8874.011	B 411.101c	1	☐
»Modell Heidelberg« mit Ziellöffel	»Heidelberg« with alignment spoon	8874.012	B 411.101c	1	☐
Zielbohrdraht, mit Spiralschliff, GL 310 mm	Alignment wire with spiral thread, TL 310 mm	89960.1025	B 411.101d	1	☐
Zielbohrdraht, mit Spiralschliff, GL 430 mm	Alignment wire with spiral thread, TL 430 mm	89960.1125	B 411.101d	1	☐
Druckluft-Bohrmaschine	Compressed air drill	8869.911	B 411.101g	1	☐
Hohlbohrer Ø 9,5 mm	Hollow drill Ø 9.5 mm	8869.851	B 411.101e	1	☐
hierzu: Auswerfer	also: Ejector	8869.852	B 411.101e	2	☐
Hohlfräser Ø 8,4 mm	Hollow burr Ø 8.4 mm	8869.841	B 411.101f	2	☐
Hohlfräser Ø 9,4 mm	Hollow burr Ø 9.4 mm	8869.843	B 411.101f	2	☐
Transtibiale Bohrerführung, "Offset" 6 mm	Transtibial drill guide, "offset" 6 mm	8868.261	B 411.101d	1	☐
Fadenzieher	Thread puller	8869.921	B 411.101g	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 9 mm	Cannulated drill Ø 9 mm	89960.1090	B 411.101h	1	☐
Handgriff für kanulierte Bohrer	Handle for cannulated drills	8869.821	B 411.101h	1	☐
Stößel, gebogen	Pusher, curved	8869.991	B 411.101i	1	☐
Arthroskopische Arbeits-Platte	Arthroscopic working place	8866.902	B 411.101k	1	☐
Klemmen-Aufnahme	Clamp holding fixture	8866.911	B 411.101k	1	☐
Pinzetten-Klemme	Tweezers clamp	8866.912	B 411.101l	1	☐
Parallel-Schraubklemme	Parallel vise	8866.913	B 411.101l	1	☐
V-Klemme	V-clamp	8866.914	B 411.101l	1	☐
Lineal	Ruler	8866.919	B 411.101k	1	☐
Transplantat-Schablone	Transplant template	8866.933	B 411.101m	1	☐
Knochenblockaufnahme 8,4 mm	Bone block holder 8.4 mm	8866.923	B 411.101m	2	☐
Knochenblockaufnahme 9,4 mm	Bone block holder 9.4 mm	8866.924	B 411.101m	2	☐
Knochenblockaufnahme 10,4 mm	Bone block holder 10.4 mm	8866.925	B 411.101m	2	☐

11


☐ Angebot / Offer	☐ Bestellung / Order	☐ Info
Name / Klinik / Praxis Name / Hospital / Practice		
Anschrift Address		
PLZ / Ort Post code / Town	Tel.	Fax
Unterschrift Signature	Datum Date	Bemerkung Comment
Richard Wolf GmbH · Postfach 11 64 · D-75434 Knittlingen · Tel. (0 70 43) 35-0 · Fax (0 70 43) 3 53 00		

ACL Technique

by Boszotta

ACL-Technik

nach Boszotta

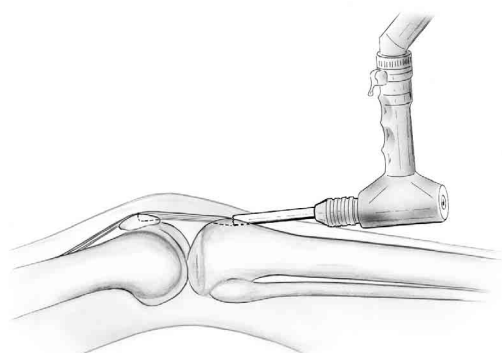


Entnahme des Transplantats

Druckluft-Bohrmaschine.....	8869.911
Hohlfräser, Innen-Ø 8,4 mm	8869.841
Hohlfräser, Innen-Ø 9,4 mm	8869.843
Hohlfräser, Innen-Ø 10,5 mm	8869.844

Transplant harvesting

Compressed air drill	8869.911
Hollow burr, inner Ø 8.4 mm	8869.841
Hollow burr, inner Ø 9.4 mm	8869.843
Hollow burr, inner Ø 10.5 mm	8869.844

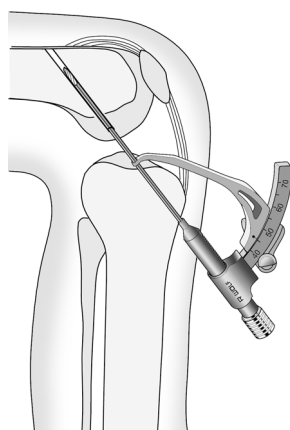


Anlage der tibialen und femoralen Ziel-Bohrung

VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg« mit Zielhaken	8874.011
VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg« mit Ziellöffel	8874.012
Bohrerführung für	
Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm	8874.151
Zielbohrdraht Ø 2,5 mm, GL 310 mm.....	89960.1025
Zielbohrdraht Ø 2,5 mm, GL 430 mm.....	89960.1125

Creating the tibial and femoral alignment channel

ACL alignment device »Heidelberg« with alignment hook	8874.011
ACL alignment device »Heidelberg« with alignment spoon	8874.012
Drill guide for	
Alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm	8874.151
Alignment wire Ø 2.5 mm, TL 310 mm.....	89960.1025
Alignment wire Ø 2.5 mm, TL 430 mm.....	89960.1125

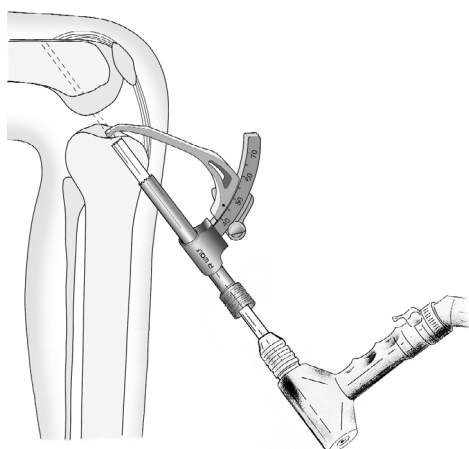

Ausführung der tibialen Bohrung

Drilling the tibial channel

Außen-Ø Outer Ø	Hohlbohrer Hollow drill	Auswerfer Ejector	Bohrerführung Drill guide	Griffansatz Handle attachment
9.5 mm	8869.851	8869.852	8874.152	8869.601
10.5 mm	8869.853	8869.854	8874.153	
11.6 mm	8869.855	8869.856	8874.154	

(Zielgerät 8874.011/.012 und Druckluftbohrmaschine 8869.911)


(Alignment device 8874.011/.012 and compressed air drill 8869.911)

ACL Instrument Set

by Boszotta

ACL-Instrumentarium

nach Boszotta

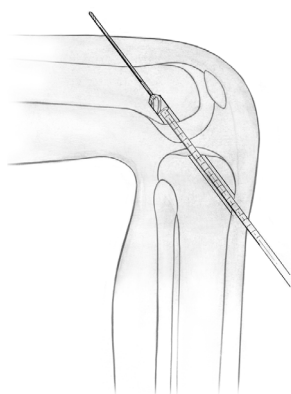

Ausführung der femoralen Bohrung

(Zielbohrdraht Ø 2,5 mm, 89960.1025)

Kanülierter Bohrer

für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm

Ø 8 mm89960.1080

Ø 9 mm89960.1090

Ø 10 mm89960.1010

Drilling the femoral channel

(Alignment wire 2.5 mm, 89960.1025)


Cannulated drill

for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm

Ø 8 mm89960.1080

Ø 9 mm89960.1090

Ø 10 mm89960.1010

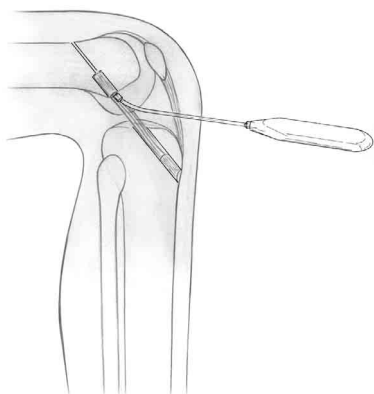

Reimplantieren

Stößel8869.991

Reimplantation

Pusher8869.991

Unique advantages of the optimized arthroscopic press fit technique designed by Boszotta:

- ☐ Significantly faster and safer harvesting of the graft
- ☐ Standardised diameter of the bone plugs
- ☐ No time-consuming trimming of the bone plugs necessary
- ☐ Optimum bone contact for fast healing
- ☐ No interference screws necessary
- ☐ Filling in of the levelling defects with cylindrical bone from the drilled tibial channel with nothing additional required

Einzigartige Vorteile der optimierten arthroskopischen Press-fit-Technik nach Boszotta:

- ☐ Deutlich raschere und sichere Transplantat-Gewinnung
- ☐ Standardisierter Durchmesser der zylindrischen Knochenblöcke
- ☐ Keine zeitaufwendige Nachbehandlung der Knochenblöcke erforderlich
- ☐ Optimaler Knochenkontakt bewirkt rasches Einheilen
- ☐ Keine Interferenz-Schrauben erforderlich
- ☐ Auffüllen der Hebedefekte mit zylindrischen Knochen aus dem tibialen Bohrkanal ohne zusätzlichen Aufwand

ACL Instrument Set

by Boszotta

ACL alignment device »Heidelberg«

ACL-Instrumentarium

nach Boszotta

VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg«

				
VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg« bestehend aus: ACL alignment device »Heidelberg« consisting of:		Typen / Types	Komplett-Set / Complete Set Typen / Types	
			8874.011	8874.012
Grundkörper zur Aufnahme von Zielhaken und -löffel sowie Bohrerführungen Base section for alignment hook and spoon and for drill guides		8874.111	●	●
Zielhaken Alignment hook		8874.121	●	
Ziellöffel zur direkten Platzierung Alignment spoon for direct placement		8874.123		●
Bohrerführung für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm Drill guide for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm		8874.151	●	●
Bohrerführung für Hohlbohrer Drill guide for hollow drill		Ø 9.5 mm	8874.152	●
		Ø 10.5 mm	8874.153	Zubehör / accessories
		Ø 11.6 mm	8874.154	

ACL Instrument Set
by Boszotta

ACL-Instrumentarium
nach Boszotta


Arthroskopie
Arthroscopy

		
	für Hohlbohrer for hollow drill	Typen Types
 Bohrerführung für Hohlbohrer Drill guide for hollow drill	8869.851	8874.152
	8869.853	8874.153
	8869.855	8874.154

Für oszillierende Anwendung
For oscillating application





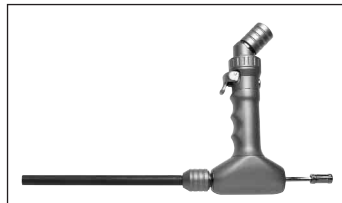




Zur Entnahme des tibialen Knochenblocks -
zum späteren Auffüllen der Hebedefekte an Patella und Tibia





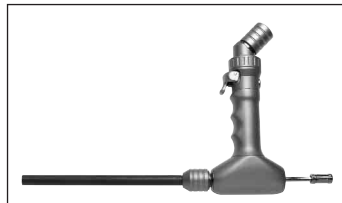



Für oszillierende Anwendung For oscillating application	Außen-Ø Outer Ø	NL WL	Hohlbohrer Hollow drill	Auswerfer Ejector	Griffansatz Handle attachment
 Hohlbohrer Hollow drill	9.5 mm	185 mm	8869.851*	8869.852**	8869.601
	10.5 mm		8869.853*	8869.854**	
	11.6 mm		8869.855*	8869.856**	

* we recommend that two of these instruments are available in the required size.

** Ejector cannulated for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm.

* es werden je 2 Stück von der gewünschten Größe im Set empfohlen.

** Auswerfer kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm.

ACL Instrument Set

by Boszotta

ACL-Instrumentarium

nach Boszotta

Arthroskopie
Arthroscopy

For standardised transplant harvesting

Zur standardisierten Transplantat-Entnahme



Für oszillierende Anwendung For oscillating application	Innen-Ø Inner-Ø	NL WL	Typen Types	Griffansatz Handle attachment
 Hohlfräser Hollow burr	8.4 mm	75 mm	8869.841*	8869.601
	9.4 mm	90 mm	8869.843*	
	10.5 mm	90 mm	8869.844*	

* we recommend that two of these instruments are available in the required size.

* es werden je 2 Stück von der gewünschten Größe im Set empfohlen.

11



Zum Anpassen des Knochenblocks:

Transplantat-Schablone,

Ø 6 - 12 mm8866.933

For sizing the bone plug:

Transplant template,

Ø 6 - 12 mm8866.933

ACL Instrument Set
by Boszotta

ACL-Instrumentarium
nach Boszotta

Arthroskopie
Arthroscopy

For endoscopic repair of the anterior cruciate ligament

Zur endoskopischen transtibialen Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes



Compressed air drill
with quick-mount and sealing cap8869.911

Druckluft-Bohrmaschine
mit Schnellkupplung und Verschlusskappe.....8869.911

			
	Ø	GL TL	Type Type
Fadenzieher Thread puller 	5 mm	350 mm	8869.921

ACL Instrument Set
by Boszotta

ACL-Instrumentarium
nach Boszotta

For femoral drilling

Für femorale Bohrung



Mit Spezialbeschichtung zur Erhöhung der Lebensdauer
With special coating to increase life

Außen-Ø
Outer-Ø

Typen
Types

Handgriff
Handle

6.0 mm

89960.1060

6.5 mm

89960.1065

7.0 mm

89960.1070

7.5 mm

89960.1075

8.0mm

89960.1080

8.5 mm

89960.1085

9.0 mm

89960.1090

9.5 mm

89960.1095

10.0 mm

89960.1010

10.5 mm

89960.1910

11.0 mm

89960.1011

11.5 mm

89960.1911

12 mm

89960.1012

12.5 mm

89960.1912

13.0 mm

89960.1013

8869.821



Bohrer, kanüliert
für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm
Drill, cannulated
for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm

ACL Instrument Set
by Boszotta

ACL-Instrumentarium
nach Boszotta

Arthroskopie
Arthroscopy

For introducing the bone plug

Zum Einbringen des Knochenblocks



	Ø	Typen Types
Stößel, gebogen Pusher, curved 	6.0 mm	8869.991

ACL Instrument Set by Boszotta

ACL-Instrumentarium nach Boszotta



For sterilisation, transport, storage:

ACL instrument tray

to hold the complete ACL instrument set
consisting of:

- 1 tray (38 301.022) for drill set
- 1 tray (38 301.023) for alignment device
- 1 tray cover.....38 301.021

Dimensions (l x w x h):

complete instrument set: 380 x 240 x 80 mm

tray for drill set: 380 x 240 x 55 mm

tray for alignment device: 380 x 240 x 55 mm

Für Sterilisation, Transport, Lagerung:

ACL-Instrumentarium-Tray

zur Aufnahme und Fixierung des
kompletten ACL-Instrumentariums
bestehend aus:

- 1 Behälter (38 301.022) für Bohr-Set
- 1 Behälter (38 301.023) für Zielgerät-Set
- 1 Behälter-Deckel.....38 301.021

Abmessungen (L x B x H):

Komplett-Behälter: 380 x 240 x 80 mm


Bohr-Set-Behälter: 380 x 240 x 55 mm

Zielgerät-Set-Behälter: 380 x 240 x 55 mm

Arthroscopic Working Station

Arthroskopische Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

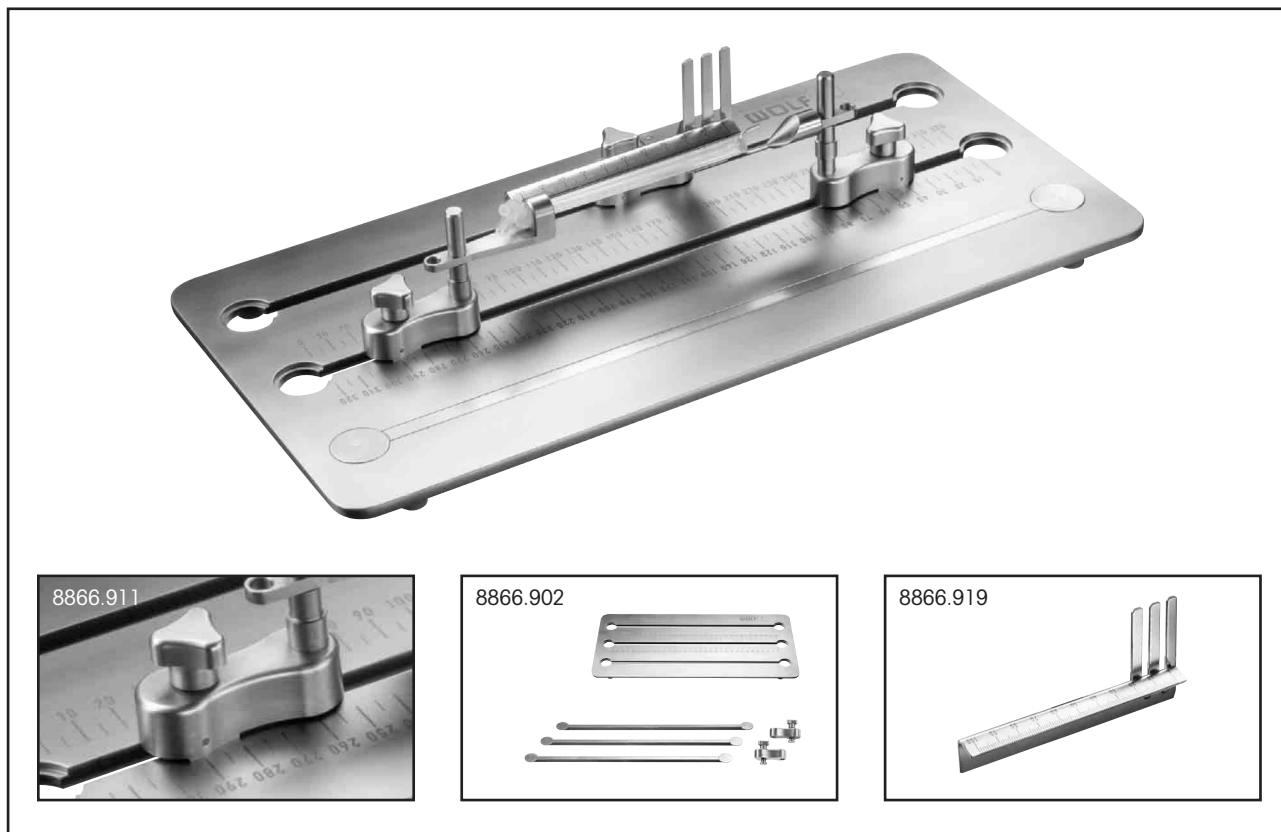

Arthroscopic working station

incl. covers and

2 clamp holding fixtures (8866.911)8866.902

Arthroskopische Arbeitsplatte

mit Abdeckungen und

2 Klemmen-Aufnahmen (8866.911)8866.902

Ruler

for tendon linear measuring,

graduation of scale 0 - 100 mm8866.919

Lineal

zur Längenmessung der Sehne,

Skalierung 0 - 100 mm8866.919

also:



Clamp holding fixture8866.911

hierzu:

Klemmen-Aufnahme8866.911


*Transplant Holding Fixtures
for Arthroscopic Working Station*

Transplantat-Aufnahmen
zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

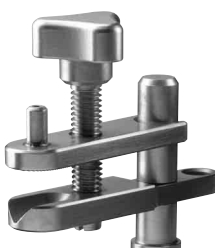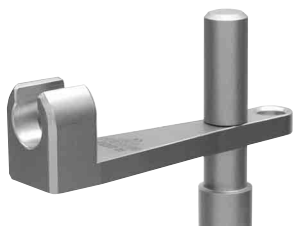		Typen Types
	Pinzetten-Klemme Tweezers clamp	8866.912
	Parallel-Schraubklemme Parallel vise	8866.913
	V-Klemme V-clamp	8866.914
	Knochenblockaufnahme Bone block holder	8.4 mm 8866.923
		9.4 mm 8866.924
		10.4 mm 8866.925

Holding Fixtures for Preparation for Arthroscopic Working Station

Aufnahmen zur Präparation zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

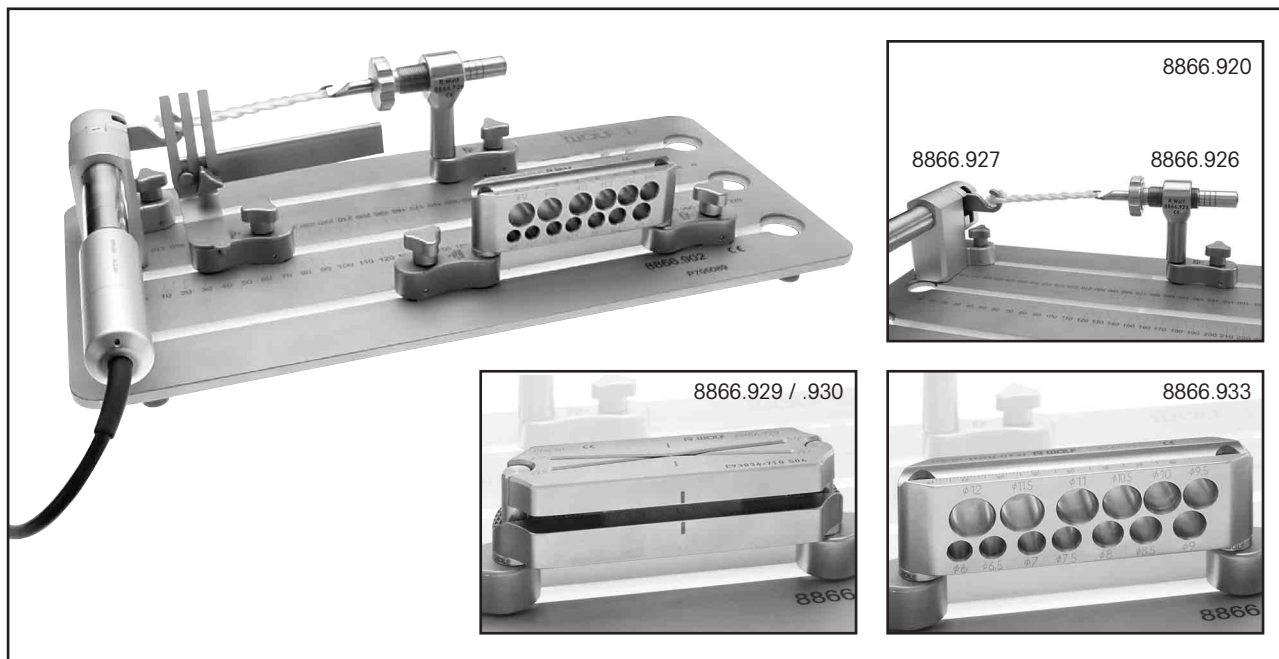

Conditioning-Unit

consisting of:

Conditioning hook (8866.926) and conditioning block (8866.927)
(the unit could only be used with
Control-Unit 20950.0201).....8866.920

Conditioning hook8866.926
Conditioning block8866.927

Bone block holder

8.4 mm8866.923
9.4 mm8866.924
10.4 mm8866.925

Bone cutting holder

cutting angle 5.5° and 7.5° for workbench 8866.9028866.929

Bone cutting holder

cutting angle 9.5° and 11.5°
for workbench 8866.902.....8866.930

Transplant template for workbench 8866.902.....8866.933

Konditioniereinheit

bestehend aus:

Konditionierhaken (8866.926) und Konditionierantriebsblock
(8866.927) (Die Einheit kann nur mit dem
Steuergerät 20950.0201 betrieben werden).....8866.920

Konditionierhaken8866.926
Konditionierantriebsblock.....8866.927

Knochenblockaufnahme

8,4 mm8866.923
9,4 mm8866.924
10,4 mm8866.925

Knochenschneidaufnahme

Schnittwinkel 5,5° und 7,5° für Werkbank 8866.9028866.929

Knochenschneidaufnahme

mit Schnittwinkel 9,5° und 11,5°
für Werkbank 8866.9028866.930

Transplantat-Schablone für Werkbank 8866.9028866.933

CHIRMOT 10

Standard Set

CHIRMOT 10

Standard-Set



CHIRMOT 10 Standard-Set CHIRMOT 10 Standard Set	20950.0000
bestehend aus: consisting of:	Typen Types
Steuergerät Control Unit	20950.0201
Netzkabel, 3 m Main Cord, 3 m	20950.0301
Fußpedal vario Foot switch vario	20950.0401
Elektronik-Motor, Standard (inkl. 2 Anschlußkabel) Electronic motor, Standard (incl. 2 connecting cables)	80950.0003
Schlauchset, steril, zum Einmalgebrauch Tube Set, sterile, disposable	40900.0001
Clip-Set, 12-teilig Clip Set, 12 pieces	40900.0201
Handstückablage Support for hand pieces	40900.0401
Clean-Spray, 500 ml Clean Spray, 500 ml	40900.1000
Sprüh-Aufsatz für Handstücke Clean Spray Connector for hand pieces	40900.1201
Sprüh-Aufsatz für Motoren Clean Spray Connector for motors	40900.1202
Stativ für Irrigationsbehälter Tripod for irrigation	80900.0000

You will find further accessories for our Chirmot 10 programme on
pages B 411.104e - B 411.104r

Weiteres Zubehör zu unserem Chirmot 10-Programm finden Sie auf
Seite B 411.104e - B 411.104r

CHIRMOT 10

Standard Set
Technical Data

CHIRMOT 10

Standard-Set
Technische Daten

Motordrehzahl: <i>Motor speed:</i>	500 - 40.000 U / min 500 - 40.000 rpm
Motordrehmomente: <i>Motor torque level:</i>	1 - 10 Ncm
Pumpe: <i>Pump:</i>	100 ml / min
Motorleistung: <i>Motor-power:</i>	200 Watt
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	290 x 110 x 260 mm
Gewicht: <i>Weight:</i>	4.5 kg
Netzspannung (umschaltbar): <i>Voltage (change over):</i>	230 / 115 V~



Rekonstruktion mit Semitendinosus
und Gracilissehne

*Reconstruction with Semitendinosus
and Gracilis Tendon*

Basic Set for ACL Reconstruction

with Semitendinosus and Gracilis Tendon
by Paessler*

Basis-Set zur ACL-Rekonstruktion

mit Semitendinosus- und Gracilissehne
nach Paessler*

Arthroskopie
Arthroscopy

Artikel	Article	Typen / Types	Seite / Page	Stk. / pcs.	Order
Sehnenstripper	Tendon harvester	8866.951	B 411.102i	1	☐
Transplantat-Schablone	Transplant template	8866.933	B 411.102f	1	☐
Transstibiale Bohrerführung, Offset 5 mm	Transtibial drill guide, offset 5 mm	8868.251	B 411.102g	1	☐
Zielbohrdraht mit Spiralschliff, GL 310 mm	Alignment wire with spiral thread, TL 310 mm	89960.1025	B 411.102f	1	☐
Zielbohrdraht mit Spiralschliff, GL 430 mm	Alignment wire with spiral thread, TL 430 mm	89960.1125	B 411.102f	1	☐
VKB-Zielgerät	ACL alignment device				
»Modell Heidelberg« mit Zielhaken	»Heidelberg« with alignment hook	8874.013	B 411.102e	1	☐
»Modell Heidelberg« mit Ziellöffel	»Heidelberg« with alignment spoon	8874.014	B 411.102e	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 6,5 mm	Cannulated drill Ø 6.5 mm	89960.1065	B 411.102h	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 7,0 mm	Cannulated drill Ø 7.0 mm	89960.1070	B 411.102h	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 7,5 mm	Cannulated drill Ø 7.5 mm	89960.1075	B 411.102h	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 8,0 mm	Cannulated drill Ø 8.0 mm	89960.1080	B 411.102h	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 9,0 mm	Cannulated drill Ø 9.0 mm	89960.1090	B 411.102h	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 10 mm	Cannulated drill Ø 10 mm	89960.1010	B 411.102h	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 11,0 mm	Cannulated drill Ø 11.0 mm	89960.1011	B 411.102h	1	☐
Handgriff für kanülierte Bohrer	Handle for cannulated drills	8869.821	B 411.102h	1	☐
ACL-Impaktor-Set mit Tray	ACL-impactor set with tray	8866.101	B 411.102a	1	☐
ACL-Hammer	ACL mallet	8866.956	B 411.102a	1	☐
ACL-Stanzhülsen-Set mit Tray	ACL-tubular chisel set with tray	8866.302	B 411.102c	1	☐
Impingement-Tester Ø 9 mm	Impingement tester Ø 9 mm	8866.931	B 411.102j	1	☐
Impingement-Tester Ø 11 mm	Impingement tester Ø 11 mm	8869.932	B 411.102j	1	☐
Arthroskopische Arbeits-Platte	Arthroscopic working place	8866.902	B 411.102k	1	☐
Klemmen-Aufnahme	Clamp holding fixture	8866.911	B 411.102k	1	☐
Hakenklemme	Hook clamp	8866.915	B 411.102l	1	☐
Sehnen-Aufnahme Ø 6 mm	Tendon holding fixture Ø 6 mm	8866.916	B 411.102l	1	☐
Sehnen-Aufnahme Ø 7 mm	Tendon holding fixture Ø 7 mm	8866.917	B 411.102l	1	☐
Sehnen-Aufnahme Ø 8 mm	Tendon holding fixture Ø 8 mm	8866.918	B 411.102l	1	☐
Lineal	Ruler	8866.919	B 411.102k	1	☐

*Dr. med. Hans H. Paessler, ATOS-Klinik Heidelberg, Bismarckstr. 9-15, D-69115 Heidelberg, e-mail: paessler@atos.de


☐ Angebot / Offer	☐ Bestellung / Order	☐ Info
Name / Klinik / Praxis Name / Hospital / Practice		
Anschrift Address		
PLZ / Ort Post code / Town	Tel.	Fax
Unterschrift Signature	Datum Date	Bemerkung Comment
Richard Wolf GmbH · Postfach 11 64 · D-75434 Knittlingen · Tel. (0 70 43) 35-0 · Fax (0 70 43) 3 53 00		

ACL-Impactor Set

by Paessler

ACL-Impaktor-Set

nach Paessler

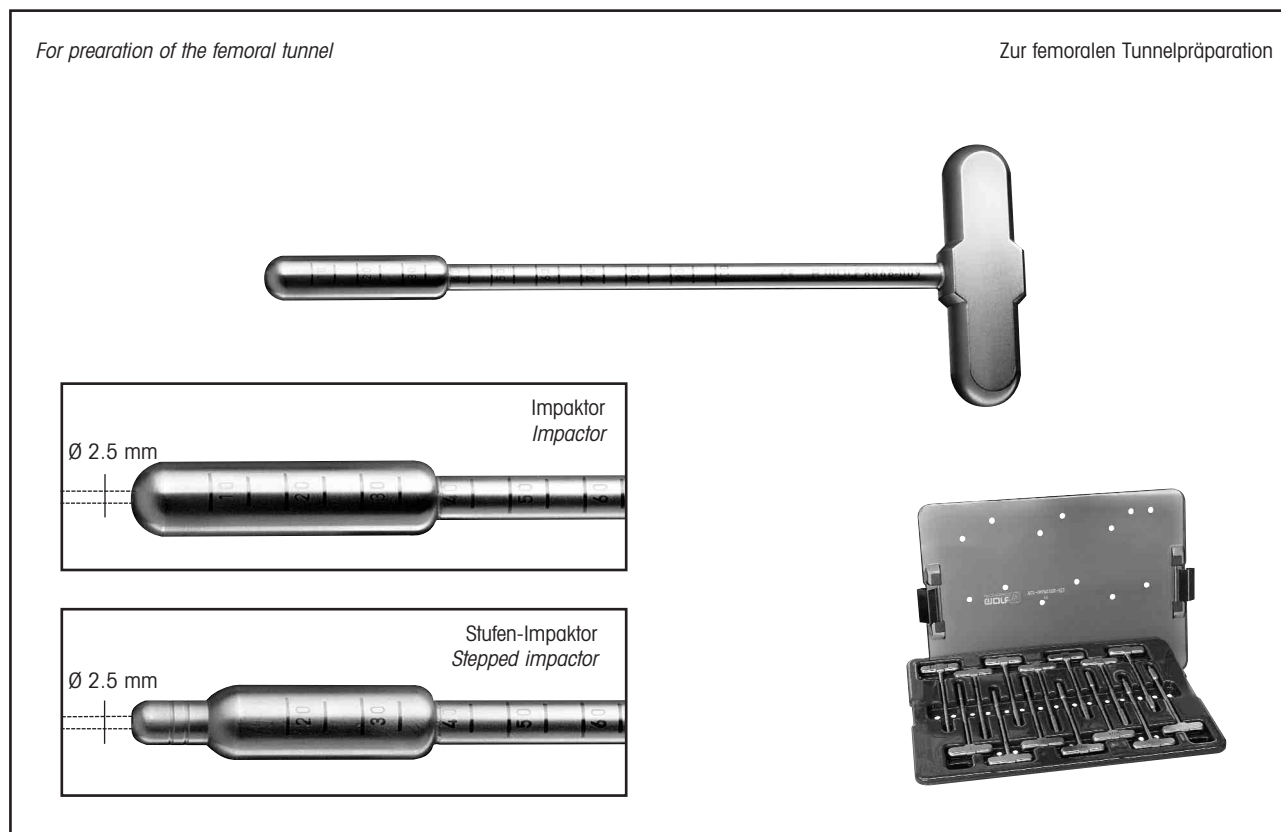

ACL-Impactor Set8866.101
consisting of:

10 Impactors:

cannulated for alignment wire / Kirschner wie Ø 2.5 mm


- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 6 mm | ☐ 7 mm | ☐ 7.5 mm |
| ☐ 8 mm | ☐ 8.5 mm | ☐ 9 mm |
| ☐ 9.5 mm | ☐ 10 mm | ☐ 10.5 mm |
| ☐ 11 mm | | |

3 Stepped impactors:

cannulated for alignment wire / Kirschner wie Ø 2.5 mm

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 10 / 6 mm | ☐ 11 / 6 mm | ☐ 12 / 6 mm |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

Tray for sterilisation and storage,
for holding the complete ACL-impactor set.

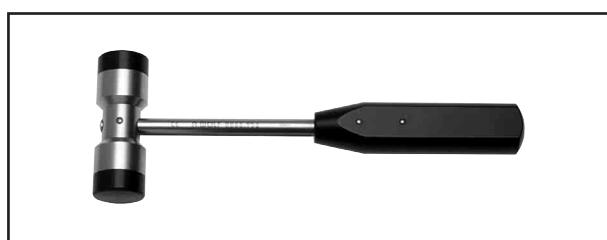

ACL-Impaktor-Set8866.101
bestehend aus:

10 Impaktoren:

kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 6 mm | ☐ 7 mm | ☐ 7,5 mm |
| ☐ 8 mm | ☐ 8,5 mm | ☐ 9 mm |
| ☐ 9,5 mm | ☐ 10 mm | ☐ 10,5 mm |
| ☐ 11 mm | | |

3 Stufen-Impaktoren:

kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 10 / 6 mm | ☐ 11 / 6 mm | ☐ 12 / 6 mm |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

Tray für Sterilisation und Lagerung,
zur Aufnahme des kompletten ACL-Impaktoren-Sets.

hierzu:

ACL-Hammer8866.956


also:

ACL mallet8866.956

ACL-Tubular Chisel Set by Paessler

ACL-Stanzhülsen-Set nach Paessler

Arthroskopie
Arthroscopy

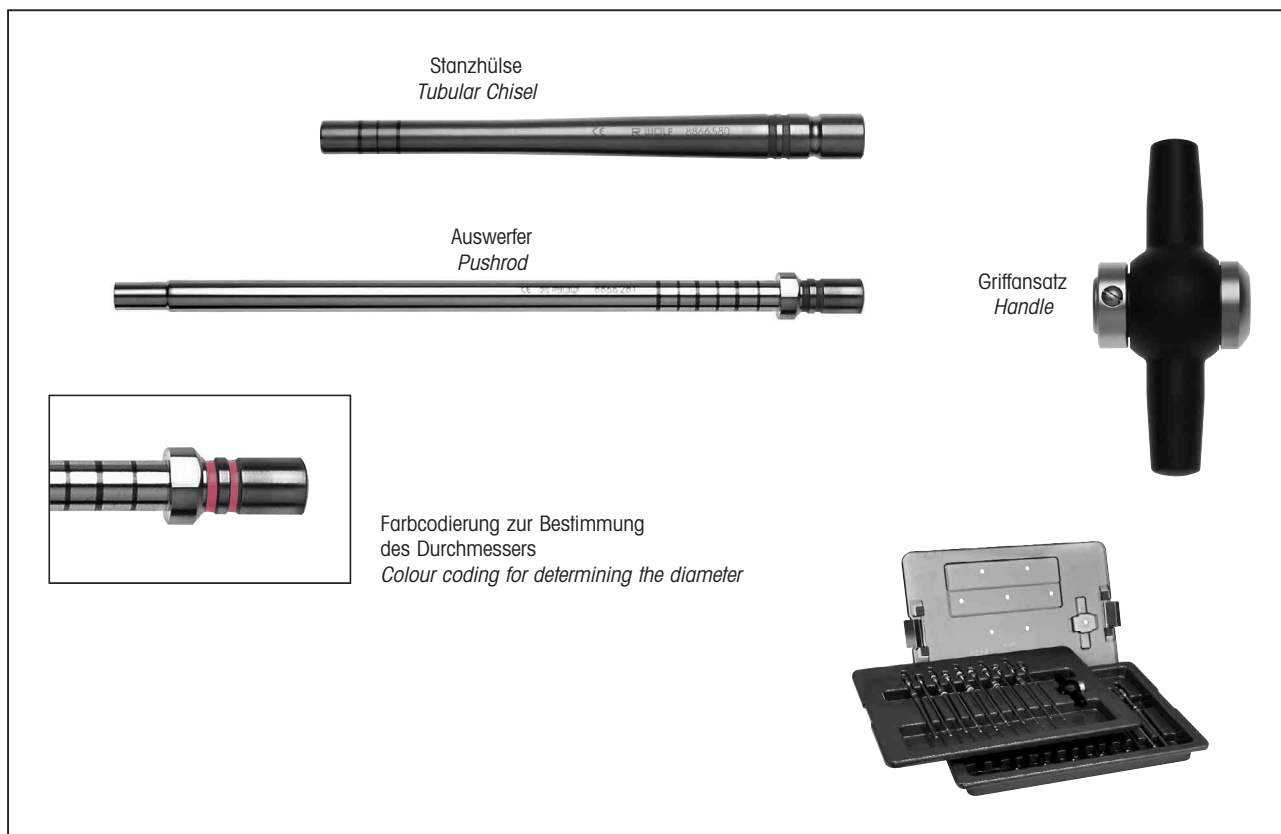

ACL-Tubular Chisel Set8866.302
consisting of:


6 Tubular chisels for tunnel-preparation:

- ☐ 7.0 x 6.0 mm ☐ 7.5 x 6.5 mm ☐ 8.0 x 7.0 mm
☐ 8.5 x 7.5 mm ☐ 9.0 x 8.0 mm ☐ 9.5 x 8.5 mm

1 Handle (fits to all tubular chisels for tunnel-preparation)

6 Pushrods (one for each tubular chisel for tunnel-preparation)

Tray for sterilisation and storage,
for holding the complete ACL-tubular chisel set

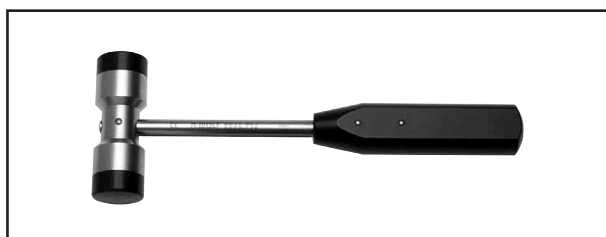

Sealing membrane for handle (10 pieces)89.103

ACL-Stanzhülsen-Set8866.302
bestehend aus:

6 Stanzhülsen zur Tunnelpräparation:

- ☐ 7,0 x 6,0 mm ☐ 7,5 x 6,5 mm ☐ 8,0 x 7,0 mm
☐ 8,5 x 7,5 mm ☐ 9,0 x 8,0 mm ☐ 9,5 x 8,5 mm

1 Griffansatz (passend für alle Stanzhülsen zur Tunnelpräparation)

6 Auswerfer (einen für jede Stanzhülse zur Tunnelpräparation)

Tray für Sterilisation und Lagerung,
zur Aufnahme des kompletten ACL-Stanzhülsen-Sets

hierzu:

ACL-Hammer8866.956

also:

ACL mallet8866.956

Membran für Griffansatz (VE = 10 St.)89.103

Instrument Set for ACL Reconstruction

ACL alignment device »Heidelberg«

Instrumentarium zur ACL-Rekonstruktion

VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg«

			
VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg« bestehend aus: ACL alignment device »Heidelberg« consisting of:		Komplett-Set / Complete Set Typen / Types	
	Type Type	8874.013	8874.014
Grundkörper zur Aufnahme von Zielhaken und -löffel sowie Bohrerführung Base section for alignment hook and spoon and for drill guide		8874.113	
Zielhaken Alignment hook		8874.121	
Ziellöffel zur direkten Platzierung Alignment spoon for direct placement		8874.123	
Bohrerführung für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm Drill guide for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm		8874.131	

Instrument Set for ACL Reconstruction

Instrumentarium zur ACL-Rekonstruktion

89960.1025 / .1125




89120.2012 / .2020



	Ø	GL TL	Typen Types
 Zielbohrdraht mit Spiralschliff und Spezialbeschichtung zur Erhöhung der Lebensdauer Alignment wire with spiral thread and special coating to increase life	2.5 mm	310 mm	89960.1025*
		430 mm	89960.1125*
 ACL-Führungsdraht , biegsam (2 Stück) ACL-guide wire , flexible (pack of 2)	1.2 mm	350 mm	89120.2012
	2.0 mm	350 mm	89120.2020

*we recommend that two of these instruments are available.

*es werden 2 Stück empfohlen.

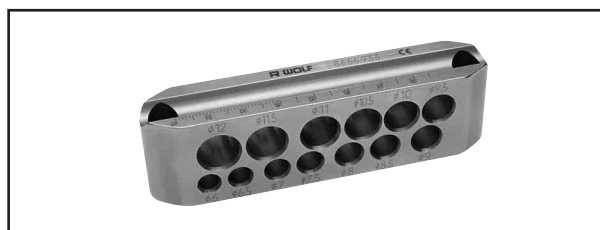

Zum Anpassen des Knochenblocks:

Transplantat-Schablone,

Ø 6 - 12 mm8866.933

For sizing the bone plug:

Transplant template,

Ø 6 - 12 mm8866.933

Instrument Set for ACL Reconstruction

Instrumentarium zur ACL-Rekonstruktion

For introducing the bone plug

Zum Einbringen des Knochenblocks



	"Offset" X	Typen Types
 Transtibiale Bohrerführung, kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm Transtibial drill guide, cannulated for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm	4 mm	8868.241
	5 mm	8868.251
	6 mm	8868.261
	7 mm	8868.271

Instrument Set for ACL Reconstruction

Instrumentarium zur ACL-Rekonstruktion

For femoral drilling

Für femorale Bohrung



Mit Spezialbeschichtung zur Erhöhung der Lebensdauer
With special coating to increase life

Außen-Ø
Outer-Ø

Typen
Types

Handgriff
Handle

6.0 mm

89960.1060

6.5 mm

89960.1065

7.0 mm

89960.1070

7.5 mm

89960.1075

8.0 mm

89960.1080

8.5 mm

89960.1085

9.0 mm

89960.1090

9.5 mm

89960.1095

10.0 mm

89960.1010

10.5 mm

89960.1010

11.0 mm

89960.1011

11.5 mm

89960.1011

12 mm

89960.1012

12.5 mm

89960.1012

13.0 mm

89960.1013

8869.821

Bohrer, kanüliert
für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm
Drill, cannulated
for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm





Instrument Set for ACL Reconstruction

using Semitendinosus-/ Gracilistendon
by Paessler

Instrumentarium zur ACL-Rekonstruktion

unter Verwendung von Semitendinosus-/ Graci-
lissehne nach Paessler

Arthroskopie
Arthroscopy

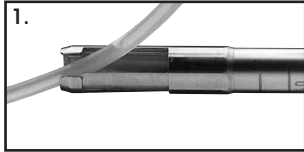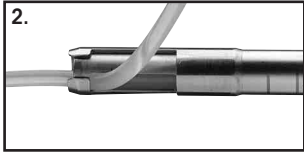		
		
		Type Type
Sehnenstripper Tendon harvester	1. Einziehen / Pull in 2. Sichern / Secure 3. Durchtrennen / Divide	8866.951

*Instrument Set for
ACL Reconstruction*


Instrumentarium zur
ACL-Rekonstruktion

		
	Ø	Typen Types
 Impingement-Tester Impingement tester	9 mm	8866.931
	11 mm	8866.932

Arthroscopic Working Station

Arthroskopische Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

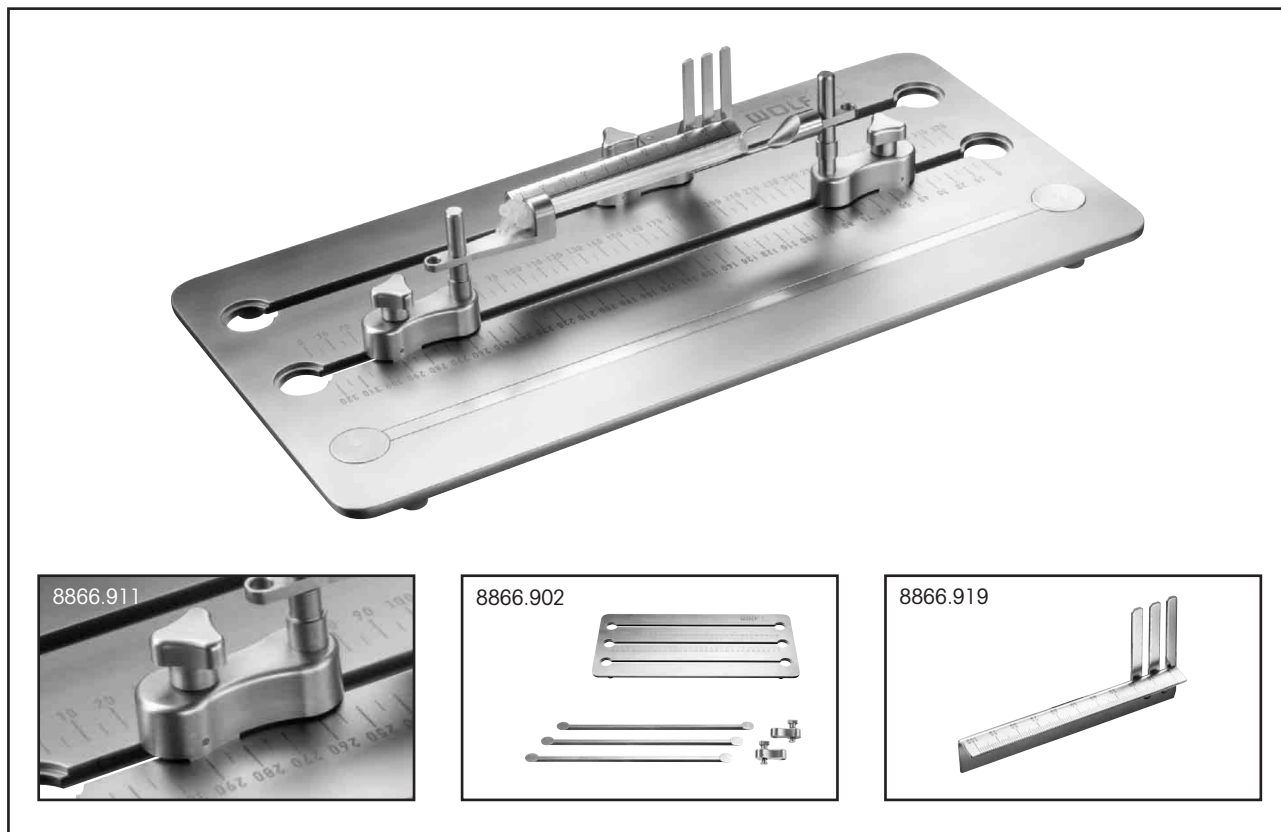

Arthroscopic working station

incl. covers and

2 clamp holding fixtures (8866.911)8866.902

Arthroskopische Arbeitsplatte

mit Abdeckungen und

2 Klemmen-Aufnahmen (8866.911)8866.902

Ruler

for tendon linear measuring,

graduation of scale 0 - 100 mm8866.919

Lineal

zur Längenmessung der Sehne,

Skalierung 0 - 100 mm8866.919

also:


Clamp holding fixture8866.911

hierzu:

Klemmen-Aufnahme8866.911

Transplant Holding Fixtures
for Arthroscopic Working Station


Transplantat-Aufnahmen
zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

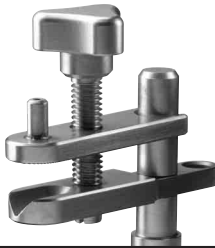		Ø	Typen Types
	Hakenklemme Hook clamp		8866.915
	Sehnen-Aufnahme Tendon holding fixture	6 mm	8866.916
		7 mm	8866.917
		8 mm	8866.918
	Parallel-Schraubklemme Parallel vise		8866.913
	V-Klemme V-clamp		8866.914

Holding Fixtures for Preparation for Arthroscopic Working Station

Aufnahmen zur Präparation zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

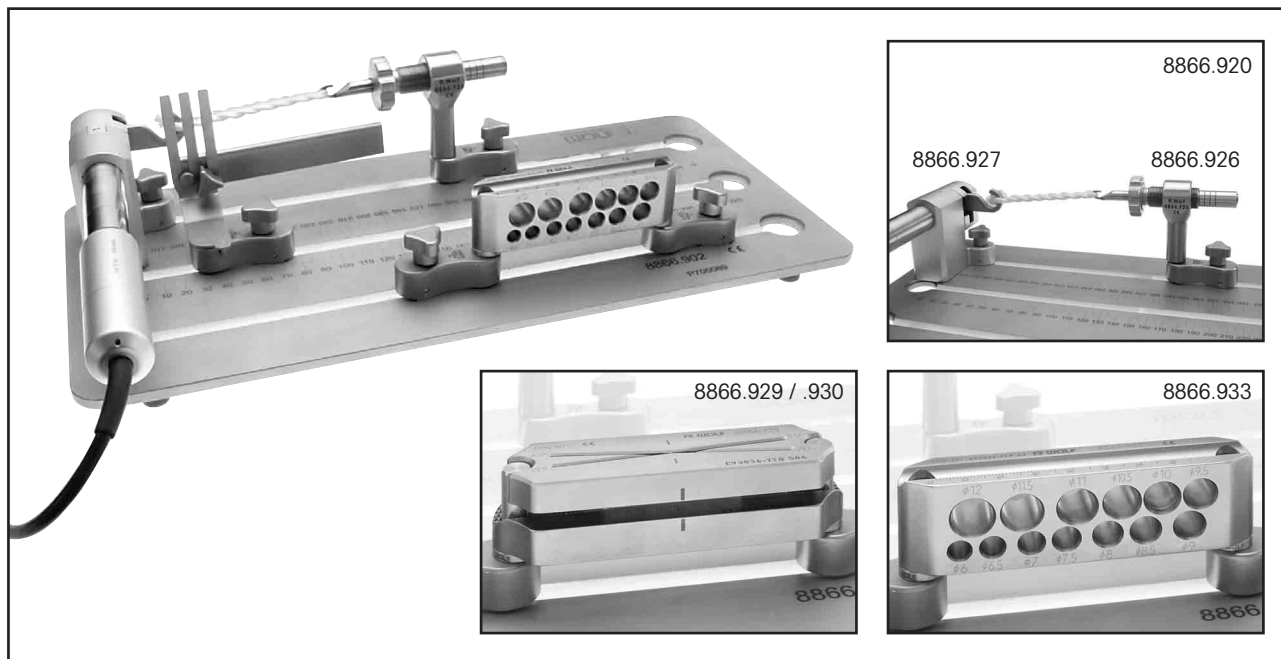

Conditioning-Unit

consisting of:

Conditioning hook (8866.926) and conditioning block (8866.927)
(the unit could only be used with
Control-Unit 20950.0201)8866.920

Conditioning hook8866.926
Conditioning block8866.927

Hook clamp8866.915
Parallel vise8866.913
V-clamp8866.914

Tending holding fixture

6 mm8866.916
7 mm8866.917
8 mm8866.918

Bone cutting holder

cutting angle 5.5° and 7.5° for workbench 8866.9028866.929

Bone cutting holder

cutting angle 9.5° and 11.5°
for workbench 8866.9028866.930

Transplant template for workbench 8866.9028866.933

Konditioniereinheit

bestehend aus:

Konditionierhaken (8866.926) und Konditionierantriebsblock
(8866.927) (Die Einheit kann nur mit dem
Steuergerät 20950.0201 betrieben werden)8866.920

Konditionierhaken8866.926
Konditionierantriebsblock8866.927

Hakenklemme8866.915
Parallel-Schraubklemme8866.913
V-Klemme8866.914

Sehnenaufnahme

6 mm8866.916
7 mm8866.917
8 mm8866.918

Knochenschneidaufnahme

Schnittwinkel 5,5° und 7,5° für Werkbank 8866.9028866.929

Knochenschneidaufnahme

mit Schnittwinkel 9,5° und 11,5°
für Werkbank 8866.9028866.930

Transplantat-Schablone für Werkbank 8866.9028866.933

CHIRMOT 10

Standard Set

CHIRMOT 10

Standard-Set



CHIRMOT 10 Standard-Set CHIRMOT 10 Standard Set	20950.0000
bestehend aus: consisting of:	Typen Types
Steuergerät Control Unit	20950.0201
Netzkabel, 3 m Main Cord, 3 m	20950.0301
Fußpedal vario Foot switch vario	20950.0401
Elektronik-Motor, Standard (inkl. 2 Anschlußkabel) Electronic motor, Standard (incl. 2 connecting cables)	80950.0003
Schlauchset, steril, zum Einmalgebrauch Tube Set, sterile, disposable	40900.0001
Clip-Set, 12-teilig Clip Set, 12 pieces	40900.0201
Handstückablage Support for hand pieces	40900.0401
Clean-Spray, 500 ml Clean Spray, 500 ml	40900.1000
Sprüh-Aufsatz für Handstücke Clean Spray Connector for hand pieces	40900.1201
Sprüh-Aufsatz für Motoren Clean Spray Connector for motors	40900.1202
Stativ für Irrigationsbehälter Tripod for irrigation	80900.0000

You will find further accessories for our Chirmot 10 programme on
pages B 411.104e - B 411.104r

Weiteres Zubehör zu unserem Chirmot 10-Programm finden Sie auf
Seite B 411.104e - B 411.104r


CHIRMOT 10

Standard Set
Technical Data

CHIRMOT 10

Standard-Set
Technische Daten

Motordrehzahl: <i>Motor speed:</i>	500 - 40.000 U / min 500 - 40.000 rpm
Motordrehmomente: <i>Motor torque level:</i>	1 - 10 Ncm
Pumpe: <i>Pump:</i>	100 ml / min
Motorleistung: <i>Motor-power:</i>	200 Watt
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	290 x 110 x 260 mm
Gewicht: <i>Weight:</i>	4.5 kg
Netzspannung (umschaltbar): <i>Voltage (change over):</i>	230 / 115 V~

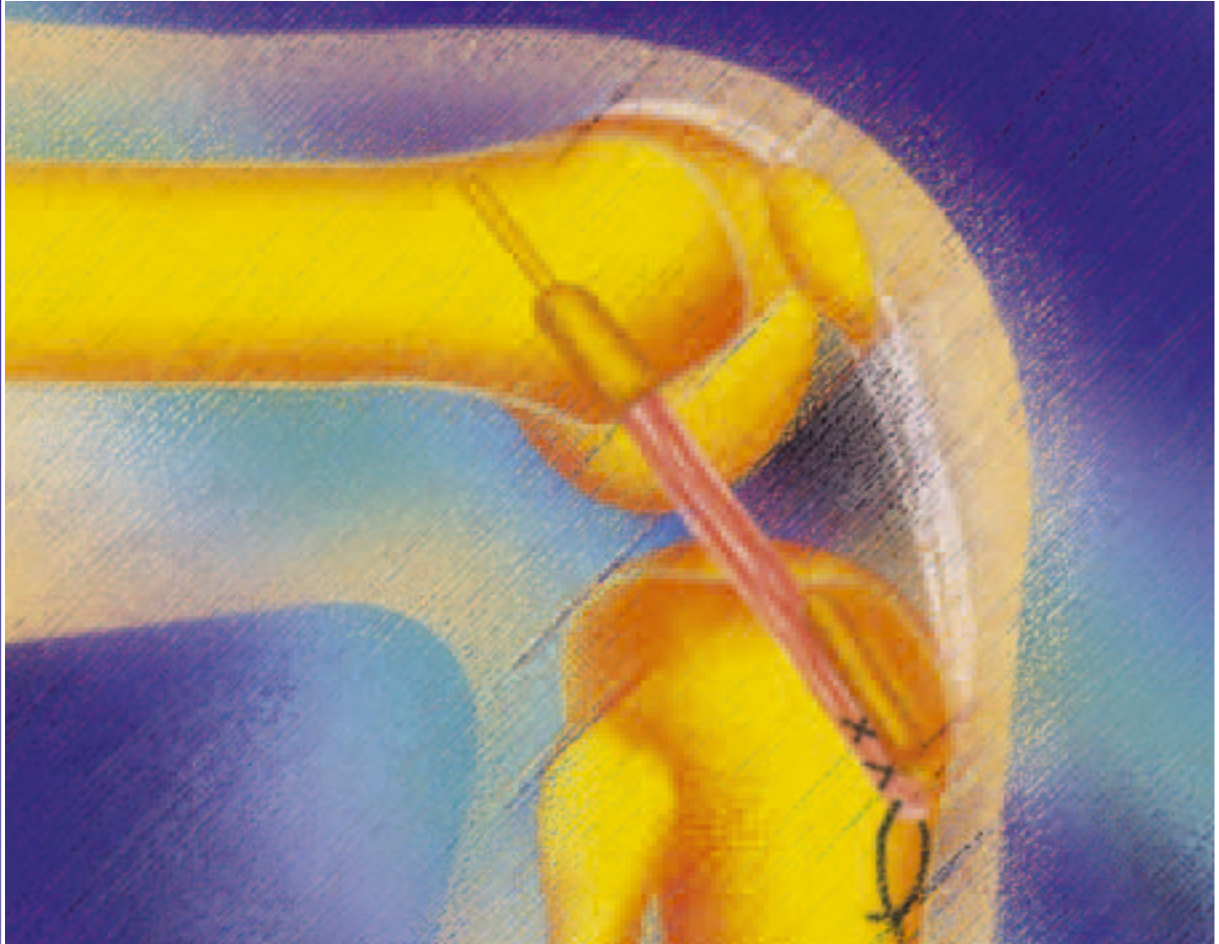

Rekonstruktion mit
Quadricepssehne

*Reconstruction with
Quadriceps Tendon*

Basic Set for ACL Reconstruction

with Quadriceps Tendon
by Huber*

Basis-Set zur ACL-Rekonstruktion

mit Quadricepssehne
nach Huber*

Arthroskopie
Arthroscopy

Artikel	Article	Typen Types	Seite Page	Stk. pcs.	Order
Druckluft-Bohrmaschine	Compressed air drill	8869.911	B 411.103e	1	☐
Hohlfräser Ø 9,4 mm	Hollow burr Ø 9.4 mm	8869.843	B 411.103d	2	☐
Knochenelevator Innen-Ø 8,4 mm	Bone-Elevator Inner Ø 8.4 mm	8868.921	B 411.103d	1	☐
Knochenelevator Innen-Ø 9,4 mm	Bone-Elevator Inner Ø 9.4 mm	8868.922	B 411.103d	1	☐
Knochenelevator Innen-Ø 10,5 mm	Bone-Elevator Inner Ø 10.5 mm	8868.923	B 411.103d	1	☐
Transplantat-Schablone	Transplant template	8866.933	B 411.103e	1	☐
VKB-Zielgerät	ACL alignment device				
»Modell Heidelberg« mit Zielhaken	»Heidelberg« with alignment hook	8874.011	B 411.103a	1	☐
»Modell Heidelberg« mit Ziellöffel	»Heidelberg« with alignment spoon	8874.012	B 411.103a	1	☐
Zielbohrdraht mit Spiralschliff, GL 310 mm	Alignment wire with spiral thread, TL 310 mm	89960.1025	B 411.103b	1	☐
Zielbohrdraht mit Spiralschliff, GL 430 mm	Alignment wire with spiral thread, TL 430 mm	89960.1125	B 411.103b	1	☐
Fadenzieher	Thread puller	8969.921	B 411.103e	1	☐
Hohlbohrer Ø 9,5 mm	Hollow drill Ø 9.5 mm	8869.851	B 411.103c	1	☐
hierzu: Auswerfer	also: Ejector	8869.852	B 411.103c	1	☐
Transstibiale Bohrerführung "offset" 6 mm	Transtibial drill guide "offset" 6 mm	8868.261	B 411.103b	1	☐
Kanülierter Bohrer Ø 9 mm	Cannulated drill Ø 9 mm	89960.1090	B 411.103f	1	☐
Kompaktor, Ø 9 mm	Compactor Ø 9 mm	8868.001	B 411.103g	1	☐
Kompaktor, Ø 7 mm	Compactor Ø 7 mm	8868.002	B 411.103g	1	☐
hierzu: Ausschlaghülse	also: Retracting sleeve	8868.992	B 411.103g	1	☐
Tunnelstopfer	Tibial canal plug	8868.941	B 411.103g	1	☐
Arthroskopische Arbeits-Platte	Arthroscopic working place	8866.902	B 411.103k	1	☐
Klemmen-Aufnahme	Clamp holding fixture	8866.911	B 411.103k	1	☐
Pinzetten-Klemme	Tweezers clamp	8866.912	B 411.103l	1	☐
Parallel-Schraubklemme	Parallel vise	8866.913	B 411.103l	1	☐
V-Klemme	V-clamp	8866.914	B 411.103l	1	☐
Lineal	Ruler	8866.919	B 411.103k	1	☐

* Dr. J. Huber
Centre for Orthopaedic Surgery, St. Elisabeth Hospital
Max-Reger-Straße 5-7 · D-69121 Heidelberg

* Dr. J. Huber
Orthopädisch-Chirurgische Gemeinschaftspraxis · Ambulantes Operieren an der
St. Elisabeth Klinik · Max-Reger-Straße 5-7 · D-69121 Heidelberg

☐ Angebot / Offer	☐ Bestellung / Order	☐ Info
Name / Klinik / Praxis Name / Hospital / Practice		
Anschrift Address		
PLZ / Ort Post code / Town		Tel. Fax
Unterschrift Signature	Datum Date	Bemerkung Comment
Richard Wolf GmbH · Postfach 11 64 · 75434 Knittlingen · Tel. (0 70 43) 35-0 · Fax (0 70 43) 3 53 00		

Instrument Set

for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber

Instrumentarium

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Arthroskopie
Arthroscopy

				
VKB-Zielgerät »Modell Heidelberg« bestehend aus: ACL alignment device »Heidelberg« consisting of:		Typen / Types	Komplett-Set / Complete Set Typen / Types	
			8874.011	8874.012
Grundkörper zur Aufnahme von Zielhaken und -löffel sowie Bohrerführungen Base section for alignment hook and spoon and for drill guides		8874.111	●	●
Zielhaken Alignment hook		8874.121	●	
Ziellöffel zur direkten Platzierung Alignment spoon for direct placement		8874.123		●
Bohrerführung für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm Drill guide for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm		8874.151	●	●
Bohrerführung für Hohlbohrer Drill guide for hollow drill		Ø 9.5 mm	8874.152	●
		Ø 10.5 mm	8874.153	Zubehör / accessories
		Ø 11.6 mm	8874.154	

Instrument Set

for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber

Instrumentarium

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Arthroskopie
Arthroscopy

For introducing the bone plug

Zum Einbringen des Knochenblocks



	"Offset" X	Typen Types
 Transtibiale Bohrerführung, kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm Transtibial drill guide, cannulated for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm	4 mm	8868.241
	5 mm	8868.251
	6 mm	8868.261
	7 mm	8868.271

11

	Ø	GL TL	Typen Types
 Zielbohrdraht mit Spiralschliff und Spezialbeschichtung zur Erhöhung der Lebensdauer Alignment wire with spiral thread and special coating to increase life	2.5 mm	310 mm	89960.1025*
		430 mm	89960.1125*

* we recommend that two of these instruments are available.

* es werden 2 Stück empfohlen.

Instrument Set




for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber

Instrumentarium

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Arthroskopie
Arthroscopy

		
	für Hohlbohrer for hollow drill	Typen Types
 Bohrerführung für Hohlbohrer Drill guide for hollow drill	8869.851	8874.152
	8869.853	8874.153
	8869.855	8874.154

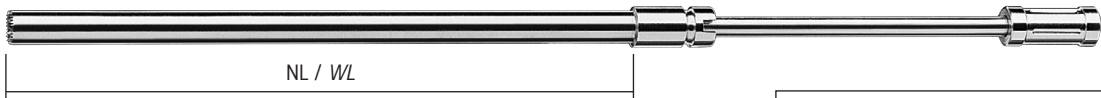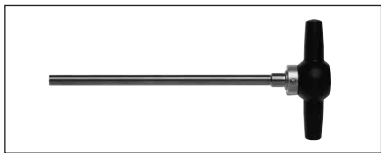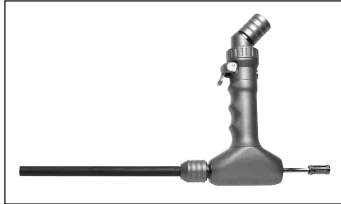For removal of the tibial bone plug - used to close the levelling defects on the patella and tibia			Zur Entnahme des tibialen Knochenblocks - zum späteren Auffüllen der Hebedefekte an Patella und Tibia		
					
					
Für oszillierende Anwendung For oscillating application	Außen-Ø Outer Ø	NL WL	Hohlbohrer Hollow drill	Auswerfer Ejector	Griffansatz Handle Attachment
Hohlbohrer Hollow drill	9.5 mm	185 mm	8869.851*	8869.852**	8869.601
	10.5 mm		8869.853*	8869.854**	
	11.6 mm		8869.855*	8869.856**	

* we recommend that two of these instruments are available in the required size.

** Ejector cannulated for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm

* es werden je 2 Stück von der gewünschten Größe im Set empfohlen.

** Auswerfer kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm.

Instrument Set

for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber

Instrumentarium

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Arthroskopie
Arthroscopy

For standardised transplant harvesting

Zur standardisierten Transplantat-Entnahme



Für oszillierende Anwendung For oscillating application	Innen-Ø Inner-Ø	NL WL	Typen Types	Griffansatz Handle Attachment
 Hohlfräser Hollow burr	8.4 mm	75 mm	8869.841*	8869.601
	9.4 mm	90 mm	8869.843*	
	10.5 mm	90 mm	8869.844*	

* we recommend that two of these instruments are available in the required size.

* es werden je 2 Stück von der gewünschten Größe im Set empfohlen.



	Innen-Ø Inner Ø	Typen Types
 Knochenelevator Bone-Elevator	8.4 mm	8868.921
	9.4 mm	8868.922
	10.5 mm	8868.923

Instrument Set

for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber



Instrumentarium

Arthroskopie
Arthroscopy

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Zum Anpassen des Knochenblocks:

Transplantat-Schablone,
Ø 6 - 12 mm8866.933

For sizing the bone plug:

Transplant template,
Ø 6 - 12 mm8866.933

For endoscopic repair of the anterior cruciate ligament

Zur endoskopischen transtibialen Rekonstruktion des vorderen
Kreuzbandes



Compressed air drill

with quick-mount and sealing cap8869.911

Druckluft-Bohrmaschine

mit Schnellkupplung und Verschlusskappe.....8869.911

			
	Ø	GL TL	Type Type
Fadenzieher Thread puller	5 mm	350 mm	8869.921

Instrument Set

for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber

Instrumentarium

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Arthroskopie
Arthroscopy

For femoral drilling

Für femorale Bohrung



Mit Spezialbeschichtung zur Erhöhung der Lebensdauer
With special coating to increase life

Außen-Ø
Outer-Ø

Typen
Types

Handgriff
Handle

6.0 mm

89960.1060

6.5 mm

89960.1065

7.0 mm

89960.1070

7.5 mm

89960.1075

8.0mm

89960.1080

8.5 mm

89960.1085

9.0 mm

89960.1090

9.5 mm

89960.1095

10.0 mm

89960.1010

10.5 mm

89960.1910

11.0 mm

89960.1011

11.5 mm

89960.1911

12 mm

89960.1012

12.5 mm

89960.1912

13.0 mm

89960.1013

8869.821



Bohrer, kanüliert

für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm

Drill, cannulated

for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm

Instrument Set

for arthroscopically-assisted anterior cruciate
ligament reconstruction with the quadriceps tendon
by J. Huber und A. Buchgraber

Instrumentarium

zum arthroskopisch-assistierten
vorderen Kreuzbandersatz mit Quadricepssehne
nach J. Huber und A. Buchgraber

Arthroskopie
Arthroscopy

For introducing the bone plug

Zum Einbringen des Knochenblocks



Stößel, gebogen
Pusher, curved



Ø

Typen
Types

6.0 mm

8869.991



Kompaktor nach Huber,
kanüliert für Zielbohrdraht / Kirschnerdraht Ø 2,5 mm
Compactor by Huber,
cannulated for alignment wire / Kirschner wire Ø 2.5 mm



Ø

Typen
Types

9 mm

8868.001

7 mm

8868.002



hierzu:

Ausschlaghüse8868.992

also:

Retracting sleeve8868.992

Tunnelstopfer8868.941


Tibial canal plug8868.941



Arthroscopic Working Station

Arthroskopische Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

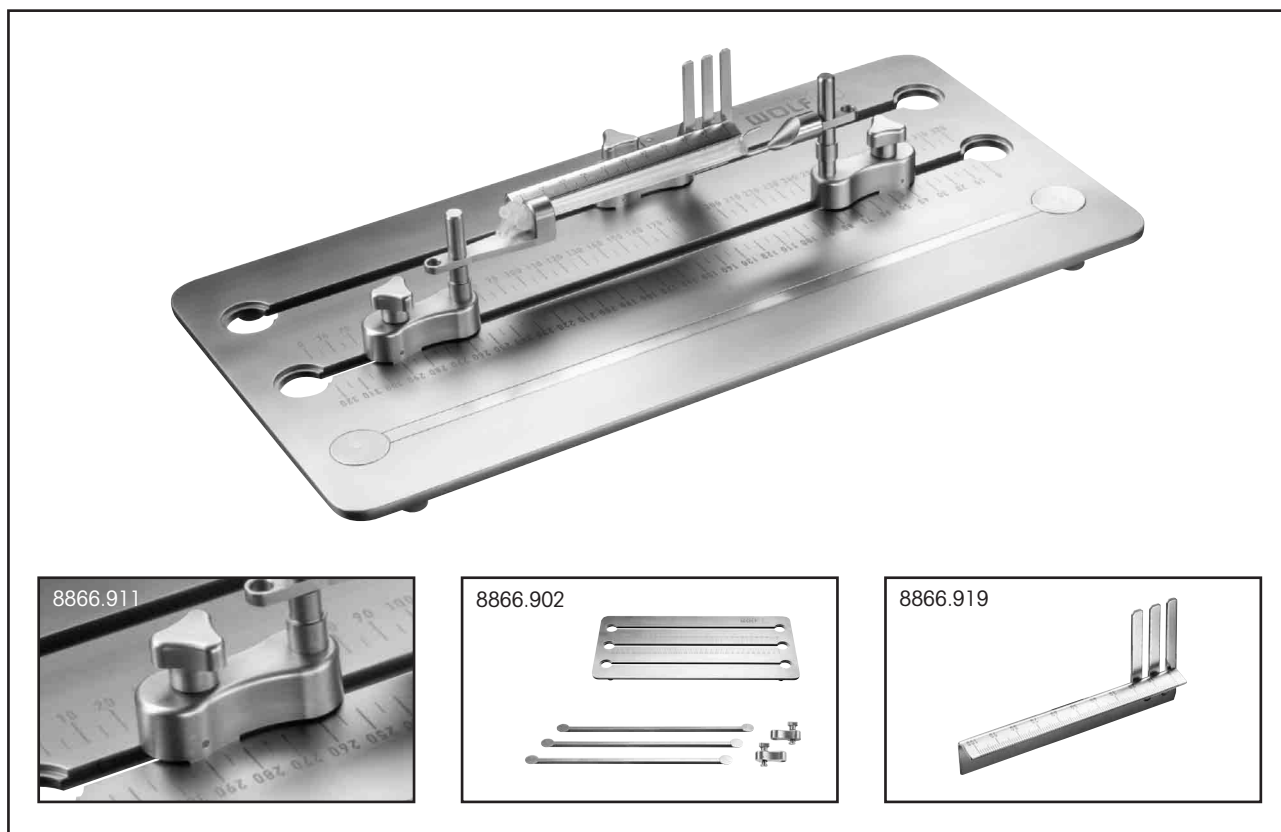

Arthroscopic working station

incl. covers and

2 clamp holding fixtures (8866.911)8866.902

Arthroskopische Arbeitsplatte

mit Abdeckungen und

2 Klemmen-Aufnahmen (8866.911)8866.902

Ruler

for tendon linear measuring,

graduation of scale 0 - 100 mm8866.919

Lineal

zur Längenmessung der Sehne,

Skalierung 0 - 100 mm8866.919

also:




Clamp holding fixture8866.911

hierzu:

Klemmen-Aufnahme8866.911

*Transplant Holding Fixtures
for Arthroscopic Working Station*


Transplantat-Aufnahmen
zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

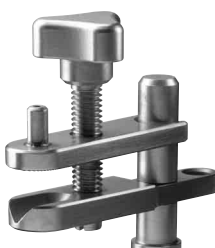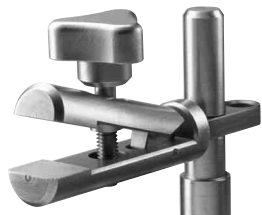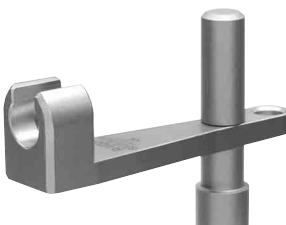		Typen Types
	Pinzetten-Klemme Tweezers clamp	8866.912
	Parallel-Schraubklemme Parallel vise	8866.913
	V-Klemme V-clamp	8866.914
	Sehnen-Aufnahme Tendon holding fixture	6 mm 8866.916
		7 mm 8866.917
		8 mm 8866.918
	Knochenblockaufnahme Bone-block-holder	8.4 mm 8866.923
		9.4 mm 8866.924
		10.4 mm 8866.925

Holding Fixtures for Preparation for Arthroscopic Working Station

Aufnahmen zur Präparation zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

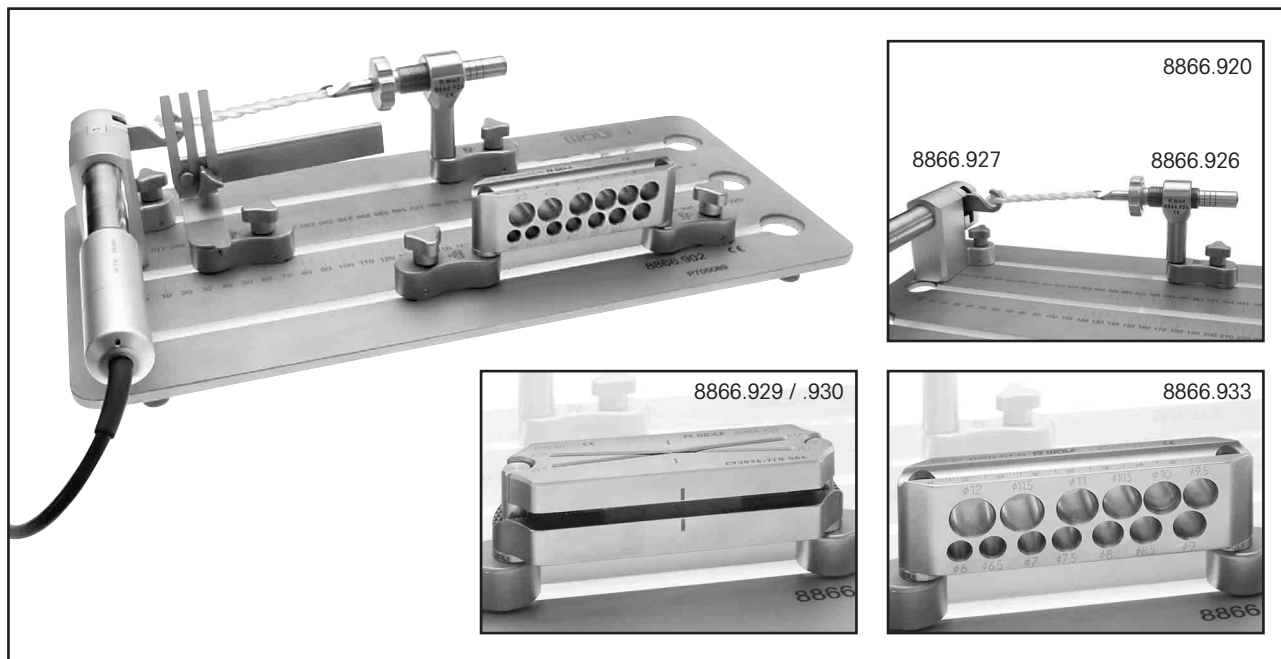

Conditioning-Unit

consisting of:

Conditioning hook (8866.926) and Conditioning block (8866.927)
(the unit could only be used with
Control-Unit 20950.0201).....8866.920

Conditioning hook8866.926
Conditioning block8866.927

Bone block holder

8.4 mm8866.923
9.4 mm8866.924
10.4 mm8866.925

Tending holding fixture

6 mm8866.916
7 mm8866.917
8 mm8866.918

Bone cutting holder

cutting angle 5.5° and 7.5° for workbench 8866.9028866.929

Bone cutting holder

cutting angle 9.5° and 11.5°
for workbench 8866.902.....8866.930

Transplant template for workbench 8866.902.....8866.933

V-clamp8866.914
Parallel vise8866.913

Konditioniereinheit

bestehend aus:

Konditionierhaken (8866.926) und Konditionierantriebsblock
(8866.927) (Die Einheit kann nur mit dem
Steuergerät 20950.0201 betrieben werden).....8866.920

Konditionierhaken8866.926
Konditionierantriebsblock.....8866.927

Knochenblockaufnahme

8,4 mm8866.923
9,4 mm8866.924
10,4 mm8866.925

Sehnenaufnahme

6 mm8866.916
7 mm8866.917
8 mm8866.918

Knochenschneidaufnahme

Schnittwinkel 5,5° und 7,5° für Werkbank 8866.9028866.929

Knochenschneidaufnahme

mit Schnittwinkel 9,5° und 11,5°
für Werkbank 8866.9028866.930

Transplantat-Schablone für Werkbank 8866.902.....8866.933

V-Klemme8866.914
Parallel-Schraubklemme8866.913

CHIRMOT 10

Standard Set

CHIRMOT 10

Standard-Set



CHIRMOT 10 Standard-Set CHIRMOT 10 Standard Set	20950.0000
bestehend aus: consisting of:	Typen Types
Steuergerät Control Unit	20950.0201
Netzkabel, 3 m Main Cord, 3 m	20950.0301
Fußpedal vario Foot switch vario	20950.0401
Elektronik-Motor, Standard (inkl. 2 Anschlußkabel) Electronic Motor, Standard (incl. 2 connecting cables)	80950.0003
Schlauchset, steril, zum Einmalgebrauch Tube Set, sterile, disposable	40900.0001
Clip-Set, 12-teilig Clip Set, 12 pieces	40900.0201
Handstückablage Support for hand pieces	40900.0401
Clean-Spray, 500 ml Clean Spray, 500 ml	40900.1000
Sprüh-Aufsatz für Handstücke Clean Spray Connector for hand pieces	40900.1201
Sprüh-Aufsatz für Motoren Clean Spray Connector for motors	40900.1202
Stativ für Irrigationsbehälter Tripod for Irrigation	80900.0000

You will find further accessories for our Chirmot 10 programme on
pages B 411.104e - B 411.104r

Weiteres Zubehör zu unserem Chirmot 10-Programm finden Sie auf
Seite B 411.104e - B 411.104r


CHIRMOT 10

Standard Set
Technical Data

CHIRMOT 10

Standard-Set
Technische Daten

Motordrehzahl: <i>Motor speed:</i>	500 - 40.000 U / min 500 - 40.000 rpm
Motordrehmomente: <i>Motor torque level:</i>	1 - 10 Ncm
Pumpe: <i>Pump:</i>	100 ml / min
Motorleistung: <i>Motor-power:</i>	200 Watt
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	290 x 110 x 260 mm
Gewicht: <i>Weight:</i>	4.5 kg
Netzspannung (umschaltbar): <i>Voltage (change over):</i>	230 / 115 V~

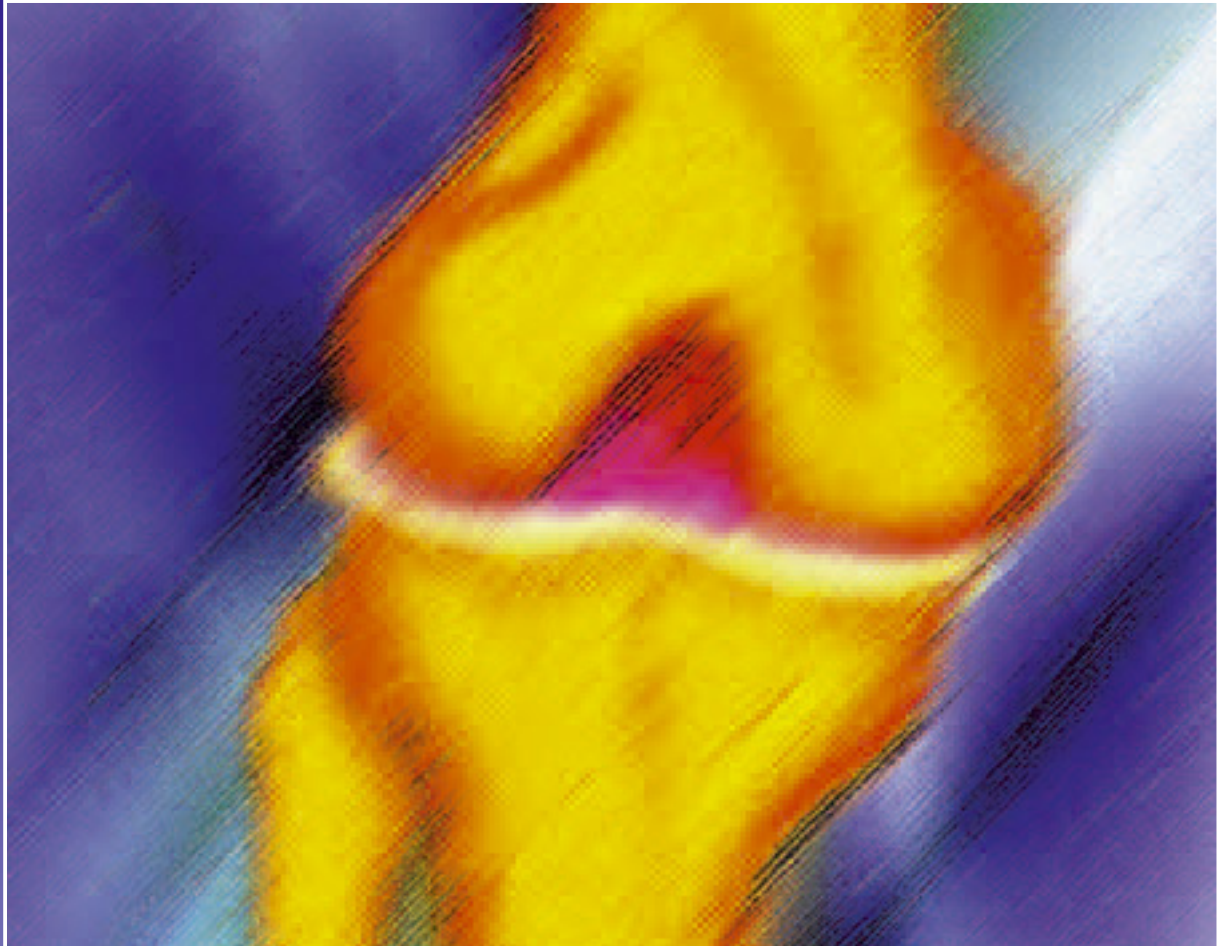

Arthroskopie

Arthroscopy

Arthroscopy

Arthroskopie

1	<i>Basis Set</i>	Basis-Set
2	<i>Arthroscopes</i>	Arthroskope
3	<i>Cannula System</i>	Kanülen-System
4	<i>Drainage Cannulas</i>	Drainage-Kanülen
5	<i>Guide and Marking Rods</i>	Einführungs- und Wechselstäbe
6	<i>Hook Probes</i>	Hakensonden
7	<i>Punches / Scissors / Forceps / Meniscus Grasping Forceps</i>	Stanzen / Scheren / Zangen / Meniskus-Faßzangen
8	<i>Knife / Rasp System / Microfrac Instruments / Electrodes / HF Knives</i>	Messer / Knorpelfellen / Microfrac-Instrumente / Elektroden / HF-Messer
9	<i>RIWO DRIVE Generator / Motorised Instruments / Power Cutters and Burrs</i>	RIWO-DRIVE-Generator / Motor-Instrumente / Rotationsmesser und -Fräser
10	<i>Arthro Pump</i>	Arthro-Pumpe
11	<i>ACL Instrument Set / CHIRMOT 10</i>	ACL-Instrumentarium / CHIRMOT 10
12		
13		
14	<i>Leg Holder</i>	Beinhalter
15	<i>Special Instruments</i>	Spezial-Instrumente

Carpal Tunnel Release

Karpal-Tunnel-Spaltung

Karpal-Tunnel
Carpal Tunnel

.....
ENDO-CARTRIS® Instrument Set
.....

.....
ENDO-CARTRIS®-Instrumentarium
.....

1

Basic Set

for diagnostic and therapeutic arthroscopy

Basis-Set

zur diagnostischen und operativen Arthroskopie

Arthroskopie
Arthroscopy


Artikel	Article	Typen / Types	Seite / Page	Stk. / pcs.	Order
Optik 4 mm, 30°	Telescope 4 mm, 30°	8880.543	B 410.207a	1	☐
Trokarhülse 5,6 mm	Trocar sleeve 5.6 mm	8885.031	B 410.207b	1	☐
Trokar mit dreiflächiger Spitze	Trocar with pyramidal tip	8885.11	B 410.207b	1	☐
Obturator, stumpf	Obturator, blunt	8885.121	B 410.207b	1	☐
Drainage-Kanüle, 2,3 mm	Drainage cannula, capacity 2.3 mm	8302.09	B 410.401a	1	☐
hierzu: Trokar mit schrägem Anschliff	also: Trocar with oblique tip	8302.101	B 410.401a	1	☐
Hakensonde 4 mm	Hook probe 4 mm	8399.95	B 410.601b	1	☐
Hakenstanze 3,4 mm, gerade	Hook punch 3.4 mm, straight	89140.0005	B 410.701a	1	☐
Hakenstanze, 15° aufwärts gebogen	Hook punch, curved 15° upwards	89140.0102	B 410.701a	1	☐
Hakenstanze, 15° aufwärts gebogen	Hook punch, curved 15° upwards	89140.0402	B 410.701b	1	☐
PE-Zange 3,4 mm, 45° rechts abgewinkelt	Biopsy forceps 3.4 mm, angled 45° right	8404.81	B 410.703a	1	☐
PE-Zange 3,4 mm, 45° links abgewinkelt	Biopsy forceps 3.4 mm, angled 45° left	8404.71	B 410.703a	1	☐
Hakenschere 3,4 mm	Hooked scissors 3.4 mm	8488.04	B 410.705a	1	☐
PE- und Retraktionszange 4,5 mm	Biopsy and retraction forceps 4.5 mm	8403.10	B 410.706a	1	☐
Meniskusfaßzange	Meniscus grasping forceps	8403.001	B 410.707	1	☐
Beinhalter	Leg holder	8562.20	B 411.401	1	☐
Power Control Generator 2303	Power Control Generator 2303	2303.001	B 410.901a	1	☐
Power Stick M4 Motorhandgriff	Power Stick M4 Motorised handle	8564.121	B 410.903	1	☐
Resector 4,5 mm	Resector 4.5 mm	8568.011	B 410.904	1	☐
Oval Resector 4,5 mm	Oval Resector 4.5 mm	8568.031	B 410.904	1	☐
Incisor 4,5 mm	Incisor 4.5 mm	8568.051	B 410.904	1	☐
Shaver cutter 4,5 mm	Shaver cutter 4.5 mm	8568.201	B 410.904	1	☐
Hooded round burr 5,5 mm	Hooded round burr 5.5 mm	8569.301	B 410.904	1	☐
Acromionizer 5,5 mm	Acromionizer 5.5 mm	8569.351	B 410.904	1	☐
Fluid Control 2203	Fluid Control 2203	2203.001	B 411.001a	1	☐
Lichtprojektor AUTO LP 5123, 180 W	Light source AUTO LP 5123, 180 W	5123.001	A 102.03a	1	☐
Flexibler Faserlichtleiter	Flexible Fibre Light Cable	8061.353	A 104.01a	1	☐
1 CCD ENDOCAM - Controller 5520	1 CCD ENDOCAM - controller 5520	5520.210	A 105.03c	1	☐
1 CCD ENDOCAM - Kamerakopf 5520	1 CCD ENDOCAM - camera head 5520	85520.902	A 105.03d	1	☐
RIWO-Objektiv mit Spannverschluss	RIWO lens with lock mechanism	85264.171	A 107.03a	1	☐
Farb-Monitor	Colour monitor	5370.373	A 108.01a	1	☐
RIWomobil	RIWomobil	32114.001	A 114.01b	1	☐

☐ Angebot / Offer	☐ Bestellung / Order	☐ Info
Name / Klinik / Praxis Name / Hospital / Practice		
Anschrift Address		
PLZ / Ort Post code / Town	Tel.	Fax
Unterschrift Signature	Datum Date	Bemerkung Comment
Richard Wolf GmbH · Postfach 11 64 · D-75434 Knittlingen · Tel. (0 70 43) 35-0 · Fax (0 70 43) 3 53 00		

*Needle Arthroscope
with Telescope 1.9 mm
for small joints*

**Needle Arthroskop
mit Optik 1,9 mm
für kleine Gelenke**

2

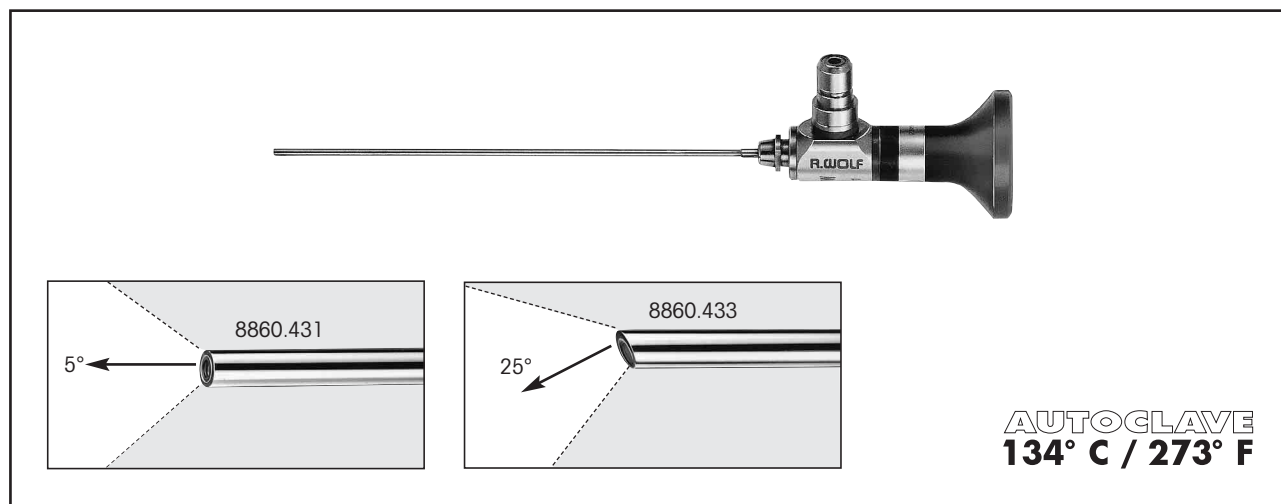


PANOVIEW PLUS telescope, Ø 1.9 mm,

5°8860.431
25°8860.433

PANOVIEW PLUS-Optik, Ø 1,9 mm,

5°8860.431
25°8860.433

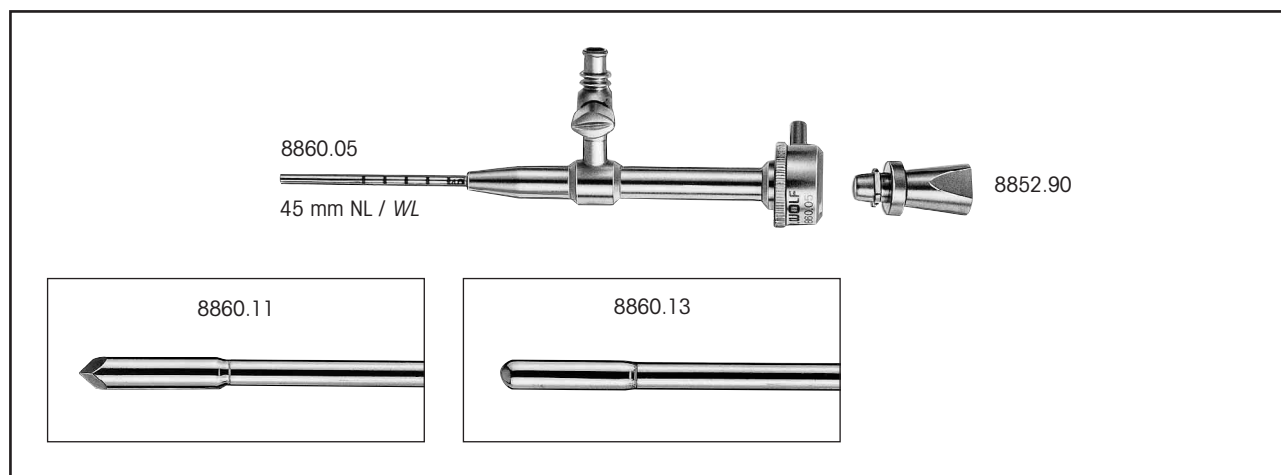

Needle arthroscope 2.4 mm

consisting of:

**Trocar sleeve, 2.4 mm, with self-sealing mechanism
and 1 fixed irrigation tap***8860.05

also:

Trocar with short pyramidal tip8860.11
Obturator, blunt8860.13

Needle Arthroskop 2,4 mm

bestehend aus:

**Trocarhülse, 2,4 mm, mit selbstschließendem
Verschluß und 1 festen Spülhahn***8860.05

hierzu:

Trocar mit kurzer, dreiflächiger Spitze8860.11
Obturator, stumpf8860.13


* Irrigation only possible with telescope removed !
also: **Stopper**8852.90

* Spülung nur bei herausgezogener Optik möglich !
hierzu: **Verschlussstück**8852.90

*Office Arthroscope
with Telescope 1.9 mm
for small joints*

Office-Arthroskop
mit Optik 1,9 mm
für kleine Gelenke

2

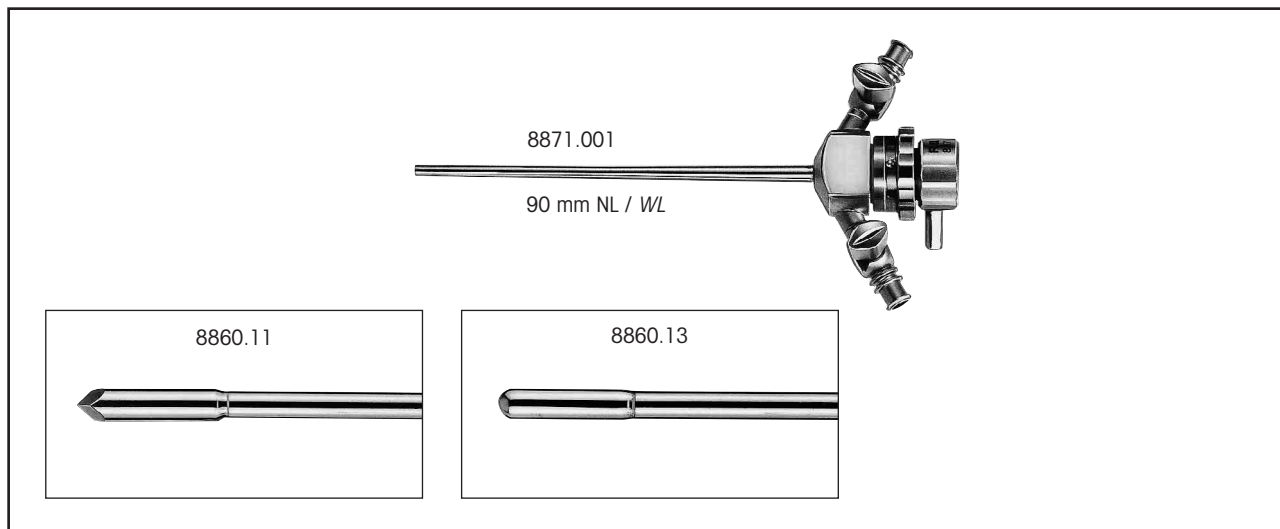

Office arthroscope 2.8 / 4.0 mm,

comprising:

Trocar sleeve / irrigation cannula, conical 2.8 / 4 mm,
with 2 irrigation taps, sealing attachment and
10 sealing membranes (8877.951).....8877.001

also:

Trocar with short pyramidal tip8860.11
Obturator, blunt.....8860.13

Telescopes see page B 410.201a

Office-Arthroskop 2,8 / 4,0 mm,

bestehend aus:

Trokarhülse / Spülkanüle, konisch 2,8 / 4 mm,
mit 2 Spülhähnen, Dichtaufsatz und
10 Dichtmembranen (8877.951).....8877.001

hierzu:


Trokar mit kurzer, dreiflächiger Spitze.....8860.11
Obturator, stumpf8860.13

Optiken siehe Blatt B 410.201a

*Arthroscope by Feldkamp
with Telescope 2.4 mm
for small joints*

Arthroskop nach Feldkamp
mit Optik 2,4 mm
für kleine Gelenke

Arthroskopie
Arthroscopy

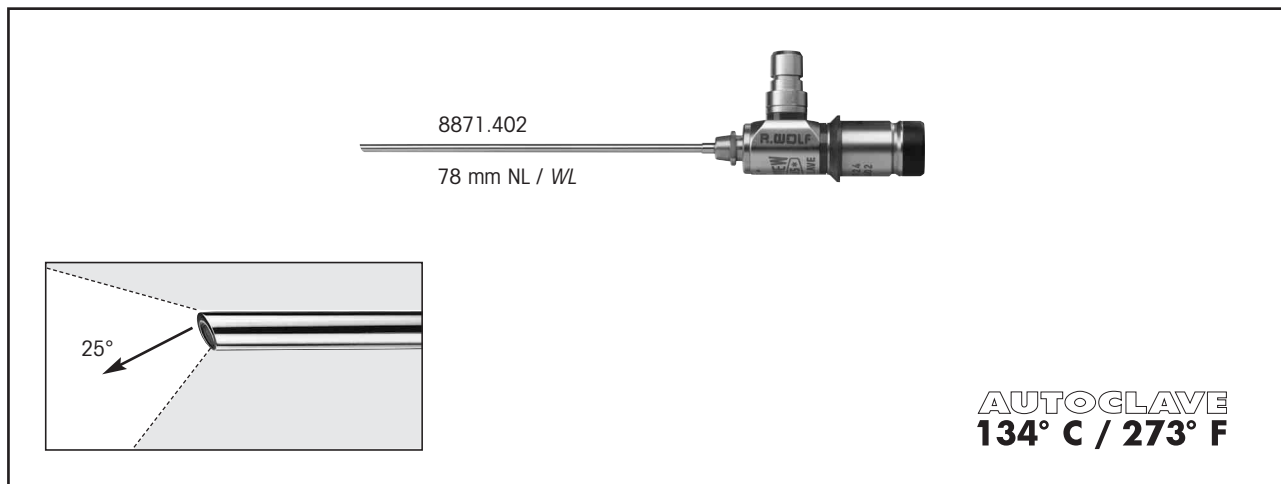


PANOVIEW PLUS telescope, Ø 2.4 mm,
25°8871.402

PANOVIEW PLUS-Optik, Ø 2,4 mm,
25°8871.402

For RIWO C-mount lenses:
Plug-on eyepiece8885.901

Für RIWO-C-mount-Objektive:
Steck-Okulartrichter8885.901

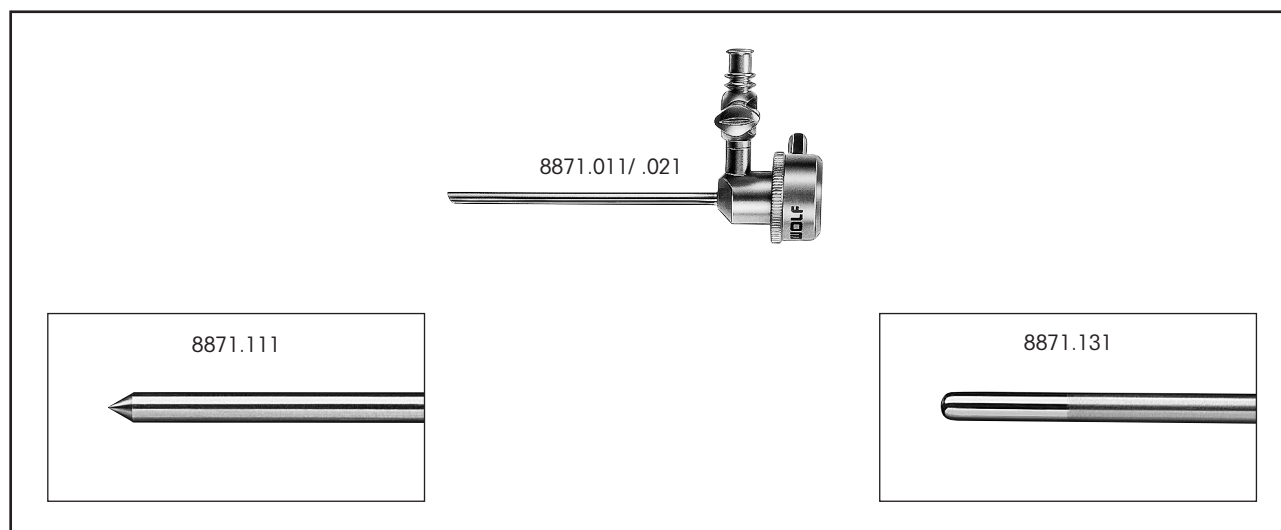

Trocar sleeve, Ø 3.0 mm,
capacity 2.5 mm, with self-sealing
mechanism and 1 fixed irrigation tap8871.011
High-flow trocar sleeve, Ø 3.5 mm
with swivel tap and distal irrigation
openings, 56 mm working length8871.021
Trocar, conical tip8871.111
Obturator, blunt8871.131

Trocarhülse, Ø 3,0 mm,
Durchlaß 2,5 mm, mit selbstschließendem
Verschluß und 1 festen Spülhahn, 60 mm Nutzlänge8871.011
Highflow-Trocarhülse, Ø 3,5 mm
mit drehbarem Hahn und distalen Spül-
öffnungen, 56 mm Nutzlänge8871.021
Trokar, kegelig-spitz8871.111
Obturator, stumpf8871.131

Auxiliary instruments 2 mm see page B 410.701a/.706a

Hilfsinstrumente 2 mm siehe Blatt B 410.701a/.706a

Auxiliary Instruments
for Arthroscope by Feldkamp

Hilfsinstrumente
zum Arthroskop nach Feldkamp

Arthroskopie
Arthroscopy

2




	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	gerade straight
 Miniatur-Stanze Miniature punch	2.0 mm	60 mm	8486.601
	2.2 mm	75 mm	8486.602
	2.0 mm	130 mm	8486.02
 Miniatur-Zange mit Doppellöffelmaul Miniature double-spoon forceps	2.0 mm	60 mm	8486.611
	2.2 mm	75 mm	8486.612
	2.0 mm	110 mm	8486.06
 Miniatur-Greifzange Miniature grasping forceps	2.0 mm	60 mm	8486.621
	2.2 mm	75 mm	8486.622
	2.0 mm	110 mm	8486.08

Arthroscope by Wruhs with Telescope 2.7 mm

Arthroskop nach Wruhs mit Optik 2,7 mm

2

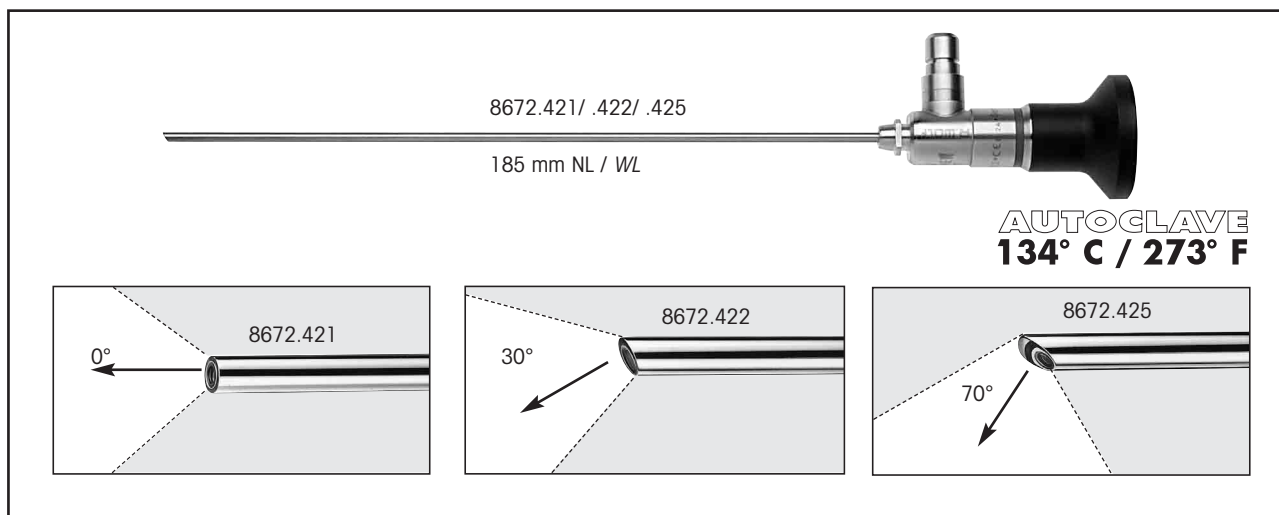


PANOVUE telescope, Ø 2.7 mm,

0°	8672.421
30°	8672.422
70°	8672.425

PANOVUE-Optik, Ø 2,7 mm,

0°	8672.421
30°	8672.422
70°	8672.425

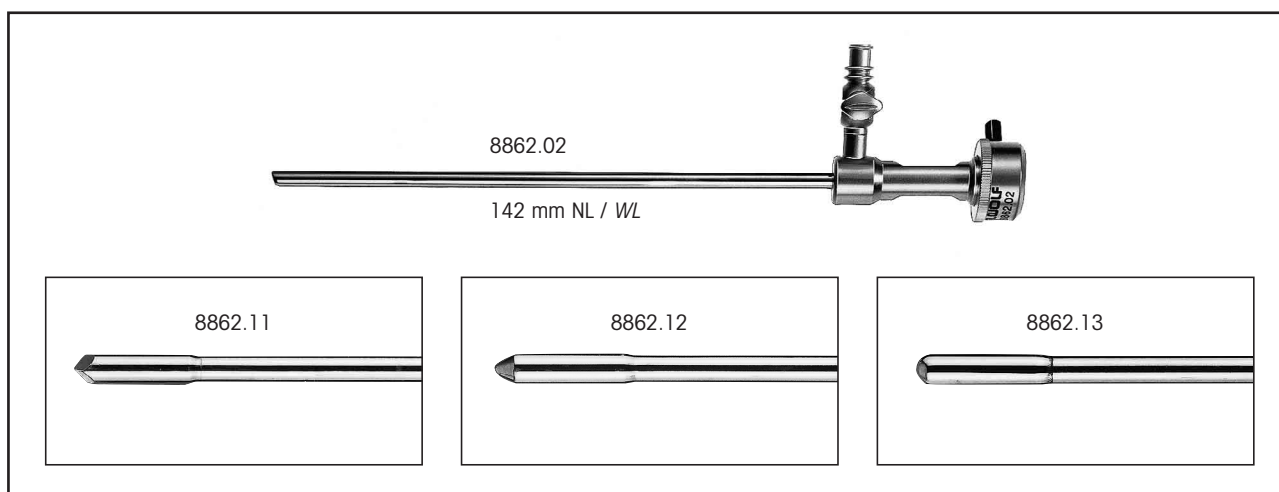

Trocar sleeve, Ø 4 mm,
with self-sealing mechanism
and 1 fixed tap

8862.02

also:

Trocar with short pyramidal tip	8862.11
Obturator, blunt conical	8862.12
or	
Obturator, blunt	8862.13

Trokarhülse, Ø 4 mm,
mit selbstschließendem Verschluss
und 1 festen Hahn


8862.02

hierzu:

Trokar mit kurzer, dreiflächiger Spitze	8862.11
Obturator, kegelig-stumpf	8862.12
oder	
Obturator, stumpf	8862.13

*Standard Arthroscope
with Telescope 4 mm
for large joints*

Standard-Arthroskop
mit Optik 4 mm
für große Gelenke

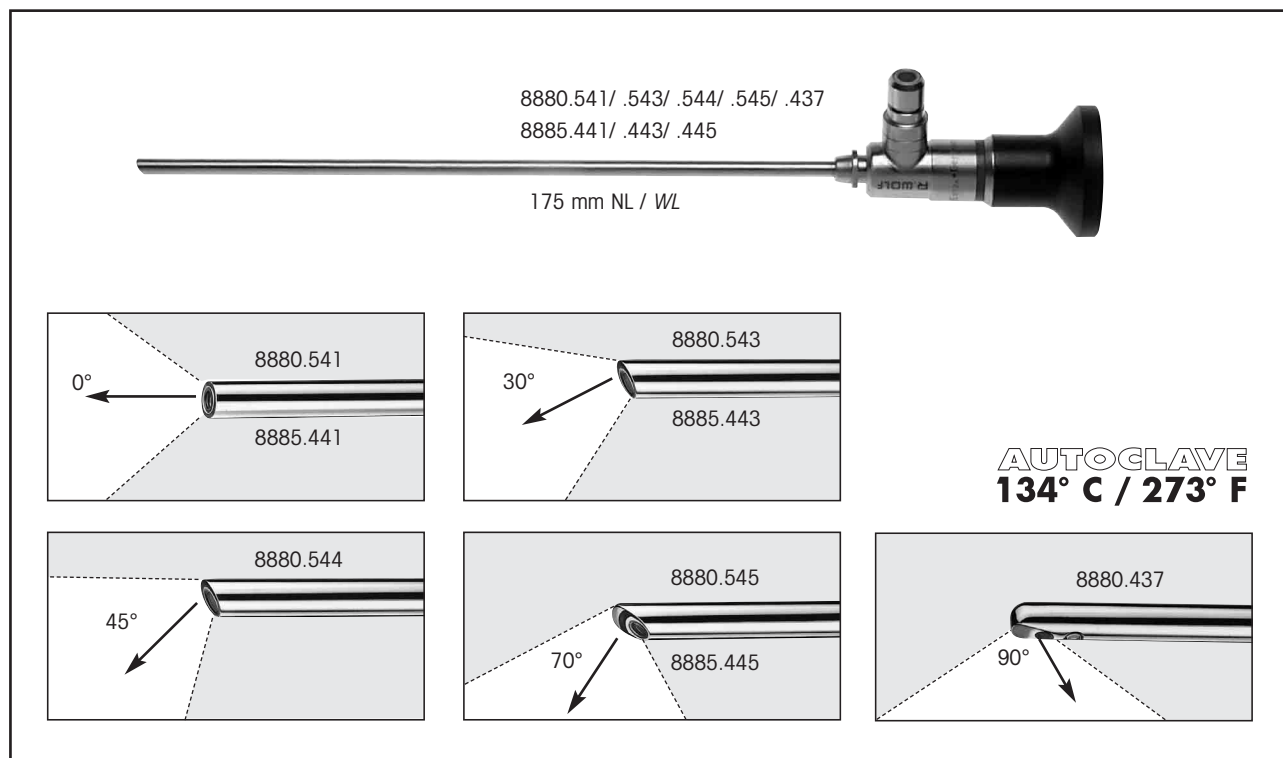

PANOVIEW telescope, Ø 4 mm,

0°	8880.541
30°	8880.543
45°	8880.544
70°	8880.545
90°	8880.437

or

PANOVIEW 3 wide angle telescope, Ø 4 mm,

0°	8885.441
30°	8885.443
70°	8885.445

PANOVIEW-Optik, Ø 4 mm,

0°	8880.541
30°	8880.543
45°	8880.544
70°	8880.545
90°	8880.437

oder


PANOVIEW 3-Weitwinkel-Optik, Ø 4 mm,

0°	8885.441
30°	8885.443
70°	8885.445

*Standard Arthroscope
with Telescope 4 mm
for large joints*

Standard-Arthroskop
mit Optik 4 mm
für große Gelenke

2

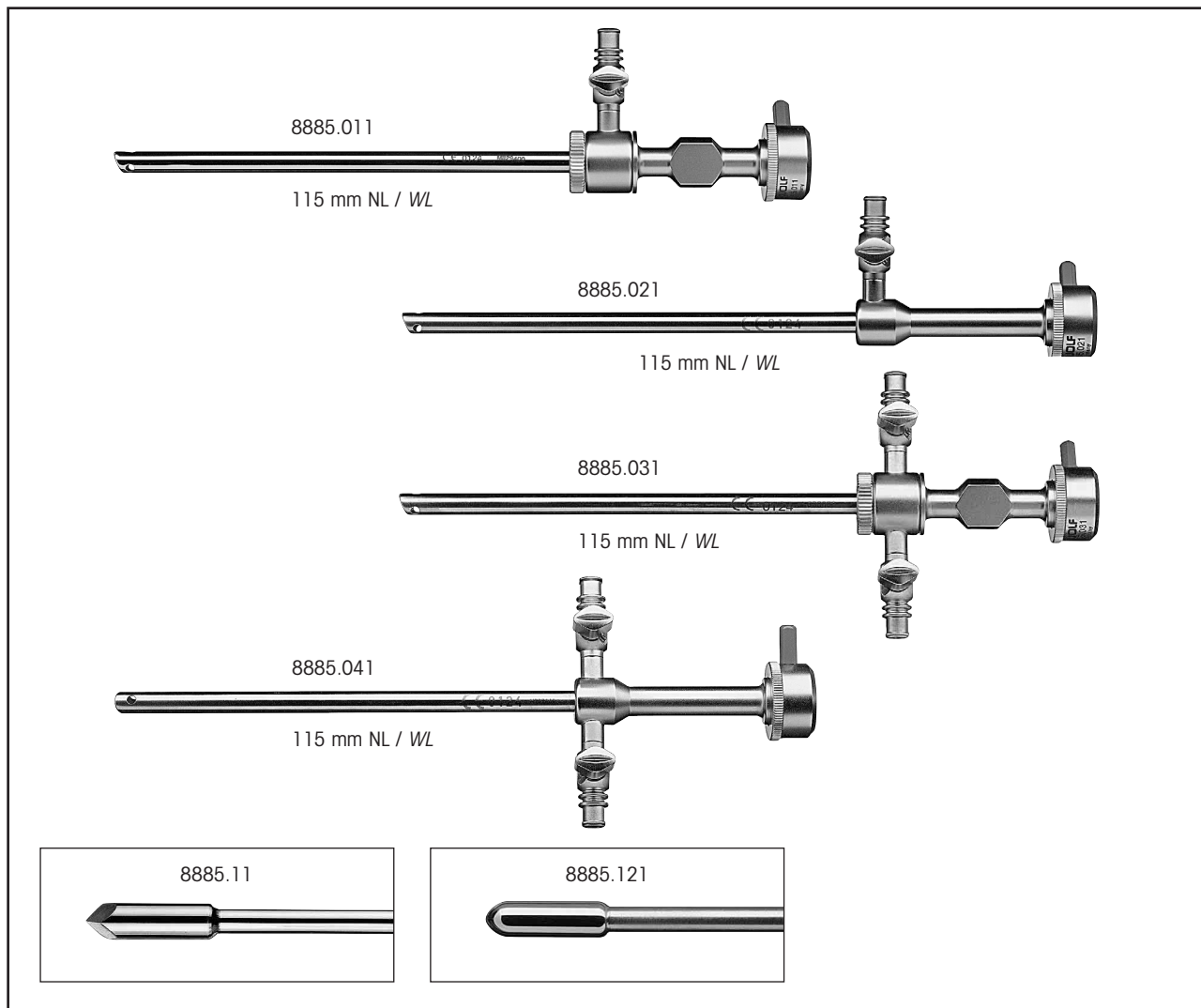

Trocar sleeve, Ø 5.6 mm, with self-sealing mechanism
and 1 rotatable tap8885.011
or
1 fixed tap8885.021
or
2 rotatable taps8885.031
oder
2 fixed taps8885.041
also:
Trocar with short pyramidal tip8885.11
Obturator, blunt.....8885.121


Trokarhülse, Ø 5,6 mm, mit selbstschließendem Verschluss
und 1 drehbaren Hahn8885.011
oder
1 festen Hahn8885.021
oder
2 drehbaren Hähnen8885.031
oder
2 festen Hähnen.....8885.041
hierzu:
Trokar mit kurzer, dreiflächiger Spitze.....8885.11
Obturator, stumpf8885.121

PANOVIEW telescopes see page B 410.207a

PANOVIEW-Optiken siehe Blatt B 410.207a

*High-Flow Arthroscope
with Telescope 4 mm
for large joints*

High-Flow-Arthroskop
mit Optik 4 mm
für große Gelenke

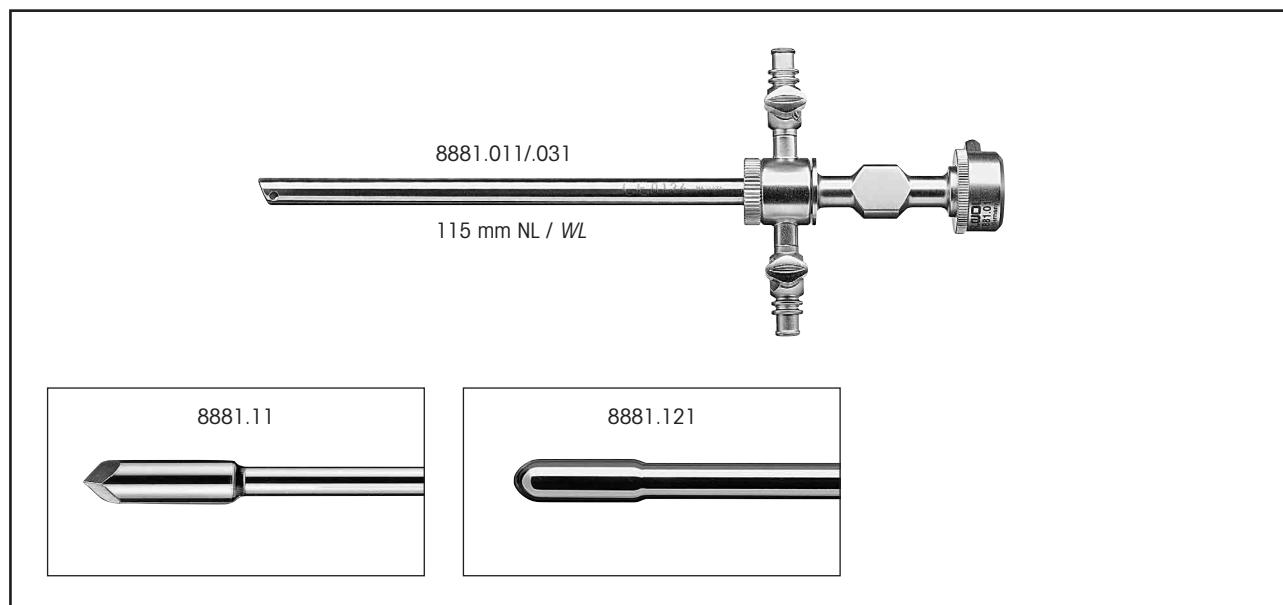

High-flow trocar sleeve, Ø 6.3 mm
with self-sealing mechanism
and 2 rotatable taps8881.031

for especially high flow rates:
S high-flow trocar sleeve, Ø 6.6 mm
with self-sealing mechanism
and 2 rotatable taps8881.011

also:
Trocar with short pyramidal tip8881.11
Obturator, blunt.....8881.121

PANOVIEW telescopes see page B 410.207a

High-Flow-Trokarhülse, Ø 6,3 mm
mit selbstschließendem Verschuß
und 2 drehbaren Hähnen8881.031

für besonders hohe Durchflußraten:
S-High-Flow-Trokarhülse, Ø 6,6 mm
mit selbstschließendem Verschuß
und 2 drehbaren Hähnen8881.011


hierzu:
Trokar mit kurzer, dreiflächiger Spitze.....8881.11
Obturator, stumpf8881.121

PANOVIEW-Optiken siehe Blatt B 410.207a

Direct Couple Endoscope

Direct Couple Endoscope

Arthroskopie
Arthroscopy

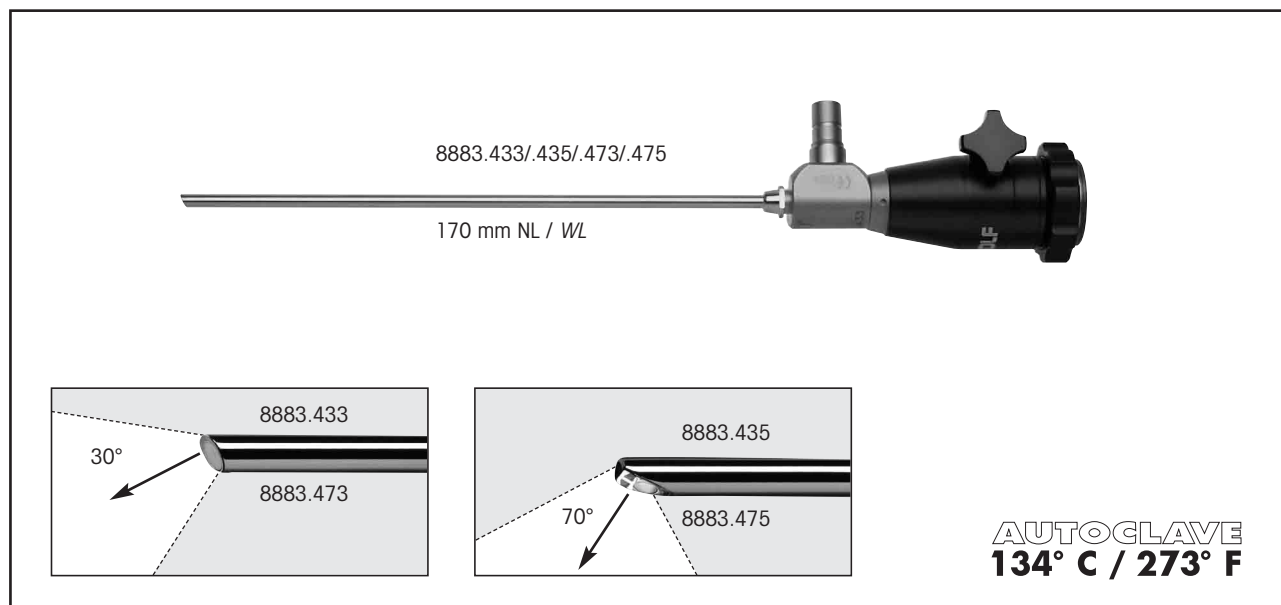

Direct Couple Endoscopes, f = 35 mm,

for use with 1/2" CCD camera,

Ø 4 mm,

30°8883.433

70°8883.435

Direct Couple Endoscope, f = 35 mm,

zur Verwendung mit 1/2" CCD Kamera,

Ø 4 mm,

30°8883.433

70°8883.435

Direct Couple Endoscopes, f = 18 mm,

for use with 1/4" CCD camera,

Ø 4 mm,

30°8883.473

70°8883.475

Direct Couple Endoscope, f = 18 mm,

zur Verwendung mit 1/4" CCD-Kamera,

Ø 4 mm,

30°8883.473

70°8883.475

Note:

Suitable Cameras

1 CCD ENDOCAM 5512 see page A 105.02a-02d and

3 CCD ENDOCAM 5516 see page A 105.06a-06d.

Hinweis:

Passende Kameras


1 CCD ENDOCAM 5512 siehe Blatt A 105.02a-02d und

3 CCD ENDOCAM 5516 siehe Blatt A 105.06a-06d.

Arthroscope by Chiron

Arthroskop nach Chiron

2

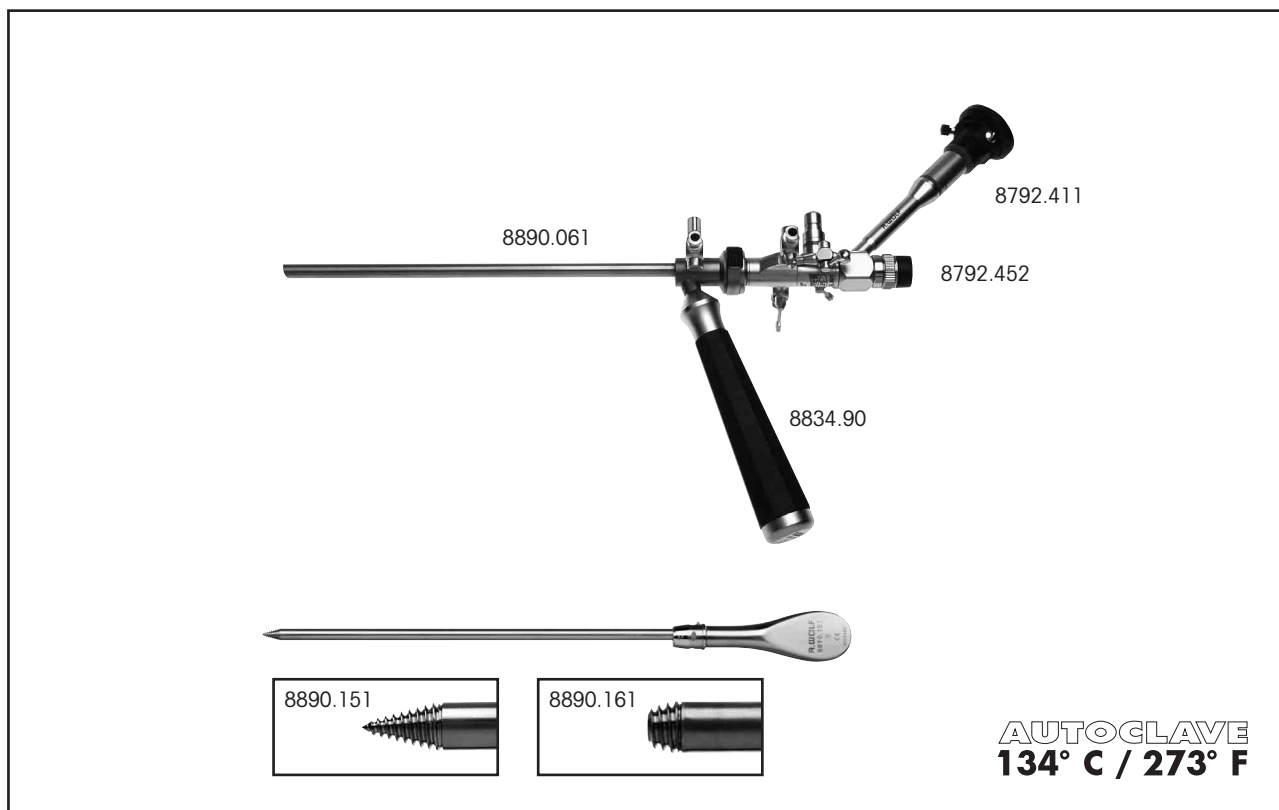

Arthroscope by Chiron consisting of:

PANOVIEW PLUS-Arthroscope, Ø 5.8 x 5.1 mm,
angle of view 20°, with working channel 2.7 mm
and 2 suction-irrigation channels
WL 205 mm.....8792.411
also:
Sealing cap adaptor (incl. 10 rubber caps)8792.452

High flow sheath
outer diameter 7.1 mm,
capacity 6.1 mm,
WL 186.5 mm8890.061

Handle.....8834.90

Screw trocar
Ø 6 mm, WL 214 mm8890.151

Cannulated screw trocar
Ø 6 mm, capacity 2.5 mm, WL 209.5 mm.....8890.161
also:
Alignment Wire, Ø 2.5 mm, TL 430 mm
with spiral thread and
special coating to increase life89960.1125

Arthroskop nach Chiron bestehend aus:

PANOVIEW PLUS-Arthroskop, Ø 5,8 x 5,1 mm,
Blickrichtung 20°, mit Arbeitskanal 2,7 mm
und 2 Saug-Spülkanälen
NL 205 mm8792.411
hierzu:
Dichtkappen-Aufsatz (inkl. 10 Gummikappen)8792.452

Highflow-Schaft
Außen-Durchmesser 7,1 mm,
Durchlaß 6,1 mm,
NL 186,5 mm8890.061

Handgriff8834.90

Schraub-Trokar
Ø 6 mm, NL 214 mm8890.151

Kanülierter Schraub-Trokar
Ø 6 mm, Durchlass 2,5 mm, NL 209,5 mm8890.161
hierzu:
Zielbohrdraht, Ø 2,5 mm, GL 430 mm
mit Spiralschliff und Spezialbeschichtung
zur Erhöhung der Lebensdauer89960.1125

Hand Instruments for Arthroscope by Chiron

Handinstrumente für Arthroskop nach Chiron

2

			
	Ø	NL WL	Typen Types
 Anulotom Annulotome	2.5 mm	350 mm	8792.581
 Dissektor, nach Penfield Dissector, by Penfield			8792.591
 Raspel, retro Rasp, retrograde			8792.541
 Trokar Trocar			8792.551
 Löffel Spoon			8792.562
 Tasthaken Hook probe	2.0 mm		8793.597

Forceps

with overload protection
for Arthroscope by Chiron

Zangen

mit Überlastschutz
für Arthroskop nach Chiron

			
	Ø	NL WL	Typen Types
 Mikro-Rongeur , starr, mit Überlastschutz Micro rongeur , rigid, with overload protection	2.5 mm	350 mm	8792.632
 Faßzange Grasping forceps	2.0 mm		8793.621
 Rongeur , doppelbeweglich, mit Überlastschutz Rongeur , double action, with overload protection	2.5 mm		8792.636
 Flexible Probe-Exzisionszange Flexible biopsy forceps	2.2 mm	365 mm	829.07

Arthroscopy Cannula System




by S. N. Schreiber

Arthroskopie-Kanülen-System

nach S. N. Schreiber

Arthroskopie
Arthroscopy

3

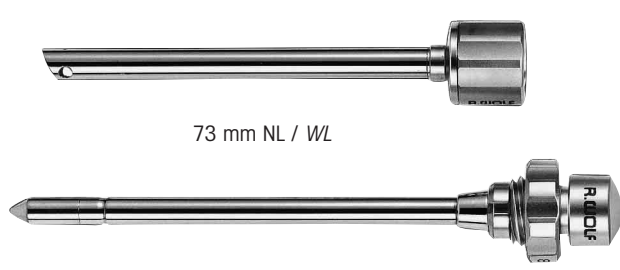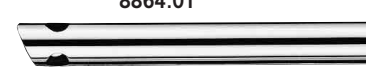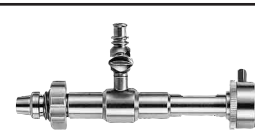 73 mm NL / WL			
Universal-Trocarhülse Universal trocar sleeve	Durchlaß Capacity	Trocar Trocar	Obturator Obturator
8863.01 	4.6 mm	8863.11 	8863.13 
8864.01 	5.6 mm	8864.11 	8864.13 
Adaptors to fit the trocar sleeves 8863.01/8864.01:		Adapter zum Ansetzen an die Trocarhülsen 8863.01/8864.01:	
Optik-Zwischenstück für 4-mm-Optiken Telescope adaptor for 4 mm telescopes		8864.70	
Anschlußstück für motorgetriebene Messer und Anschlußkegel Adaptor for power cutting instruments with connecting cone		8864.72	
Anschlußstück für Motor-Instrumente und Luerlock-Anschluß Adaptor for power instruments with Luer lock		8864.74	
Anschlußstück für gerade Zangen bis 4,5 mm Durchmesser Adaptor for straight forceps up to 4.5 mm diameter		8864.75	
Anschlußstück für Zu- oder Ablaufschlauch Adaptor for inlet or outlet tube		8864.79	

Drainage Cannulas

2.3 mm

for arthroscopy


Drainage-Kanülen

2,3 mm

zur Arthroskopie



4

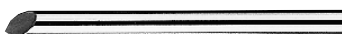	Durchlaß Capacity	Ø	NL WL	Typen Types
 Drainage Kanüle mit 1 Durchgangshahn Drainage cannula with 1 tap	2.3 mm	3.2 mm	80 mm	8302.09
 Trokar mit schrägem Anschlag Trocar with oblique tip		2.3 mm	103 mm	8302.101
 Obturator				8302.11

Silicone tube, 2 m long,
with Luer connector 886.008302.90

Silicon-Schlauch, 2 m lang,
mit Luerteil 886.008302.90

Drainage Cannulas


3.7 mm

for arthroscopy

Drainage-Kanülen

3,7 mm

zur Arthroskopie

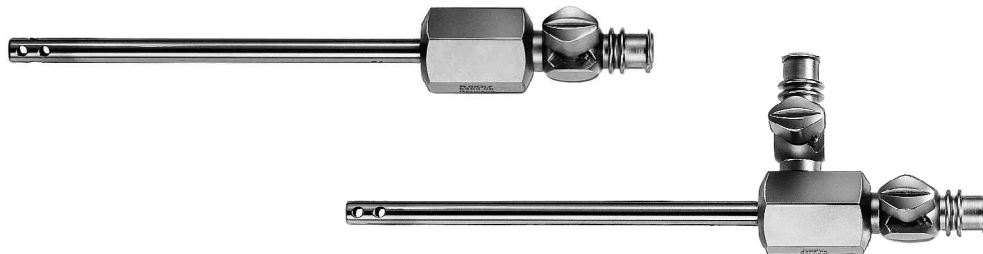

4

	Durchlaß Capacity	Ø	NL WL	Typen Types
 Drainage Kanüle mit 1 Durchgangshahn Drainage cannula with 1 tap	3.7 mm	4.4 mm	73 mm	8303.09*
 Drainage-Kanüle mit 1 Durchgangshahn und 1 seitlichen Anschluß Drainage cannula with 1 straight tap and 1 laterally mounted tap				8303.50*
 Trocar mit dreikantiger Spitze Trocar with pyramidal tip		3.7 mm	112 mm	8303.10
 Obturator				8303.11

* In conjunction with power cutting instruments and burrs mainly used as inlet cannulas

* Diese Drainage-Kanülen werden bei Verwendung der Rotationsmesser und -Fräser meist als Zulaufkanüle verwendet.

Silicone tube, 2 m long,
with Luer connector 886.018303.90

Silicon-Schlauch, 2 m lang,
mit Luerteil 886.018303.90

Guide and
Marking Rod
for arthroscopy

Einführungs- und
Wechselstab
zur Arthroskopie

Only for re-establishing access or for marking a further incision:		Nur zum Einführen bei verlorenem Zugangsweg oder zur Markierung eines weiteren Einstiches:	
			
	Ø	GL TL	Typen Types
 Einführungs- und Wechselstab Guide and marking rod	4.0 mm	325 mm	8863.75

Hook Probes for arthroscopy

Hakensonden zur Arthroskopie

For palpation in the articular cavity, for re-establishing access or for marking a further incision:

Zur Palpation im Gelenkraum, zum Einführen bei verlorenem Zugangsweg oder zur Markierung eines weiteren Einstiches:



	Ø	NL WL	Typen Types
 Hakensonde , passend in Trokarhülse 8863.01 Hook probe , to fit in trocar sleeve 8863.01	4.4 mm	228 mm	8863.80
 Hakensonde , passend in Trokarhülse 8864.01 Hook probe , to fit in trocar sleeve 8864.01	5.5 mm		8864.80

Hook Probes

for diagnostic meniscus mobilisation

Hakensonden

zur diagnostischen Meniskusbilisation



	H	NL WL	Typen Types
 Hakensonde, graduert Hook probe, graduated	7.0 mm	115 mm	8399.901
 Hakensonde, graduert Hook probe, graduated	4.5 mm		8399.95

ARTHROline Punches

ARTHROline Stanzen

Arthroskopie
Arthroscopy


								
		Maulteilhöhe <i>Height of jaws</i>	gerade <i>straight</i>	links gebogen <i>curved left</i>	rechts gebogen <i>curved right</i>	Schaft aufgebogen <i>shaft curved upwards</i>	Maul aufgebogen <i>jaws curved upwards</i>	Typen <i>Types</i>
ARTHROline Stanze, standard ARTHROline punch, standard Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm	●					89140.0005
ARTHROline Stanze, standard ARTHROline punch, standard Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm					●	89140.0002
ARTHROline Stanze, standard ARTHROline punch, standard Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm				●		89140.0022
ARTHROline Stanze, standard ARTHROline punch, standard Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm		●			●	89140.0001
ARTHROline Stanze, standard ARTHROline punch, standard Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm			●		●	89140.0203

ARTHROline Stanze, flaches Maulteil ARTHROline punch, flat jaws Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm	●					89140.0105
ARTHROline Stanze, flaches Maulteil ARTHROline punch, flat jaws Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm					●	89140.0102
ARTHROline Stanze, flaches Maulteil ARTHROline punch, flat jaws Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm				●		89140.0122
ARTHROline Stanze, flaches Maulteil ARTHROline punch, flat jaws Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm		●			●	89140.0101
ARTHROline Stanze, flaches Maulteil ARTHROline punch, flat jaws Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm			●		●	89140.0103

ARTHROline Punches

ARTHROline Stanzen

Arthroskopie
Arthroscopy

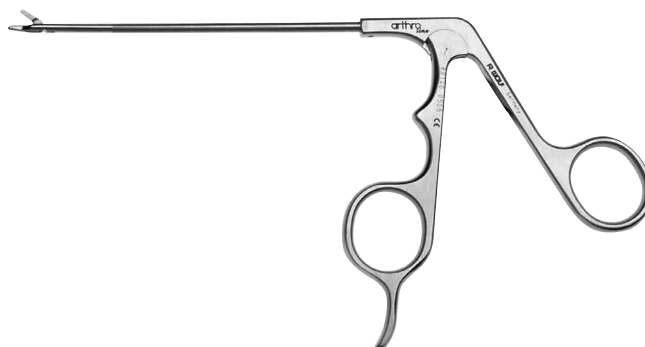

		Maulteilhöhe Height of jaws	gerade straight	mit Schaufel with scoop	retrograd schneidend retrograde cut- ting action	Maul aufgebogen jaws curved upwards	Typen Types
ARTHROline Hakenstanze ARTHROline hooked punch Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm	●				89140.0205
ARTHROline Hakenstanze ARTHROline hooked punch Schnittbild:  Sectional view: 		1.6 mm				●	89140.0202
ARTHROline Korbstanze oval ARTHROline basket punch oval Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm	●				89140.0305
ARTHROline Korbstanze oval ARTHROline basket punch oval Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm				●	89140.0302
ARTHROline Hakenstanze ARTHROline hooked punch Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm	●	●			89140.0405
ARTHROline Hakenstanze ARTHROline hooked punch Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm		●		●	89140.0402
ARTHROline Scherenstanze ARTHROline scissors punch Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm	●				89140.0505
ARTHROline Scherenstanze ARTHROline scissors punch Schnittbild:  Sectional view: 		2.1 mm				●	89140.0502
ARTHROline Stanze, links schneidend ARTHROline punch, cutting left Schnittbild:  Sectional view: 		2.3 mm	●		links left		89140.0605
ARTHROline Stanze, rechts schneidend ARTHROline punch, cutting right Schnittbild:  Sectional view: 		2.3 mm	●		rechts right		89140.0602

ARTHROline Suction Punch

ARTHROline Saugstanze

Arthroskopie
Arthroscopy

		
	Ø	Typen Types
Saugstanze Suction punch 	2.7 mm	89140.0027
Saugstanze Suction punch 	4.5 mm	89140.0045

Punches

with scissors handle
for operative arthroscopy

Stanzen

mit Scherengriff
zur operativen Arthroskopie

							
	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	gerade straight	links gebogen curved left	rechts gebogen curved right	Schaft 15° aufwärts gebogen Sheath curved 15° upwards	Maulteil 15° aufwärts gebogen Jaw section angled 15° upwards
Hakenstanze mit Schaufel Hooked punch with scoop  Schnittbild: Sectional view: 	2.7 mm	130 mm	8487.01	8487.011	8487.012	8487.013	
	3.4 mm		8488.951	8488.952	8488.953	8488.954	
	4.5 mm						8489.201
Hakenstanze Hooked punch  Schnittbild: Sectional view: 	2.0 mm	60 mm	8486.601				
		130 mm	8486.02				
	2.2 mm	75 mm	8486.602				
	3.4 mm	130 mm	8488.02				8488.025
Hakenstanze, bewegliches Teil gezahnt Hooked punch, moveable jaw section toothed  Schnittbild: Sectional view: 	2.7 mm	130 mm	8487.061				
Hakenstanze, bewegliches Teil gezahnt Hooked punch, moveable jaw section toothed  Schnittbild: Sectional view: 							8487.063

Punches

with scissors handle
for operative arthroscopy

Stanzen

mit Scherengriff
zur operativen Arthroskopie



	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	gerade straight	links gebogen curved left	rechts gebogen curved right	Schaft 15° aufwärts gebogen Sheath curved 15° upwards	Maulteil 15° aufwärts gebogen Jaw section curved 15° upwards
Stanze, bewegliches Teil gezahnt, Breitform 4,5 mm Punch, moveable jaw section toothed, broad design 4.5 mm  Schnittbild: Sectional view: 	3.4 mm	130 mm	8488.121				8488.063
Stanze mit Schaufel; bewegliches Teil gezahnt, Breitform 4,5 mm Punch with scoop, moveable section toothed, broad design 4.5 mm  Schnittbild: Sectional view: 	4.5 mm						8489.063




	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
Hakenstanze mit Überlastschutz und Spülhahn Hooked punch with overload protection and irrigation tap 	2.7 mm	110 mm	8486.604

Punches

with angled jaws and scissors handle
for operative arthroscopy

Stanzen

mit abgewinkeltem Maulteil und Scherengriff
zur operativen Arthroskopie

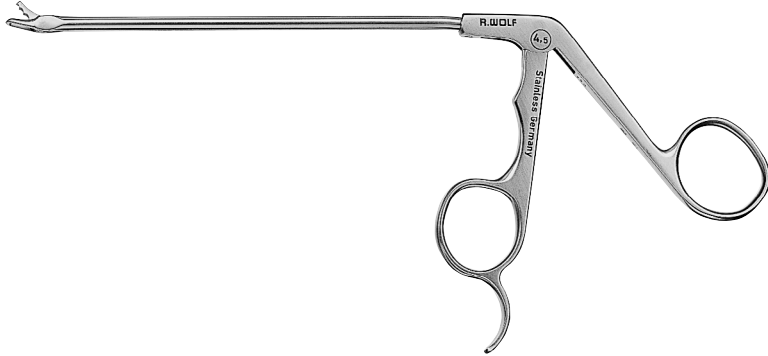				
		Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
Stanze, front- und seitlich schneidend Punch, cutting to the front and side Schnittbild: Sectional view: 	90° links / left	3.4 mm	130 mm	8404.017
	90° rechts / right			8404.018
Stanze mit Schaufel, besonders geeignet zum seitlichen Schneiden und Glätten Punch with scoop, particularly suitable for lateral cutting and trimming Schnittbild: Sectional view: 	45° links / left			8404.71
	45° rechts / right			8404.81

Punches

with interchangeable forceps attachments
for operative arthroscopy

Stanzen

mit auswechselbaren Zangenaufsätzen
zur operativen Arthroskopie





hierzu: also:	Zangen- aufsatz Forceps- attachment	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Handgriff Handle	Komplett- Instrument Complete instrument
Stanze , retrograd schneidend, drehbar Punch , retrograde cutting action, rotatable Schnittbild: Sectional view: 	mini 8211.661	3.4 mm	92 mm	8211.601	8211.651
Stanze , retrograd schneidend, drehbar Punch , retrograde cutting action, rotatable Schnittbild: Sectional view: 	groß large 8211.621	5.0 mm		8211.601	8211.611

Punches / Forceps

with aspiration channel
for operative arthroscopy

Stanzen / Zange

mit Aspirationskanal
zur operativen Arthroskopie

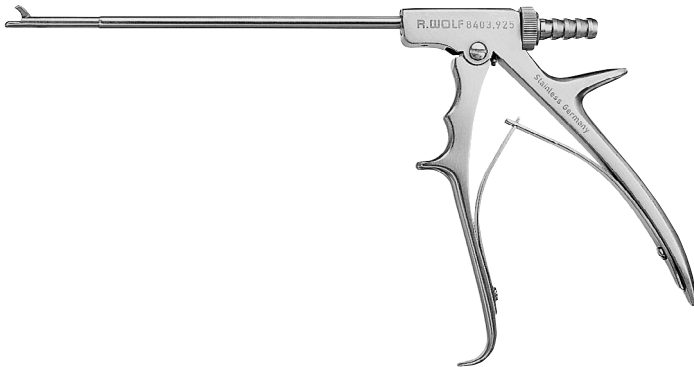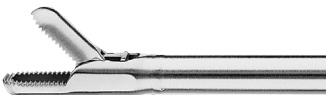
							
		Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	gerade straight	15° aufwärts gebogen Curved 15° upwards	30° rechts gebogen Curved 30° right	30° links gebogen Curved 30° left
Saugstanze Suction punch		4.5 mm	130 mm	8403.925			
Schnittbild: Sectional view: 							
Saugstanze Suction punch					8403.221		
Schnittbild: Sectional view: 							
Saugstanze Suction punch						8403.222	
Schnittbild: Sectional view: 							
Saugstanze Suction punch							8403.223
Schnittbild: Sectional view: 							
Saug-Greifzange Suction grasping forceps				8403.851			

Scissors

with scissors handle
for operative arthroscopy

Scheren

mit Scherengriff
zur operativen Arthroskopie

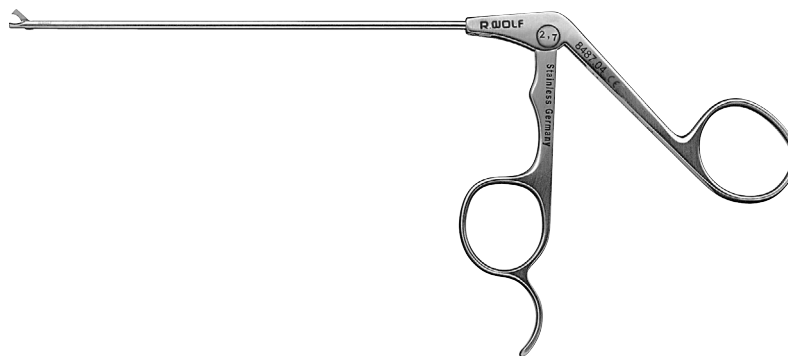

mit geradem Maulteil with straight blades	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	gerade straight	links gebogen curved left	rechts gebogen curved right	Schaft 15° aufwärts gebogen Sheath curved 15° upwards
Hakenschere , universell verwendbar, in weichen und harten Strukturen Hooked scissors , for universal application in soft and hard structures	2.7 mm	130 mm	8487.04			
	3.4 mm		8488.04	8488.041	8488.042	
	4.5 mm		8489.04			
Schere, gerade , für feine Strukturen Scissors, straight , for fine structures	2.7 mm		8211.071			
Mikro-Schere , für präzises Schneiden in weichen Strukturen Micro scissors for precise cutting in soft structures	3.4 mm		8488.051	8488.052	8488.053	
	Schnittbild: Sectional view: 					

mit abgewinkeltem Maulteil with angled blades		Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
Hakenschere , für schwer zugängliche Bereich Hooked scissors , for hardly inaccessible areas	45° links left	3.4 mm	130 mm	8404.52
	45° rechts right			8404.62

Forceps

with overload protection

Zangen

mit Überlastschutz



	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
Miniatur-Zange mit Doppellöffelmaul, drehbar mit Sperre, Überlastschutz und Spülhahn Miniature double-spoon forceps, rotatable, with locking mechanism, overload protection and irrigation tap 	2.7 mm	134 mm	8486.651
Miniatur-Greifzange, drehbar mit Sperre, Überlastschutz und Spülhahn Miniature grasping forceps, rotatable, with locking mechanism, overload protection and irrigation tap 	2.0 mm	110 mm	8486.081



	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
Miniatur-Zange mit Doppellöffelmaul mit Überlastschutz und Spülhahn Miniature double-spoon forceps, with overload protection and irrigation tap 	2.7 mm	110 mm	8486.614
Miniatur-Greifzange mit Überlastschutz und Spülhahn Miniature grasping forceps, with overload protection and irrigation tap 	2.7 mm	110 mm	8486.624


Forceps

with scissors handle
for operative arthroscopy

Zangen

mit Scherengriff
zur operativen Arthroskopie

			
	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
 Miniatur-Zange, mit Doppellöffelmaul Miniature double-spoon forceps	2.0 mm	60 mm	8486.611
		110 mm	8486.06
 Miniatur-Greifzange Miniature grasping forceps	2.2 mm	75 mm	8486.612
	2.0 mm	60 mm	8486.621
		110 mm	8486.08
	2.2 mm	75 mm	8486.622

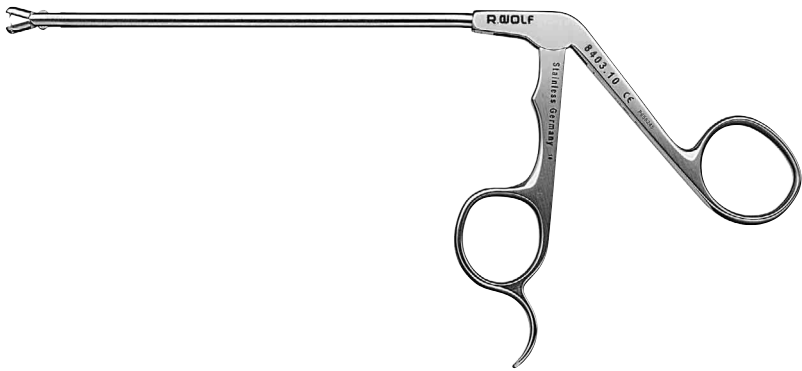
			
	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
Probe-Exzisions- und Retraktionszange mit Dorn, doppelbewegliches Maulteil Biopsy and retraction forceps with spike, both jaws opening 	4.5 mm	130 mm	8403.10

Forceps

for operative arthroscopy

Zangen

zur operativen Arthroskopie

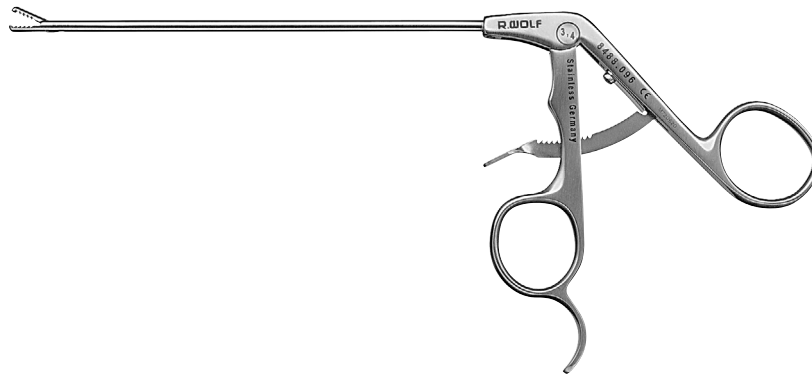


	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Typen Types
 Greifzange, Zangengriff mit Sperre, Spitze zusätzlich mit feiner Verzahnung Grasping forceps, forceps handle with locking mechanism, <i>tip with additional fine teeth</i>	3.4 mm	130 mm	8488.096
	4.5 mm		8489.096



	Schaft Ø Sheath Ø	NL WL	Type Type
 Probe-Exzisionszange für Patella-PE Patella biopsy forceps	5 / 3 mm	100 mm	8211.131

Meniscus Grasping Forceps

Meniskusfaßzange

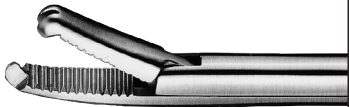			
	Ø	NL WL	Typen Types
 Meniskusfaßzange Meniscus grasping forceps	4 / 7 mm	105 mm	8403.00
 Meniskusfaßzange nach O'Connor Meniscus grasping forceps by O'Connor			8403.001

RIWO CLEAN Rack for arthro forceps

RIWO-CLEAN-Rack für Arthro-Zangen



- ☐ **Passing instruments in the operating room**
 - simple and safe passing of instruments is ensured
- ☐ **Transport**
 - securely held forceps are protected against damage
 - suitable for WOLF forceps 8487 / 8488 / 8489 / 8404 / 8403 / 8486
- ☐ **Cleaning**
 - optimum cleaning with the instruments supported only at a few points
 - "rinsing shadows" avoided thanks to the diagonal arrangement of the instruments
 - handles and jaws of the forceps held open for efficient rinsing of the joint
- ☐ **Sterilization**
 - sterilizable materials guarantee long service life
 - steam-sterilizable at 134° C
 - available in sterilization container with cover
- ☐ **Storage**
 - instruments can be stored for up to six months

- ☐ **Zureichung im OP**
 - einfaches und sicheres Zureichen gewährleistet
- ☐ **Transport**
 - sicher gehaltene, fixierte Zangen sind vor Beschädigung geschützt
 - passend für WOLF-Arthro-Zangen der Typen 8487 / 8488 / 8489 / 8404 / 8403 / 8486
- ☐ **Reinigung**
 - optimale Reinigung durch Punktauflage
 - durch schräge Anordnung der Arthro-Zangen werden Spülschatten vermieden
 - die Griff- und Maulteile der Arthro-Zangen werden offen gehalten - Gelenkspülung
- ☐ **Sterilisation**
 - sterilisierbare Werkstoffe garantieren lange Lebensdauer
 - dampfsterilisierbar bei 134° C
 - lieferbar in Sterilisationsbehälter mit Deckel
- ☐ **Lagerung**
 - bis max. 6 Monate möglich

RIWO CLEAN rack,
basket for holding up to 15 forceps38 060.501
Dimensions (W x H x D): 395 x 105 x 195 mm

RIWO CLEAN RACK unit
consisting of:
Container (38202.409) with cover (38202.494)
including basket (38060.501)38 060.001

RIWO-CLEAN-Rack,
Korb zur Aufnahme von maximal 15 Zangen38 060.501
Abmessungen (B x H x T): 395 x 105 x 195 mm

RIWO-CLEAN-Rack-Unit
bestehend aus:
Behälter (38202.409) mit Deckel (38202.494)
inklusive Korb (38060.501)38 060.001

Knives

for operative arthroscopy

Messer

zur operativen Arthroskopie

Arthroskopie
Arthroscopy

		
	NL WL	Typen Types
 Skalpell, gerade Scalpel, straight	125 mm	8436.101
 Rosettenmesser Rosette knife		8436.151
 Hakenmesser Hooked knife		8436.201
 Bananenmesser Banana knife		8436.251
 Arthromesser, gerade Arthro-knife, straight		8436.301

Instrument Set
for small joints

Instrumentarium
für kleine Gelenke

Arthroskopie
Arthroscopy

		
	NL WL	Type Type
Handfräser mit Griff Burr with handle	100 mm	8871.301

8

		
	NL WL	Typen Types
Löffel mit Griff Spoon with handle	100 mm	8871.562
Kürette mit Griff Curette with handle		8871.571
Messer mit Griff Knife with handle		8871.586
Elevator mit Griff Elevator with handle		8871.596
Haken, Ø 2,5 mm mit Griff Hook, Ø 2.5 mm with handle		8871.721

Arthro-rasps / Spoon
for operative arthroscopy

Knorpelfeilen / Löffel
zur operativen Arthroskopie

		
	NL WL	Typen Types
 Knorpelfeile, grob, gerade Arthro-rasp, rough, straight	125 mm	8436.501
 Knorpelfeile, grob, konvex (6,5 x 15 mm) Arthro-rasp, rough, convex (6.5 x 15 mm)		8436.511
 Knorpelfeile, grob, konkav (6,5 x 15 mm) Arthro-rasp, rough, concave (6.5 x 15 mm)		8436.521
 Löffel, grob (6,5 x 10 mm) Spoon, rough (6.5 x 10 mm)		8436.601
 Kürette, Ø 5 mm, beidseitig scharf, 15° abgewinkelt Curette, Ø 5 mm, sharp on both sides, angled 15°		8436.701

Curettes

Küretten

Arthroskopie
Arthroscopy

			
	Innen-Ø Inner Ø	NL WL	Typen Types
 Kürette , gekröpft, Größe 1 Curette , offset, size 1	3 mm	95 mm	8435.901
 Kürette , gekröpft, Größe 2 Curette , offset, size 2	4.5 mm		8435.902
 Kürette , gekröpft, Größe 3 Curette , offset, size 3	6 mm		8435.903
 Kürette , gekröpft Curette , offset	9 mm		89160.1009
 Kürette , gekröpft Curette , offset	11 mm		89160.1011

Microfrac Instruments
for operative arthroscopy

Microfrac-Instrumente
zur operativen Arthroskopie




	NL WL	Typen Types
 Mikrofraktor, 15° gebogen Microfractor, 15° curved	110 mm	8435.951
 Mikrofraktor, 30° gebogen Microfractor, 30° curved		8435.963
 Mikrofraktor, 45° gebogen Microfractor, 45° curved		8435.952
 Mikrofraktor, 35° geschwungen* Microfractor, 35° S-shaped*		8435.953
 Mikrofraktor, 60° geschwungen* Microfractor, 60° S-shaped*		8435.956
 Mikrofraktor, 60° gebogen Microfractor, 60° curved		8435.966
 Mikrofraktor, 80° gebogen Microfractor, 80° curved		8435.968

* especially for the trachlea and talus

* insbesondere für die Trachlea und den Talus

*Hook Electrodes,
Ball Electrode, HF Knives*

*Haken-Elektroden,
Kugel-Elektrode, HF-Messer*

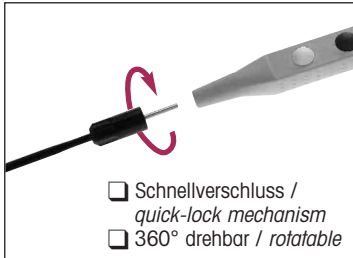MONOPOLAR		Typen Types
  ☐ Schnellverschluss / quick-lock mechanism ☐ 360° drehbar / rotatable		
	Haken-Elektrode , Spatel 45° gewinkelt, 2 Stück Hook electrode , blade 45° angled, 2 pieces	89920.0000
	Haken-Elektrode , Spatel 90° gewinkelt, 2 Stück Hook electrode , blade 90° angled, 2 pieces	89920.0001
	Kugel-Elektrode , Ø 4,0 mm, 2 Stück Ball electrode , Ø 4.0 mm, 2 pieces	89920.0002
	HF-Messer , Skalpellklinge Fig. 67, klassisch, 2 Stück HF knife , scalpel blade fig. 67, classic, 2 pieces	89920.0010
	HF-Messer , Skalpellklinge, Fig. 64, rund, 2 Stück HF knife , scalpel blade fig. 64, round, 2 pieces	89920.0012

hierzu: also: 			
		passend für / suitable for	Typen Types
Handgriff, monopolar, Kabel 4 m Handle, monopolar, cable 4 m		US-Generatoren und Erbe "International" <i>US-style generator and Erbe "International"</i>	89910.0001
		Erbe Generatoren ICC/ACC <i>Erbe generators ICC/ACC</i>	89910.0002
		Martin, Berchtold, Aesculap <i>Martin, Berchtold, Aesculap</i>	89910.0003

Power Control-Generator 2303

for driving power cutters and burrs

Power Control-Generator 2303

zum Antrieb von Rotationsmessern und -Fräsern

Arthroskopie
Arthroscopy



- ☐ Individual selection and storage of the rotational speed and oscillation depending on the application and use of the rotating instruments:

- 4 ranges

Range	Motorised Handle Power Stick M3* (8563.311)	Motorised Handle Power Stick M4 (8564.121)
I	100 - 800 rpm	100 - 1000 rpm
II	400 - 1000 rpm	500 - 1500 rpm
III	1000 - 2000 rpm	1000 - 2500 rpm
IIII	2000 - 3000 rpm	2000 - 6000 rpm

* only for use with adapter 2303.911

- The speed can also be changed and stored by the operator during the treatment using the footswitch
- Permanent indication on the digital display
- Variable oscillation
- RIWO-NET interface
- Graphic user guidance
- New footswitch
- Universal power supply input
- Knife positioning

- ☐ Modes: forwards, backwards or oscillating

Power Control-Generator,

including footswitch (2303.901),

50 / 60 Hz, 100-127 / 220-240 V a.c.2303.001

- ☐ Individuelle Vorwahl und Speicherung der Drehzahl und der Oszillation je nach Anwendung und Verwendung der Rotations-Instrumente:

- 4 Bereiche

Bereich	Motorhandgriff Powerstick M3* (8563.311)	Motorhandgriff Powerstick M4 (8564.121)
I	100 - 800 rpm	100 - 1000 rpm
II	400 - 1000 rpm	500 - 1500 rpm
III	1000 - 2000 rpm	1000 - 2500 rpm
IIII	2000 - 3000 rpm	2000 - 6000 rpm

* nur in Verbindung mit Adapter 2303.911

- Drehzahländerungen und Speicherung auch während der Behandlung direkt durch den Operateur über den Fußschalter möglich
- ständige Anzeige am Digital-Display
- variable Oszillation
- RIWO-NET-Schnittstelle
- grafische Benutzerführung
- neuer Fußschalter
- Weltbereichs-Netzeingang
- Messerpositionierung

- ☐ Betriebsarten: vorwärts, rückwärts oder oszillierend

Power Control-Generator,

einschließlich Fußschalter (2303.901),

50 / 60 Hz, 100-127 / 220-240 V~2303.001

Technical Data

Power Control-Generator 2303

Technische Daten

Power Control-Generator 2303


Schutzklasse nach EN 60601 / IEC 601-1 <i>Safety class EN 60601 / IEC 601-1</i>	1
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) <i>Electromagnetic compatibility (EMC)</i>	EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2
Klassifikation <i>Classification</i>	BF
EN-Klasse <i>EN class</i>	Ila
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	330 x 100 x 360 mm
Gewicht <i>Weight</i>	7.6 kg
Leistungsaufnahme <i>Power consumption</i>	110 VA

POWER STICK M3

Motorised Handle

POWER STICK M3

Motorhandgriff

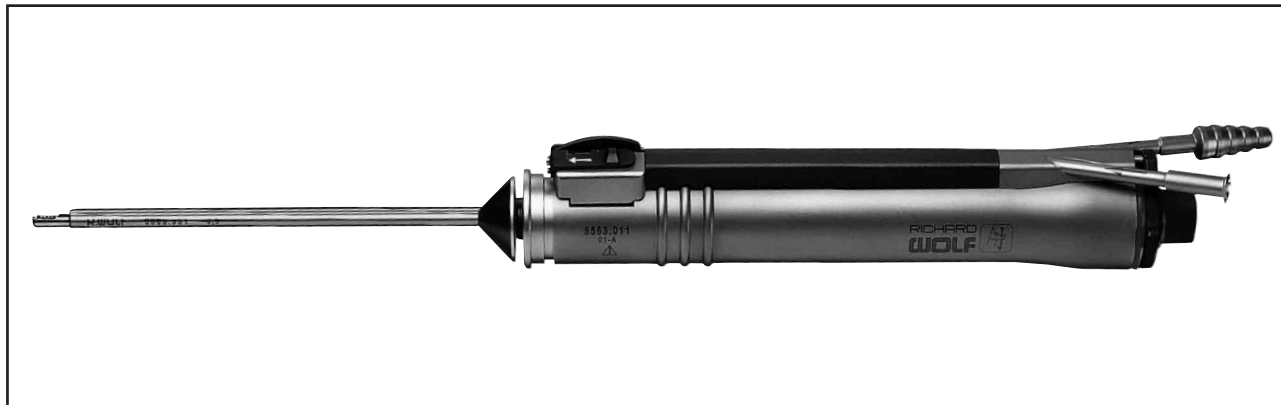

- ☐ Ergonomic
- ☐ Easy to clean
- ☐ Titanium housing
- ☐ Efficient suction and irrigation

Motor handpiece, small

comprising: handpiece (8563.011),
motor cartridge (8563.911), suction and irrigation system
(8563.301) and connecting cable
3 m long (8563.851).....8563.311

Irrigation adaptor

Ø 3.5 mm8563.351
Ø 4.5 mm8563.451
Ø 5.5 mm8563.551

For sterilization, transport, storage:

RIWO-SYSTEM-TRAY

450 x 40 x 210 mm (W x H x D) incl.
lid for motor handpiece
and cutters.....38301.031

- ☐ Ergonomisch
- ☐ Hygienefreundlich
- ☐ Titangehäuse
- ☐ Effiziente Saugung und Irrigation

Motorhandgriff, klein

bestehend aus: Handgriff (8563.011),
Motorkapsel (8563.911), Saug-Spül- System (8563.301) und
Anschlußkabel,
3 m lang (8563.851).....8563.311

Spül-Adapter

Ø 3,5 mm8563.351
Ø 4,5 mm8563.451
Ø 5,5 mm8563.551

Für Sterilisation, Transport, Lagerung:

RIWO-SYSTEM-TRAY

450 x 40 x 210 mm (B x H x T)
inkl. Deckel für Motorhandgriff
und Rotationsmesser38301.031

Technische Daten / Technical Data


Drehzahl Revolutions p.m.	25 - 3000 rpm
Anhaltemoment Torque	7 Ncm
Gewicht Weight	260 g (betriebsbereit / ready for use)
Abmessungen ohne Messer (Ø x L x H) Dimensions without knife (Ø x l x h)	27 x 175 x 31 mm
Anschlußkabel Connecting cable	3 m

POWER STICK M4

Motorised Handle
for Power Control-Generator 2303

POWER STICK M4

Motorhandgriff
zum Power Control-Generator 2303

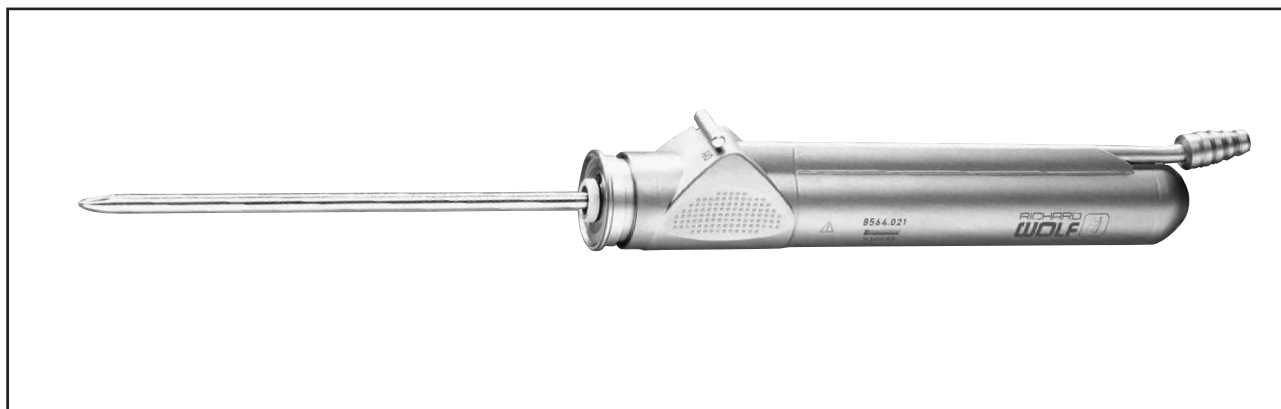

- ☐ Autoclavable
- ☐ Simple and safe use of cutting instruments and burs
- ☐ Optimised suction
- ☐ Low vibration
- ☐ New suction valve with improved user-friendliness
- ☐ Ergonomic design
- ☐ Simple to dismantle for cleaning and storage
- ☐ High torque
- ☐ Individual defined cutting instrument stop
- ☐ Low weight / small dimensions
- ☐ Universal application

- ☐ Autoklavierbar
- ☐ Einfache und sichere Aufnahme der Rotationsmesser und -fräser
- ☐ Optimierte Absaugung
- ☐ Vibrationsarm
- ☐ Neues Saugventil mit verbessertem Bedienkomfort
- ☐ Ergonomisches Design
- ☐ Einfache Demontage zur Reinigung und Aufbewahrung
- ☐ Hohes Drehmoment
- ☐ Individueller, definierter Rotationsmesserstopp
- ☐ Geringes Gewicht / kleine Abmessungen
- ☐ Universell einsetzbar

Power Stick M4 Motorised Handle (8564.021)
with connecting cable (8564.851)8564.121

Power Stick M4 Motorhandgriff (8564.021)
mit Anschlusskabel (8564.851).....8564.121

For sterilisation, transport, storage:

RIWO SYSTEM TRAY

400 x 60 x 200 mm (W x H x D) incl. cover

and peg mats for handle and

cutters.....38 201.486

Für Sterilisation, Transport, Lagerung:

RIWO-SYSTEM-TRAY

400 x 60 x 200 mm (B x H x T) inkl. Deckel

und Noppenmatten für Motorhandgriff und

Rotationsmesser38 201.486

Technische Daten / Technical Data

Länge Length	Handgriff / handle 170 mm Kabel / cable 3 m
Drehzahl Rotational speed	100 - 6000 rpm
Gewicht Weight	319 g

*Reusable
Power Cutters and Burrs
for RIWO DRIVE motorised handle*

Mehrfach-Gebrauchs-
Rotationsmesser und -Fräser
für RIWO-DRIVE-Motorhandgriff

Arthroskopie
Arthroscopy




Zum Mehrmalgebrauch (1 Stück) <i>Reusable (1 instrument part)</i>	Empfohlene Drehzahl <i>Recommended speed</i>	Kennfarbe <i>Colour code</i>	Ø 2 mm NL / WL 76.5 mm	Ø 3 mm NL / WL 76.5 mm	Ø 3.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 4.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 5.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 6 mm NL / WL 126.5 mm
 Resector	600-800 U / min oszillierend 600-800 rpm oscillating	gelb <i>yellow</i>	8564.011		8567.011	8568.011	8569.011	
 Oval Resector		gelb <i>yellow</i>				8568.031		
 Oval Resector plus						8568.032		
 Incisor		blau <i>blue</i>			8567.051	8568.051		
 End Cutter		rot <i>red</i>			8567.561	8568.561		
 Shaver Cutter		grün <i>green</i>		8566.201		8568.201		
 Slotted Whisker	1250-2500 U / min 1250-2500 rpm	weiß <i>white</i>			8567.251	8568.251		
 Hooded Round Burr		grau <i>grey</i>		8566.301		8568.301	8569.301	
 Unhooded Round Burr		grau <i>grey</i>						8571.301
 Acrominizer	3000 U / min 3000 rpm	grau <i>grey</i>					8569.351	

Single use
Power Cutters and Burrs
for RIWO DRIVE motorised handle

Einmal-Gebrauchs-
Rotationsmesser und -Fräser
für RIWO-DRIVE-Motorhandgriff

Arthroskopie
Arthroscopy

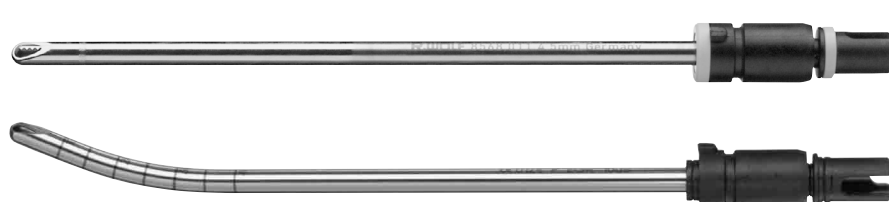					
Zum Einmalgebrauch (5 Stück, einzeln steril verpackt) <i>Disposable (set of 5, in individual, sterile packing)</i>	Empfohlene Drehzahl <i>Recommended speed</i>	Kenntfarbe <i>Colour code</i>	Ø 3.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 4.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 5.5 mm NL / WL 126.5 mm
 Full Radius Resector	600-800 U / min oszillierend 600-800 rpm oscillating	braun <i>brown</i>	4567.021	4568.021	4569.021
 Aggressive Meniscus Resector		blau <i>blue</i>	4567.022	4568.022	4569.022
 Curved Meniscus Resector concave		schwarz <i>black</i>		4568.031	
 Curved Meniscus Resector convex				4568.032	
 Serrated Scalped Resector		gelb <i>yellow</i>	4567.041	4568.041	4569.041
 End cutter		rot <i>red</i>	4567.571	4568.571	4569.571
 Shaver cutter		grün <i>green</i>	4567.211	4568.211	
 Slotted Whisker		weiß <i>white</i>		4568.261	

Single use
Power Cutters and Burrs
for RIWO DRIVE motorised handle

Einmal-Gebrauchs-
Rotationsmesser und -Fräser
für RIWO-DRIVE-Motorhandgriff

Arthroskopie
Arthroscopy



Zum Einmalgebrauch (5 Stück, einzeln steril verpackt) <i>Disposable (set of 5, in individual, sterile packing)</i>		Kennfarbe <i>Colour code</i>	Ø 3.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 4.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 5.5 mm NL / WL 126.5 mm	Ø 6 mm NL / WL 126.5 mm
 Hooded Round Burr	grau <i>grey</i>			4568.451		
 Unhooded Round Burr	grau <i>grey</i>					4571.461
 Oval Burr	grau <i>grey</i>	4567.471				
 Acromionizer	grau <i>grey</i>				4569.351	

Fluid Control 2203

Irrigation Pump for Arthroscopy

Fluid Control 2203

Spülpumpe für die Arthroskopie



- ☐ Contact-free pressure measurement in tube system
- ☐ Optimum user convenience with clearly arranged display
- ☐ CAN bus interface for voice control
- ☐ Autoclavable remote control
- ☐ Highly economical with day and patient tube sets

Fluid Control, Irrigation Pump for Arthroscopy,

including reusable tube set (8170.223)
and 3 m power cable (2440.03)2203.001
on request
incl. CAN-Bus interface2203.002

also

Tube set,

PVC, disposable, sterile, pack of 104170.223

Tube set,

PVC, disposable, sterile, with Safe-Lock, pack of 104170.224

Foot switch,

pneumatic2030.231

Remote control cable,

autoclavable2202.961
not autoclavable2202.991

- ☐ Berührungslose Druckmessung im Schlauchsystem
- ☐ Optimaler Bedienkomfort durch übersichtliches Display
- ☐ CAN-bus-Schnittstelle zur Sprachsteuerung
- ☐ Autoklavierbare Fernbedienung
- ☐ Hohe Wirtschaftlichkeit durch Tages-/Patientenschlauchsets

Fluid Control, Spülpumpe für die Arthroskopie,

einschl. Schlauchset (8170.223) und Netzkabel,
3 m lang (2440.03)2203.001
auf Wunsch
mit CAN-Bus-Schnittstelle2203.002

hierzu

Schlauchset,

PVC, Einmalartikel, steril, VE 10 Stück4170.223

Schlauchset,

PVC, Einmalartikel, steril,
mit Safe-Lock-Anschluß, VE 10 St.4170.224

Fußschalter,

pneumatisch2030.231

Kabel-Fernbedienung,

autoklavierbar2202.961
nicht autoklavierbar2202.991

Technical Data

Fluid Control 2203

Technische Daten


Fluid Control 2203

Netzanschluß <i>Power supply</i>	100-240 V~, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme <i>Power consumption</i>	max. 50 W
Schutzklasse nach VDE 0750 / IEC 601 <i>Safety class (VDE 0750 / IEC 601)</i>	1
Klassifikation <i>Classification</i>	BF
Druckbereich (stufenlos vorwählbar) <i>Pressure range (infinitely adjustable)</i>	0-150 mm Hg
Förderleistung (in 50 ml-Schritten vorwählbar) <i>Delivery rate (adjustable in 50-ml increments)</i>	0-1.5 l/min
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	360 x 150 x 350 mm
Gewicht <i>Weight</i>	8.4 kg
CAN-Bus-Schnittstelle <i>CAN-Bus Interface</i>	nur bei 2203.002 <i>for 2203.002 only</i>

Arthroscopic Working Station

Arthroskopische Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

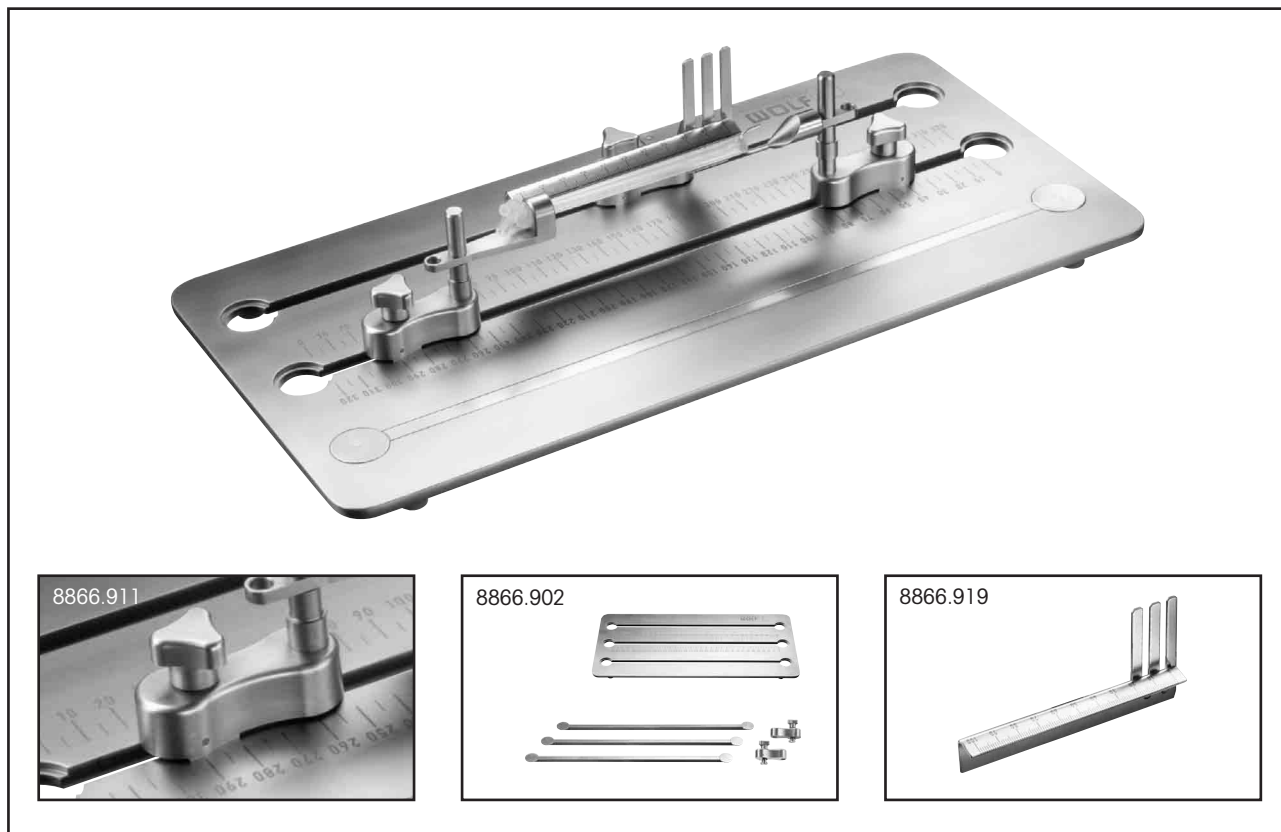

Arthroscopic working station

incl. covers and

2 clamp holding fixtures (8866.911)8866.902

Ruler

for tendon linear measuring,

graduation of scale 0 - 100 mm8866.919

also:

Clamp holding fixture8866.911

Arthroskopische Arbeitsplatte

mit Abdeckungen und

2 Klemmen-Aufnahmen (8866.911)8866.902

Lineal

zur Längenmessung der Sehne,

Skalierung 0 - 100 mm8866.919


hierzu:

Klemmen-Aufnahme8866.911

*Transplant Holding Fixtures
for Arthroscopic Working Station*

Transplantat-Aufnahmen
zur Arthroskopischen Arbeitsplatte


Arthroskopie
Arthroscopy

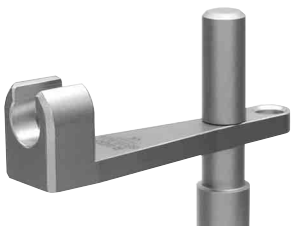		Ø	Typen Types
	Pinzetten-Klemme Tweezers clamp		8866.912
	Parallel-Schraubklemme Parallel vise		8866.913
	V-Klemme V-clamp		8866.914
	Hakenklemme für Semitendinosus- Gracillessehne Hook clamp for Semitendinosus- Gracillestendon		8866.915
	Sehnen-Aufnahme für Semitendinosus- Gracillessehne Tendon holding fixture for Semitendinosus- Gracillestendon	6 mm	8866.916
		7 mm	8866.917
		8 mm	8866.918
	Knochenblockaufnahme Bone-block-holder	8.4 mm	8866.923
		9.4 mm	8866.924
		10.4 mm	8866.925

Holding Fixtures for Preparation for Arthroscopic Working Station

Aufnahmen zur Präparation zur Arthroskopischen Arbeitsplatte

Arthroskopie
Arthroscopy

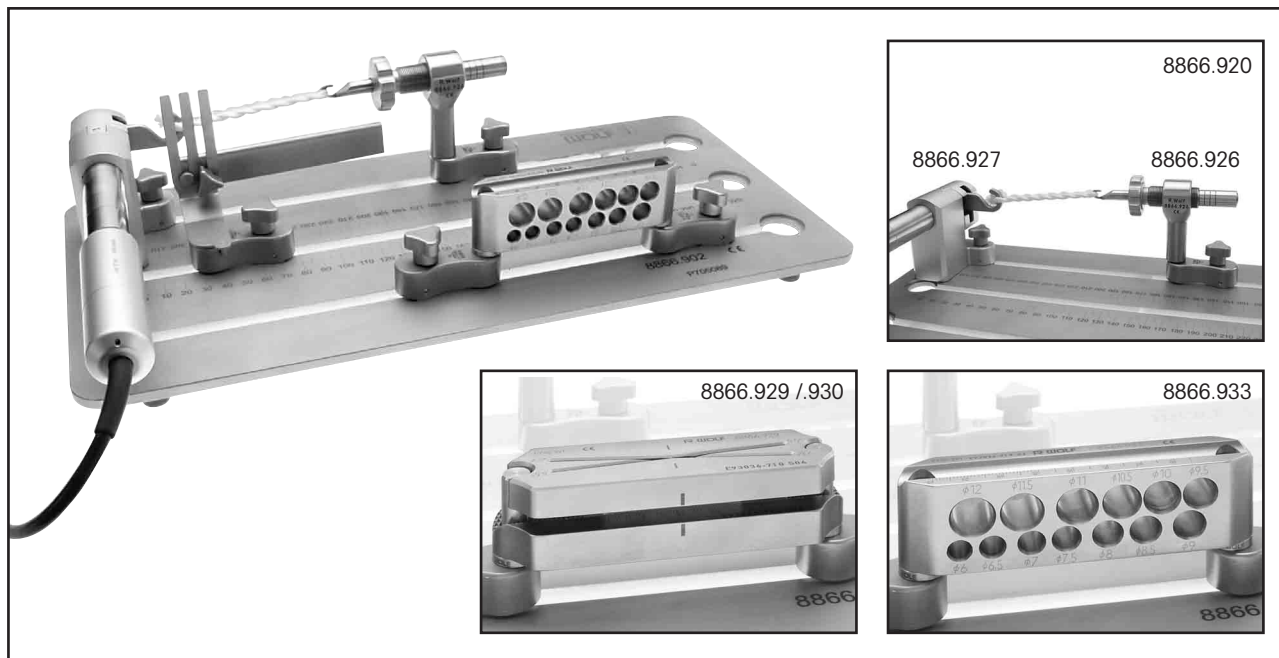

Conditioning-Unit

consisting of:

Conditioning hook (8866.926) and Conditioning block (8866.927)
(the unit could only be used with
Control-Unit 20950.0201)8866.920

Conditioning hook8866.926
Conditioning block8866.927

Bone cutting holder

cutting angle 5.5° and 7.5° for workbench 8866.9028866.929

Bone cutting holder

cutting angle 9.5° and 11.5°
for workbench 8866.9028866.930

Transplant template for workbench 8866.9028866.933

Konditioniereinheit

bestehend aus:

Konditionierhaken (8866.926) und Konditionierantriebsblock
(8866.927) (Die Einheit kann nur mit dem
Steuergerät 20950.0201 betrieben werden)8866.920

Konditionierhaken8866.926
Konditionierantriebsblock8866.927

Knochenschneidaufnahme

Schnittwinkel 5,5° und 7,5° für Werkbank 8866.9028866.929

Knochenschneidaufnahme

mit Schnittwinkel 9,5° und 11,5°
für Werkbank 8866.9028866.930

Transplantat-Schablone für Werkbank 8866.9028866.933

CHIRMOT 10

Standard Set

CHIRMOT 10

Standard-Set



CHIRMOT 10 Standard-Set CHIRMOT 10 Standard Set	20950.0000
bestehend aus: consisting of:	Typen Types
Steuergerät Control Unit	20950.0201
Netzkabel, 3 m Main Cord, 3 m	20950.0301
Fußpedal vario Foot switch vario	20950.0401
Elektronik-Motor, Standard (inkl. 2 Anschlußkabel) Electronic Motor, Standard (incl. 2 connecting cables)	80950.0003
Schlauchset, steril, zum Einmalgebrauch Tube Set, sterile, disposable	40900.0001
Clip-Set, 12-teilig Clip Set, 12 pieces	40900.0201
Handstückablage Support for hand pieces	40900.0401
Clean-Spray, 500 ml Clean Spray, 500 ml	40900.1000
Sprüh-Aufsatz für Handstücke Clean Spray Connector for hand pieces	40900.1201
Sprüh-Aufsatz für Motoren Clean Spray Connector for motors	40900.1202
Stativ für Irrigationsbehälter Tripod for Irrigation	80900.0000

CHIRMOT 10

Standard Set
Technical Data

CHIRMOT 10

Standard-Set
Technische Daten

Motordrehzahl: <i>Motor speed:</i>	500 - 40.000 U / min 500 - 40.000 rpm
Motordrehmomente: <i>Motor torque level:</i>	1 - 10 Ncm
Pumpe: <i>Pump:</i>	100 ml / min
Motorleistung: <i>Motor-Power:</i>	200 Watt
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	290 x 110 x 260 mm
Gewicht: <i>Weight:</i>	4.5 kg
Netzspannung (umschaltbar): <i>Voltage (change over):</i>	230 / 115 V~

CHIRMOT 10

Brushless Electronic Motors
with INTRA Coupling

CHIRMOT 10

Bürstenlose Elektronik-Motoren
mit INTRA-Schnittstelle



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	Ø	Typen Types
Elektronik-Motor, Standard inkl. je 2 Anschlußkabel Electronic Motor, Standard incl. 2 connecting cables	26 mm	80950.0003
Elektronik-Motor, Mittel inkl. je 2 Anschlußkabel Electronic Motor, Medium size incl. 2 connecting cables	21 mm	80950.0002


	Länge Length	Typen Types
Kabel für Elektronik-Motor, Standard Cable for electronic motor, Standard	3 m	80950.0203
Kabel für Elektronik-Motor, Mittel Cable for electronic motor, Medium size		80950.0202

CHIRMOT 10

Hand Pieces, straight or angled
with INTRA Coupling


CHIRMOT 10

Handstücke und Winkelhandstücke
mit INTRA-Schnittstelle

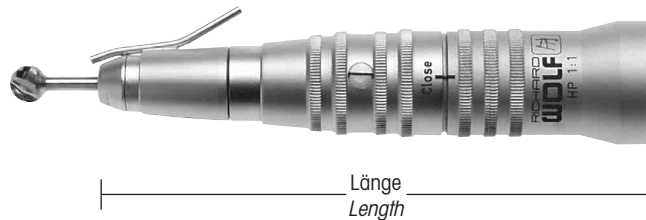

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	max. Motordrehzahl max. motor speed	Getriebeübersetzung Transmission	Länge Length	für Werkzeuge for burrs		Typen Types
				Schaft-Ø Shank Ø	Länge ab Length from	
Handstück, kurz Hand piece, short	40.000 U / min 40.000 rpm	1:1	90 mm	2.35 mm	44 mm	82950.1001
Handstück, mittel Hand piece, medium			104 mm		70 - 95 mm	82950.1002
Handstück, lang Hand piece, long			127 mm		90 - 125 mm	82950.1003

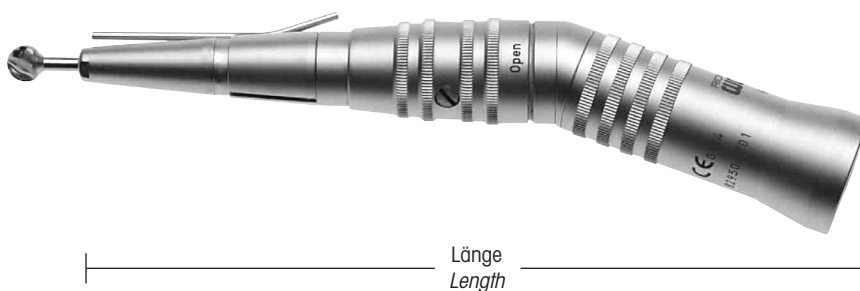

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	max. Drehzahl max. motor speed	Getriebeübersetzung Transmission	Länge Length	für Werkzeuge for burrs		Typen Types
				Schaft-Ø Shank Ø	Länge ab Length from	
Winkel-Handstück Hand piece, angled	40.000 U / min 40.000 rpm	1:1	130 mm	2.35 mm	70 - 95 mm	82950.1201
					90 - 125 mm	82950.1202

CHIRMOT 10

Tungsten Carbide Burrs

CHIRMOT 10

Hartmetall-Fräser



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	Ø	Schaft-Ø Shank Ø	Gesamtlänge Total length	Typen Types
Hartmetall-Fräser-Set bestehend aus: 14 Fräser und Bohrerständer Tungsten Carbide Burr Set, consisting of: 14 burrs and drill support	0.6 - 7.0 mm	2.35 mm	70 mm	82960.3400
Hartmetall-Fräser, VE = 10 St. Tungsten Carbide Burr, pack of 10	0.6 mm	2.35 mm	70 mm	82960.3406
	0.8 mm			82960.3408
	1.0 mm			82960.3410
	1.4 mm			82960.3414
	1.8 mm			82960.3418
	2.3 mm			82960.3423
	2.7 mm			82960.3427
	3.1 mm			82960.3431
	3.5 mm			82960.3435
	4.0 mm			82960.3440
	4.5 mm			82960.3445
	5.0 mm			82960.3450
	6.0 mm			82960.3460
	7.0 mm			82960.3470

CHIRMOT 10

Diamond Burrs

CHIRMOT 10

Diamant-Fräser



AUTOCLAVE
134° C / 273° F


	Ø	Schaft-Ø Shank Ø	Gesamtlänge Total length		Typen Types
			70 mm	95 mm	
Diamant-Fräser-Set, bestehend aus: 15 Fräser und Bohrerständer Diamond Burr Set, consisting of: 15 burrs and drill support	0.6 - 7.0 mm	2.35 mm	•		82960.3600
Diamant-Fräser-Set, bestehend aus: 10 Fräser und Bohrerständer Diamond Burr Set, consisting of: 10 burrs and drill support	1.4 - 7.0 mm			•	82960.3800
Diamant-Fräser VE = 10 St. Diamond Burr pack of 10	0.6 mm	2.35 mm	•		82960.3606
	0.7 mm		•		82960.3607
	0.8 mm		•		82960.3608
	1.0 mm		•		82960.3610
	1.4 mm		•		82960.3614
				•	82960.3814
	1.8 mm		•		82960.3618
				•	82960.3818
	2.3 mm		•		82960.3623
				•	82960.3823
	2.7 mm		•		82960.3627
				•	82960.3827
	3.1 mm		•		82960.3631
				•	82960.3831
	3.5 mm		•		82960.3635
				•	82960.3835
	4.0 mm		•		82960.3640
				•	82960.3840
	4.5 mm		•		82960.3645
				•	82960.3845
	5.0 mm		•		82960.3650
				•	82960.3850
	6.0 mm		•		82960.3660
					82960.3670
	7.0 mm			•	82960.3870

CHIRMOT 10

Burr, barrel style
Burr by Lindemann

CHIRMOT 10

Fräser, walzenförmig
Bohrer nach Lindemann

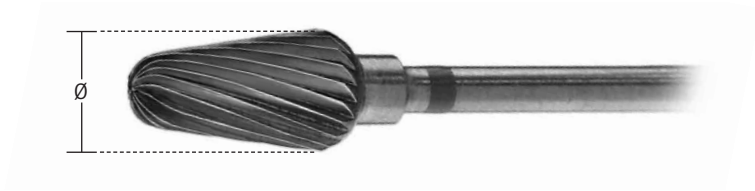 AUTOCLAVE 134° C / 273° F				
	Ø	Schaft-Ø Shank Ø	Gesamtlänge Total length	Typen Types
Fräser, walzenförmig, VE = 10 St. Burr, barrel style, pack of 10	5.0 mm	2.35 mm	70 mm	82960.4450
	6.0 mm			82960.4460
	7.0 mm			82960.4470

 AUTOCLAVE 134° C / 273° F				
	Ø	Schaft-Ø Shank Ø	Gesamtlänge Total length	Typen Types
Bohrer nach Lindemann, VE = 10 St. Burr by Lindemann, pack of 10	1.8 mm	2.35 mm	70 mm	82960.4618
	2.1 mm			82960.4621
	2.3 mm			82960.4623

CHIRMOT 10

Micor Compass Saw
with INTRA Coupling

CHIRMOT 10

Mikro-Stichsäge
mit INTRA-Schnittstelle



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	max. Drehzahl max. motor speed	Getriebeübersetzung Transmission	Typen Types
Mikro-Stichsäge mit Sprühdüse (ohne Sägeblätter)	15.000 U / min	1:1	82950.1401
Micro compass saw with irrigation tube (without saw blades)	15.000 rpm		

	Nutzlänge Working length	Typen Types
Sägeblatt , Blattstärke 0,4 mm, VE = 6 St.	10 mm	82960.0210
	17 mm	82960.0217
Saw blade , thickness of blade 0.4 mm, pack of 6	25 mm	82960.0225




	Form Shape	Typen Types
Raspelaufsatz, Hartmetall für Mikro-Stichsäge	0	82960.0000
	1	82960.0001
	4	82960.0004
Rasp, tungsten carbide for micro compass saw	7	82960.0007
	10	82960.0010

CHIRMOT 10

Micro Oscillating Saw
with INTRA Coupling

CHIRMOT 10

Mikro-Säge, oszillierend
mit INTRA-Schnittstelle

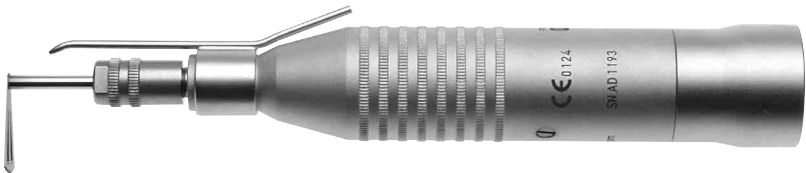

AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	max. Drehzahl max. motor speed	Getriebeübersetzung Transmission	Oszillations-Winkel Angle of oscillation	Typen Types
Mikro-Säge, oszillierend mit Sprühdüse (ohne Sägeblätter) Micro oscillating saw with irrigation tube (without saw blades)	15.000 U / min 15.000 rpm	1:1	25°	82950.1601

	Höhe Height	Breite Width	Typen Types
Sägeblatt mit kurzem Schaft, Blattstärke 0,4 mm Saw blade with short shank, thickness of blade 0.4 mm	14 mm	6 mm	82960.1006
		10 mm	82960.1010
		15 mm	82960.1015

CHIRMOT 10

*Micro Saw, Osseoskalpell with sagittal cut
with INTRA Coupling*

CHIRMOT 10

*Mikro-Säge, Osseoskalpell mit sagittalem Schnitt
mit INTRA-Schnittstelle*



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	max. Drehzahl max. motor speed	Getriebeübersetzung Transmission	Typen Types
Mikro-Säge, Osseoskalpell mit sagittalem Schnitt, mit Sprühdüse (ohne Sägeblätter) Micro saw, osseoskalpell with sagittal cut, with irrigation tube (without saw blades)	15.000 U / min 15.000 rpm	1:1	82950.1801

	Höhe Height	Breite Width	Typen Types
Sägeblatt, Blattstärke 0,4 mm, VE = 6 St. Saw Blade, thickness of blade 0.4 mm, pack of 6	10 mm	9 mm	82960.0409
	15 mm	6 mm	82960.0606
	15 mm	10 mm	82960.0610

CHIRMOT 10

Hand Piece, angled, for surgery wires
with INTRA Coupling

CHIRMOT 10

Winkel-Handstück für Chirurgiedrähte
mit INTRA-Schnittstelle

 AUTOCLAVE 134° C / 273° F				
	max. Drehzahl max. motor speed	Getriebeuntersetzung Transmission	Länge Length	Typen Types
Winkel-Handstück für Chirurgiedrähte mit Ø 0,5 - 1,6 mm (ohne Drähte) Hand piece, angled, for surgery wires with Ø 0.5 - 1.6 mm (without wires)	2.500 U / min 2.500 rpm	16:1	105 mm	82950.2001
Ersatz Winkelstückkopf Contra angled head				82950.2101

	Länge Length	Ø	Typen Types
Chirurgiedraht, VE = 10 St. Surgery wire, pack of 10	70 mm	0.8 mm	82960.2208
	70 mm	1.0 mm	82960.2210
	150 mm	0.8 mm	82960.2408
	150 mm	1.0 mm	82960.2410
	150 mm	1.2 mm	82960.2412
	150 mm	1.5 mm	82960.2415

CHIRMOT 10

Dermatomes
with INTRA Coupling

CHIRMOT 10

Dermatome
mit INTRA-Schnittstelle



AUTOCLAVE
134° C / 273° F

	Klingenbreite Width of blade	max. Drehzahl max. motor speed	Typen Types
Dermatom	12 mm	8.000 U / min <i>8.000 rpm</i>	82950.2612
	25 mm		82950.2625
Dermatome	50 mm		82950.2650
	75 mm		82950.2675

11

	Breite Width	Typen Types
Ersatzklingen für Dermatom, VE = 10 St. Spare blades for dermatome, pack of 10	12 mm	42960.1412
	25 mm	42960.1425
	50 mm	42960.1450
	75 mm	42960.1475

	Reduzierung von 75 mm nach Reduction from 75 mm to	Type
Reduzier-Einsatz für Dermatom-Bodenplatte Reduction support base for dermatome	50 mm	82960.1501
	25 mm	82960.1502

CHIRMOT 10

Accessories

CHIRMOT 10

Zubehör

 AUTOCLAVE 134° C / 273° F	
	Typen Types
Bohrerständer für 16 Handstück-Instrumente Drill support for 16 handpiece instruments	82900.0023

	Typen Types
Ersatz-Überwurfmutter Spare fixation nut	82900.0800
Ersatz-Gabelschlüssel Fork wrench	82900.1000
Sprührohraufsatz Spare irrigation tube	82900.0400

CHIRMOT 10

Cleaning, maintenance

CHIRMOT 10

Reinigung, Pflege



	Inhalt Capacity	Typen Types
Clean-Spray zur Pflege der Handstücke Clean spray for the maintenance of the hand pieces	500 ml	40900.1000


		Typen Types
Sprüh-Aufsatz Clean spray connector	 für Handstücke for hand pieces	40900.1201
	 für Motoren for motors	40900.1202

OCP*-Instrument Set

for cartilage transplantation
by Paessler** / Hehl***

OCP*-Instrumenten-Set

zur Knorpeltransplantation
nach Paessler** / Hehl***

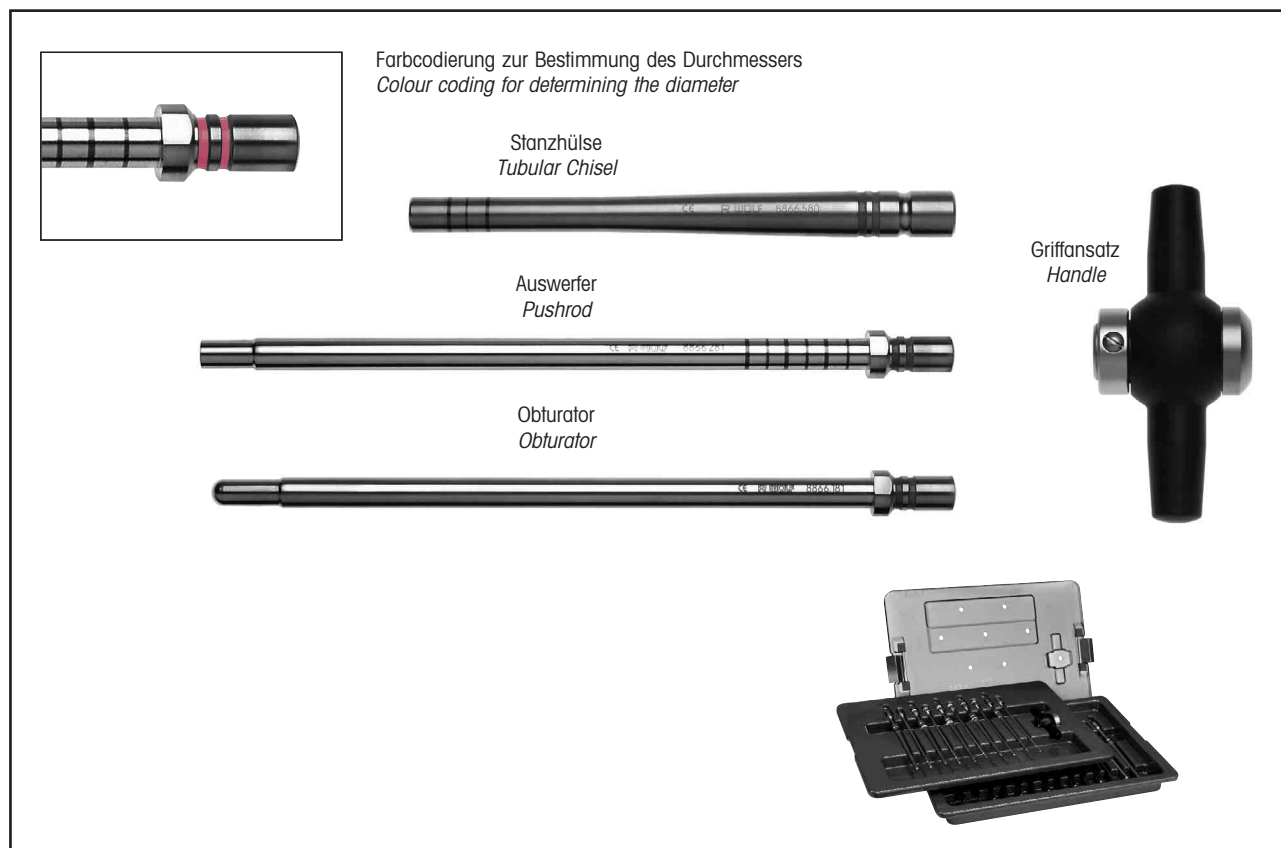

OCP-Instrument Set8866.322

consisting of:

11 Tubular Chisels:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 4.5 x 3.5 mm | ☐ 5.0 x 4.0 mm | ☐ 5.5 x 4.5 mm |
| ☐ 6.0 x 5.0 mm | ☐ 6.5 x 5.5 mm | ☐ 7.0 x 6.0 mm |
| ☐ 7.5 x 6.5 mm | ☐ 8.0 x 7.0 mm | ☐ 8.5 x 7.5 mm |
| ☐ 9.0 x 8.0 mm | ☐ 9.5 x 8.5 mm | |

1 Handle (fits to all Tubular Chisels)

11 Pushrods (one for each Tubular Chisel)

11 Obturators (one for each Tubular Chisel)

Tray for sterilisation and storage,
for holding the complete OCP-Instrument Set

Sealing membrane for handle (10 pieces)89.103

OCP-Instrumenten-Set8866.322

bestehend aus:

11 Stanzhülsen:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 4,5 x 3,5 mm | ☐ 5,0 x 4,0 mm | ☐ 5,5 x 4,5 mm |
| ☐ 6,0 x 5,0 mm | ☐ 6,5 x 5,5 mm | ☐ 7,0 x 6,0 mm |
| ☐ 7,5 x 6,5 mm | ☐ 8,0 x 7,0 mm | ☐ 8,5 x 7,5 mm |
| ☐ 9,0 x 8,0 mm | ☐ 9,5 x 8,5 mm | |

1 Griffansatz (passend für alle Stanzhülsen)

11 Auswerfer (einen für jede Stanzhülse)

11 Obturatoren (einen für jede Stanzhülse)

Tray für Sterilisation und Lagerung,
zur Aufnahme des kompletten OCP-Instrumenten-Sets

Membran für Griffansatz (VE = 10 St.)89.103


* Osteo Chondral Plasty

** Dr. med. Hans H. Paessler, ATOS-Klinik Heidelberg, Bismarckstr. 9-15, D-69115 Heidelberg, e-mail: paessler@atos.de

*** OA Dr. Gerhard Hehl, Universitäts-Unfallklinik, Steinhövelstr. 9, D-89070 Ulm

ACL-Revision Set by Paessler*

ACL-Revisions-Set nach Paessler*

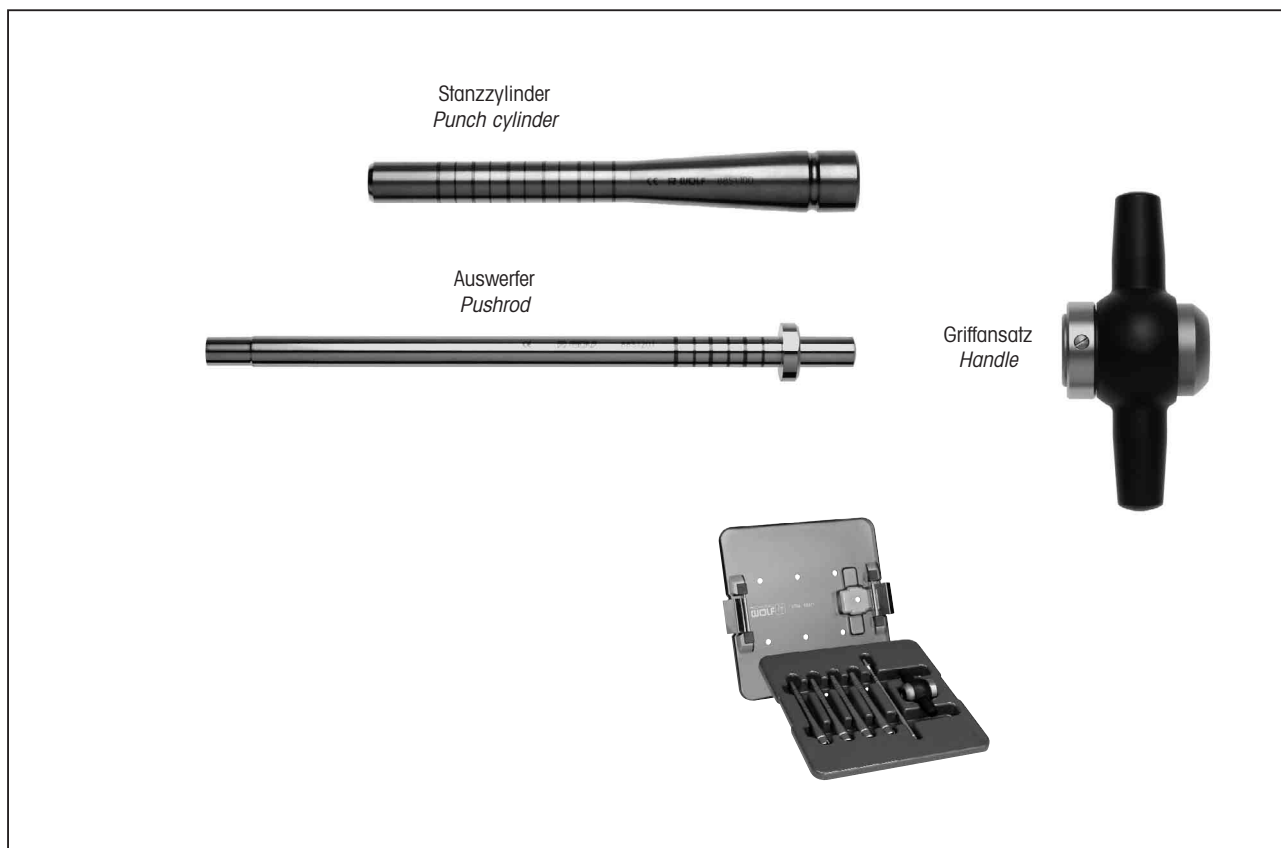

ACL-Revision Set8851.302
consisting of:

4 Punch cylinders for harvesting of Iliac crest bone block:

- ☐ 10 mm ☐ 11 mm
- ☐ 12 mm ☐ 13 mm

1 Pushrod (fits to all punch cylinders)

1 Handle (fits to all punch cylinders)

Tray for sterilisation and storage,
for holding the complete ACL-Revision Set

ACL-Revisions-Set8851.302
bestehend aus:

4 Stanzzylindern zur Gewinnung von Beckenkammblocken:

- ☐ 10 mm ☐ 11 mm
- ☐ 12 mm ☐ 13 mm

1 Auswerfer (passend für alle Stanzzylinder)

1 Griffansatz (passend für alle Stanzzylinder)

Tray für Sterilisation und Lagerung,
zur Aufnahme des kompletten ACL-Revisions-Sets

* Dr. med. Hans H. Paessler, ATOS-Klinik Heidelberg, Bismarckstr. 9-15, D-69115 Heidelberg, e-mail: paessler@atos.de

Legholder

Beinhalter



- ☐ Firm fixation of the leg
- ☐ Easily fitted to different thigh dimensions
- ☐ Hinged thigh grip
- ☐ Detachable anti-static padding (can be disinfected)
- ☐ Secure mounting on the table with special clamp, to fit rails 25 and 30 mm height / 10 mm wide


- ☐ Sichere Fixierung des Beines
- ☐ Gute Anpassung an unterschiedliche Oberschenkelmaße
- ☐ Abklappbare Seitenbacke
- ☐ Abnehmbare, antistatische Polsterauflage (desinfizierbar)
- ☐ Über Spezialkloben sichere Fixierung am Untersuchungstisch, Kloben zu OP-Schienen 25 mm und 30 mm Höhe / 10 mm Stärke passend

Leg holder for arthroscopy8562.20

Beinhalter für die Arthroskopie8562.20

Cartilage Extractor

Knorpelextraktor

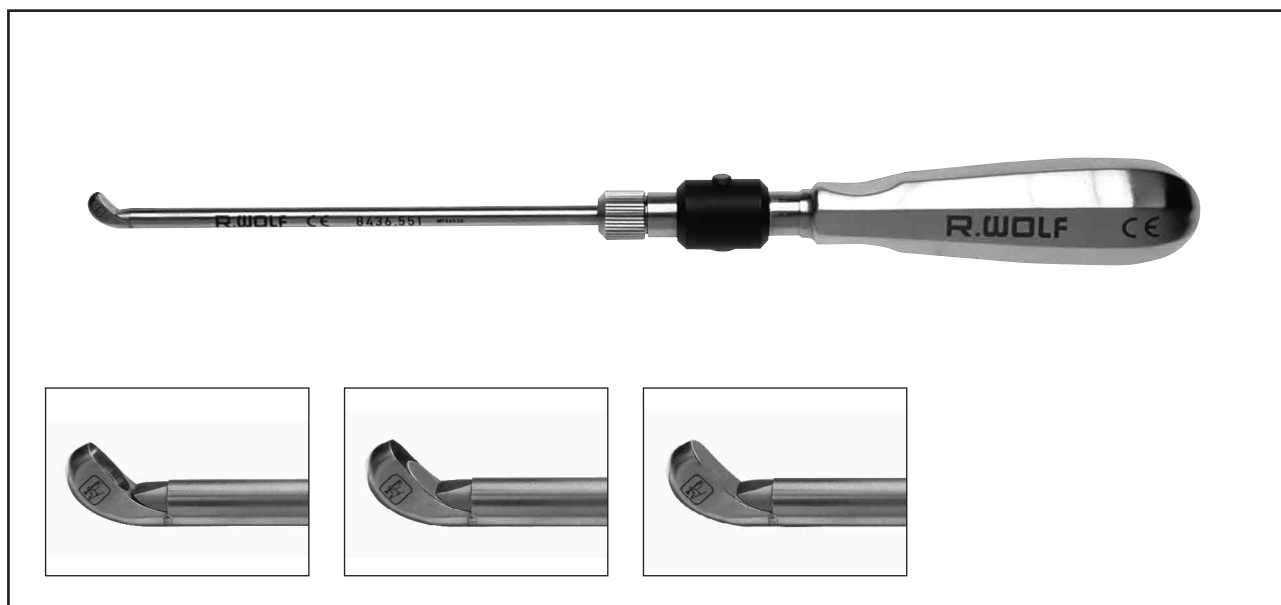

Cartilage extractor

complete.....8436.551

Blades for cartilage extraction

(pack of 3)8436.5511

Knorpelextraktor

komplett8436.551

Klingen für Knorpelextraktion


(3 Stück)8436.5511

ENDO-CARTRIS®

instrument set
for carpal tunnel release

ENDO-CARTRIS®

Instrumentarium
zur Karpal-Tunnel-Spaltung

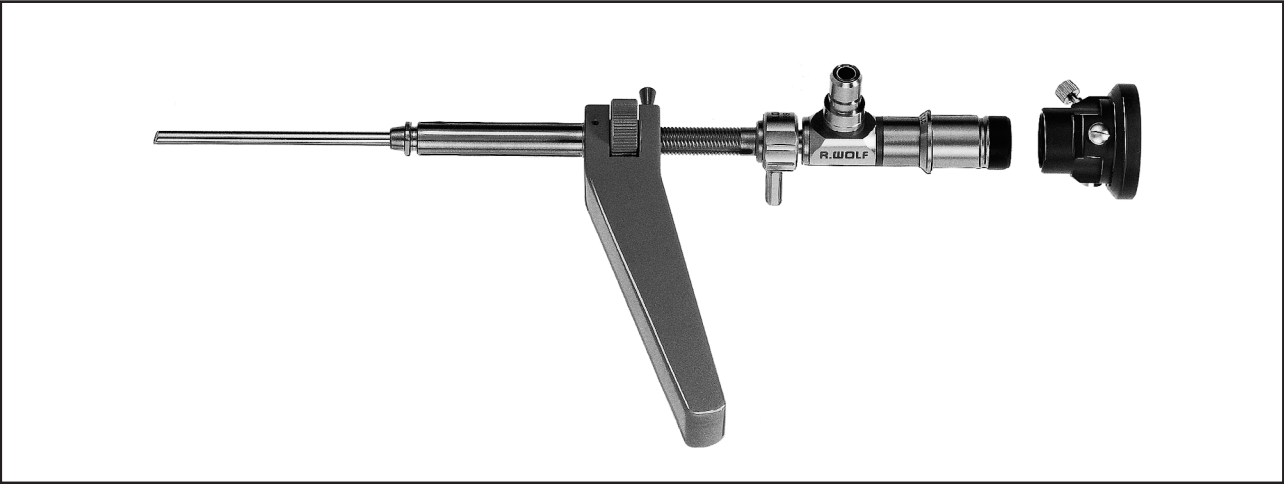

- PANOVIEW PLUS telescope, Ø 4 mm, 25°**
upper light connection.....8880.422
on request:
Plug-on eyepiece.....8885.901

- Telescope guide system with handle
and transport wheel**.....8891.051

- PANOVIEW PLUS-Optik, Ø 4 mm, 25°**
Lichtanschluss oben8880.422
auf Wunsch:
Steck-Okulartrichter8885.901

- Optik-Führungssystem mit Handgriff
und Transportrad**8891.051

A photograph showing two components: a long, thin telescope with a handle and a separate handle with a thumb wheel. The telescope has a threaded section and a small adjustment knob. The handle is L-shaped with a flat base and a vertical stem. The eyepiece is cylindrical with a lens and a small adjustment ring.					
	NL WL	Typen Types	Ø		Typen Types
A photograph of a long, thin metal sleeve with a longitudinal groove. It has a slightly flared end and a small hole at the other end. Einführungshülse mit Längsnut Introducing sleeve with longitudinal groove	65 mm	8891.021	5 mm	A photograph of a long, thin metal rod with a slightly flared end and a small hole at the other end. Obturator	8891.121
		8891.011	6 mm		8891.111

ENDO-CARTRIS®

instrument set
for carpal tunnel release

ENDO-CARTRIS®

Instrumentarium
zur Karpal-Tunnel-Spaltung



Carpal tunnel dissecting probe by Koutsis,


one side sharp, the opposite side blunt

ball shape, angled8891.751

Karpaltunnel-Präpariersonde nach Koutsis,


eine Seite scharf – Gegenseite stumpfe Kugelform,

abgewinkelt8891.751

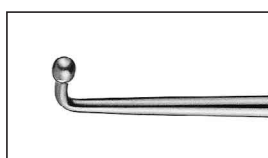

Palpator8891.701

Tastsonde8891.701

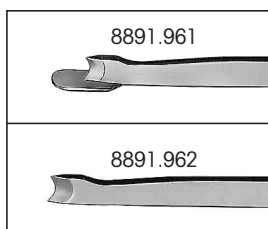

Handle for knife blades8891.951

also:

Knife blade with shoe for controlled

and safe guidance8891.961

or

Hollow-ground knife blade8891.962

As an option to 8891.951:

Handle for disposable knives

(Beaver)8891.901

Handgriff für Messerklingen8891.951

hierzu:

Messerklänge mit Schuh, zur kontrollierten

und sicheren Führung8891.961

oder

Messerklänge mit Hohlschliff8891.962

wahlweise zu 8891.951:

Handgriff für Einmalgebrauchsmesser

(Beaver)8891.901